

Seit der Ausbildung zur Dentalhygienikerin sind scharfe, präzise Instrumente für den täglichen Einsatz immer wieder ein zentrales Thema. Viel Zeit wurde in die Technik des Schleifens von Hand investiert. Vor allem ist dabei das Einhalten des Schleifwinkels gar nicht so einfach. Laufend gab es verschiedene Weiterbildungen und Techniken im Schärfen von Scalern und Küretten. Seit es den PerioStar® 3000 von Kerr gibt, setze ich dieses Gerät sehr gerne und oft ein.

Präzises Schärfen von Scalern und Küretten

Autorin: Vreni Steinegger, dipl. Dentalhygienikerin HF

Ich habe festgestellt, dass mit dem PerioStar® 3000 meine Instrumente sehr winkeltreu und reproduzierbar geschliffen werden. Seit ich eine Praktikantin habe, kommen wir beide auf vergleichbare Resultate. Durchschnittlich jeden zweiten Tag, mindestens aber einmal wöchentlich schärfen wir die Scaler und gebrauchten Küretten fein nach und sind mit dem Resultat des PerioStars® sehr zufrieden. Im Allgemeinen be-

nutzen wir die weiße Schleifscheibe für eine feine Nachschärfung. Hier und da kommt die rosa Scheibe zum Einsatz, wenn etwas mehr nachgeschliffen werden muss.

Pflegeleichte Bedienung

Die Technik im Einzelnen wird in den Unterlagen bzw. der Bedienungsanleitung sehr ausführlich, genau und gut bebildert beschrieben resp. dargestellt. Befolgt man das Vorgehen Step-by-Step, kann nichts falsch gemacht werden.

Nach einer längeren Unterbrechung (z. B. nach Ferien oder Kursen) nehme ich jeweils die Kurzanleitung – eine A4-Seite – zur Hand. Darauf sind die vier Hauptschritte zum Schärfen in Bildern und einem kurzen Text festgehalten.

Das Schleifgerät PerioStar® 3000 ist sehr pflegeleicht. Alle Teile lassen sich gut reinigen und desinfizieren. Die Schleifsteine sind auch sterilisierbar, was wir sehr schätzen: So kann bei Bedarf jederzeit sauber nachgeschärft werden.

Fazit

PerioStar® 3000 ist ein mechanisches Schleifgerät für ein schnelles, einfaches und präzi-

ses Schärfen von Instrumenten. Alle Anforderungen an das Schleifen werden damit erfüllt: die Form des Schleifwinkels sowie die Schärfe bleiben lange erhalten und der Materialabtrag ist minimal.

Zusammenfassend kann zum PerioStar® 3000 von Kerr festgehalten werden, dass scharfe Instrumente für uns in der Praxis folgendes bedeuten:

- mehr Patientenkomfort,
- weniger Krafteinsatz beim Scalen und Deep Scaling,
- verbunden eindeutig mit weniger Ermüdung.

Mit diesen Vorteilen ist allen geholfen und der Praxisalltag mit Sicherheit etwas weniger stressig. ◀

kontakt

Kerr
KerrHawe SA
Via Strecce 4, P.O. BOX 268
6934 Bioggio/Schweiz
Tel.: 00800-41/05 05 05
www.KerrDental.com

