



Die Bleichprozedur mit dem BriteSmile Professional Teeth Whitening System läuft für alle Beteiligten sicher und entspannt ab.



Das milde Wasserstoffperoxid-Gel wird von einem speziellen kalten Licht aus dem blauen Spektrum aktiviert.

In nur einer Stunde weißere Zähne?!

Der große Erfolg von BriteSmile beruht auf einer perfekten Kombination zahlreicher Komponenten beginnend bei der Bereitstellung optimaler Hardware und exklusiven Einweg-Bleich-Materialien bis hin zu einem hervorragenden Marketingkonzept.

| Dr. Martin Jörgens

BriteSmile-Kunden werden auf der BriteSmile-Homepage gelistet und veröffentlicht. So kann der Patient zügig einen erfahrenen Bleichspezialisten in seiner Nähe finden, der diese hochwertige Therapie anbietet. Zum anderen profitiert die BriteSmile-Praxis von exklusiven Hausprodukten in Form von spezieller Zahnpasta, Mundwasser und einem exzellenten Bleichen.

Optimales Bleichergebnis

Alle Produkte dienen dem langfristigeren Erhalt des Bleichergebnisses und der Produkt-Identifizierung. Dies führte in unserer Praxis, in der bereits seit über zehn Jahren Bleichtherapien mit unterschiedlichen Produkten durchgeführt wurden, zu einer klassischen Einführung der Marke BriteSmile. So erwirbt der Patient nicht irgendeine No-Name-Bleichtherapie, sondern das Leading Product im internationalen Bleichmarkt.

Aber was sind die weiteren Schlüssel für den Erfolgsweg von BriteSmile? Zum einen exzellente Beratung und Support für die Einstiegs-kunden als auch die Stammkunden des Hauses. Die Philosophie von BriteSmile geht sogar soweit, den Kunden die hochmoderne Bleichlampe kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Bezahlung erfolgt nur über den Erwerb der exklusiven Einwegbox, in der sich alle Materialien für eine Bleichtherapie befinden.

Der Patient beißt auf einen speziellen Aufbissblock, welcher direkt als korrekter Abstandshalter zur Bleichlampe fungiert. Der Gingivadam ist von optimaler Konsistenz und lässt sich leicht auftragen

Die Abdeckcreme, das periorale Flietuch sowie der Wangenexpander runden das Sicherungskonzept Mundhöhle ab.

Dabei sind alle Produkte in ausreichender Menge, optimaler Konsistenz und ausgereiften Kanülen vorhanden. Die gesamte Vorbereitungszeit verläuft daher effektiver und schneller. Ein weiteres Geheimnis des BriteSmile-Erfolges liegt in der besonderen Bleichgelzusammensetzung und -konsistenz. Gerade mal nur 15 % Wasserstoffperoxidkonzentration reichen dem Bleichgel zur hervorragenden Entfaltung seiner Wirkung aus. Dabei fällt ein Mischen der Komponenten wie bei anderen Anbietern völlig aus. Das Bleichgel ist bereits in optimaler Konsistenz fertig in einer Applikationsspritze abgefüllt und kann sofort nach der Vorbereitung der Mundhöhle aufgebracht werden. Es folgen drei Bleichdurchgänge á 20 Minuten mit der höchst ansprechenden, ästhetischen BriteSmile-Lampe. Nach dem ersten und dem zweiten Durchgang wird noch ein zusätzlicher, ebenfalls fertiger Bleich-Accelerator aufgetragen, der die Zähne während der Bleichzyklen befeuchtet, um so Sensibilitäten herabzusetzen. Die Bleichergebnisse sind verblüffend gut und rein statistisch kommt man auf eine Aufhellung von ca. zehn Farbstufen. Als positiver Effekt der geringen Wasserstoffperoxidkonzentration fällt die erhebliche Verringerung von Hypersensibilitäten auf.

Die gesamte Bleichprozedur läuft einfach ruhiger, sicherer und entspannter für alle Beteiligten ab. Die BriteSmile-Therapie kann ohne Weiteres an erfahrene Assistentinnen oder Dentalhygienikerinnen delegiert werden. Der Preis sollte auf jeden Fall über dem von anderen Standardprodukten liegen. Sowohl erfahrene Bleichpatienten als auch Erstbleicher erkennen die Hochwertigkeit der Marke BriteSmile und empfinden die Preis-Leistungs-Relation als fair. ■



kontakt:

Dr. Martin Jörgens

Gastdozent für Aesthetik
Laser Medicine
der Universität Greifswald
Lasierzentrum und Zahnarztpraxis
Kaiserwerther Markt 25
40489 Düsseldorf