



BILPRON

KENNZIFFER 0801



Die sichere Lösung gegen verstopfte Instrumente: Bilpron und das ALPRO Weekend-System.

Bekannt ist, dass eines der größten Hygieneprobleme in der Zahnheilkunde darin besteht, dass beim hochoptimierten Bohren eine exzessive Keimstreuung freigesetzt werden kann. Gleiches gilt für die Risiken der Keimübertragung durch kontaminiertes Kühl- und Spraywasser sowie Luftgebläseeinrichtungen.

In über zehnjähriger Forschungs- und

Entwicklungsarbeit hat die Firma ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH aus St. Georgen/Schwarzwald Lösungsmöglichkeiten entwickelt, die richtungsweisend sind.

Bilpron, so der Name des entwickelten Produktes, ist die gebrauchsfertige Lösung zur Flutung der gesamten wasserführenden Leitungen in der zahnärztlichen Behandlungseinheit während der Stillstandszeiten. Nach Durchführung einer Wasserqualitätsmessung mit entsprechenden Keimindikatoren (z. B. ALPRO-Biotest) erfolgt bei der Feststellung eines Keimbefalls die einmalige Grundreinigung der Dentaleinheit über den autorisierten Depot-Techniker, wobei alle Ablagerungen wie Biofilme und Kalk ausgespült werden. Das Dosiergerät „Weekend-System“, das im Folgeschritt an die Dentaleinheit angeschlossen wird und nicht größer als ein Schuhkarton ist, sorgt für die effiziente Entkeimung mit Bilpron.

Becherfüller und Instrumente werden während des Flutungsverfahrens von Bilpron durchlaufen. Es verbleibt über das Wochenende oder während der Urlaubszeit in den Leitungen, wobei es desinfiziert und gleichsam wirkungsvoll reinigt! Vor Arbeitsbeginn wird Bilpron dann aus der Einheit herausgespült. Es gewährleistet der Zahnarztpraxis unter der Woche die für die Behandlungen so wichtige und einwandfreie Trinkwasserqualität selbst während sehr langer Stillstandszeiten, z. B. mehrwöchiger Urlaubszeit!

Bilpron konserviert die wasserführenden Leitungen der Dentaleinheit während den Ruhezeiten, in denen nicht behandelt wird. Von Vorteil ist, dass die Patienten nur Kontakt mit dem üblichen in Trinkwasserqualität gelieferten Wasser haben und nicht mit chemischen Zusätzen.

Die Bilpron-Anwendung schützt Patienten und Behandler durch ein umfassendes Wirkungsspektrum vor kontaminierten Aerosolen (Sprühnebel) und einem gleichfalls umfangreichen Keimspektrum, wie u.a. Legionellen, Pseudomonaden etc.

Analog zum Weekend-System bietet das Unternehmen in Kooperation mit AUSTRODENT die ALPRO-WTA an. Dieses System gleicht der Funktionsweise des Weekend-Systems. Zusätzlich ist das System jedoch mit der sog. „Freien Fallstrecke“ gem. EN 1717 ausgestattet.

Da Bilpron nur außerhalb der Behandlungszeiten eingesetzt wird, wurde von ALPRO auch der wirtschaftliche Aspekt für die Zahnarztpraxis ideal berücksichtigt.

Bilpron ist gem. OECD-Richtlinien umweltverträglich und ist Medizinprodukt nach Klasse II a; CE 0123.

ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH

Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen
Tel.: 0 77 25/93 92-0
Fax: 0 77 25/93 92-19
E-Mail: alpro@alpro-dent.de
www.alpro.dental.com



AMALGAMABSCHIEDUNG UND KOMPRESSOREN

KENNZIFFER 0802

Die IDS 2005 steht vor der Tür. Auf der weltweit größten Plattform für den dentalen Bedarf wird METASYS mit einigen Neuigkeiten in den Bereichen Amalgamabscheidung und Druckluft überraschen. Neben dem bereits zu Beginn des Jahres lancierten zentralen Amalgamabscheider COMPACT A8 wird auf der IDS erstmals auch der weltweit meistverkaufte Amalgamabscheider MST 1



Neuheiten von METASYS auf der IDS 2005.

mit neuen technischen Feinheiten präsentiert. Ein weiteres Highlight ist die Vorstellung der neuen Kompressorenreihe, welche durch moderne Druckluftmotorentechnik überzeugt. Selbstverständlich sind wir zudem mit sämtlichem, bewährtem Dienstleistungsprogramm sowie mit unserer Desinfektions- und Hygienelinie GREEN&CLEAN in Köln vertreten. Besuchen Sie uns auf der IDS, Halle 14.2, Stand R 041. Wir geben Ihnen gerne Einblick in die Welt von METASYS und zeigen Ihnen die vielfältigen Vorteile unserer Produktreihe auf. Solange der Vorrat reicht, belohnen wir Ihren Besuch an unserem Stand zudem mit kleinen Überraschungen.

METASYS MEDIZINTECHNIK GMBH

Ahornstr. 19
85614 Kirchseeon
Tel.: 0 89/61 38 74-0
Fax: 0 89/6 13 58 29
E-Mail: info@metasys.com

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.