

Spray zur Wartung und Reinigung von Airpolishern

Die perfekte Lösung zur Lösung von Pulver

Mehr Kraft, mehr Leistung und mehr Effizienz – und das ohne Unterbrechung. Mit verstopften Airpolisher-Handstücken ist jetzt Schluss, denn das neue ProphySpray von Satelec (Acteon Group) ist das weltweit erste Spray zur präventiven Wartung und gründlichen Säuberung von Pulverstrahlgeräten. Mit nur einem Sprühstoß entfernt es sowohl im Handstück als auch im Schlauch alle Verhärtungen und Pulverreste rückstandslos – für eine konstant hohe Leistung des Wasser/Luft/Pulver-Gemischs ohne kostspielige Wartungen.

Autor: Redaktion

■ **Welcher Zahnarzt kennt das Problem nicht:** Wenn Pulverstrahlgeräte nicht regelmäßig gewartet werden, kann das Handstück oder die Spraydüse durch verklumptes Pulver mit der Zeit verschmutzen. Die Folge: der Airpolisher arbeitet nicht mehr mit voller Kraft und Präzision. Und ist er gar verstopft, muss die Prophylaxebehandlung beendet und das Gerät aufwändig und Zeitraubend gewartet werden. Mit dem neuen Prophy-Spray von Satelec sind solche Unterbrechungen kein Thema mehr.

Maximale Leistung bei minimalem Aufwand

Täglich angewendet beugt das patentierte Reinigungsspray bei allen ProphyPen-Handstücken, die auf die Geräte Prophy MaxII, Air Max II oder direkt auf die Module am Behandlungsstuhl aufgesteckt werden, Leistungsverlust und Geräteausfall sicher und bequem vor – für einen stets gleichmäßigen Durchfluss und mehr Wirtschaftlichkeit in der Praxis.

Dabei gilt: natürliche Sicherheit ohne Nebenwirkungen. Denn auf Grund seiner organischen Zusammensetzung ist ProphySpray biokompatibel und vollständig biologisch abbaubar. So birgt es keinerlei Risiken für Patient, Behandler oder Airpolisher. Und auch das Handling überzeugt: Das ProphyPen-Handstück wird einfach auf den Aufsatz des Sprays gesetzt und eine Sekunde lang mit der speziellen Reinigungslösung durchgesprüht. Hierbei werden das Handstück sowie die Düsen von allen Pulverrückständen gereinigt – gründlich, schnell und effizient. Durch einen speziellen Adapter können bei eingeschaltetem Gerät selbst bereits verklumpte Schläuche von den Pulverresten befreit werden.

Das ProphySpray von Satelec zur präventiven Wartung von Airpolishern und zur Lösung von hartnäckigen Verunreinigungen ist in einer Flasche mit 250 Milliliter Inhalt erhältlich. Bei zwei Sprühstößen am Tag reicht diese Menge mindestens ein halbes Jahr. <<



Mit dem Prophy-Spray von Satelec gibt es keine Verstopfungen von Airpolishern mehr.



KONTAKT

Acteon Germany GmbH
Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 0 21 04/95 65-10
Fax: 0 21 04/ 95 65-11
E-Mail: info@de.acteongroup.com
www.de.acteongroup.com
Hotline: 08 00/7 28 35 32