

P PERFECT BLEACH

KENNZIFFER 0881

Kreativ in der Forschung: Effektiv, dauerhaft und schonend – mit Perfect Bleach bietet VOCO ein Bleichgel, das allen Anforderungen an eine zeitgemäße Zahnaufhellung gerecht wird. Die Aufhellung vitaler Zähne, die durch Alterung, Mineralisationsstörungen oder Einlagerung von Farbstoffen verfärbt sind (z. B. durch Kaffee-, Tee-, Rotwein- oder Nikotingenuss), lässt sich ebenso schnell und effektiv erreichen wie das simultane externe und interne Bleichen endodontisch behandelter und verfärbter Zähne. Die Behandlung fluorotischer Flecken oder von Tetracyclinverfärbungen ist ebenfalls möglich.

Schnell und einfach weiße Zähne: Die Handhabung des modernen Aufhellungs-



Perfect Bleach – effektiv, dauerhaft und schonend.

systems ist denkbar unkompliziert und anwenderfreundlich: Der Patient füllt das hochviskose Bleichgel einfach in die vom Zahnarzt individuell angefertigten Bleichschiene und trägt diese entsprechend der Anweisung (z. B. für zwei Stunden) auf den Zähnen. Bereits nach wenigen Tagen ist ein deutlicher Aufhellungserfolg erkennbar.

In zwei Wirkstoffkonzentrationen: Perfect Bleach ist mit 10%iger und 17%iger Carbamidperoxid-Konzentration erhältlich. Es sorgt für eine gründliche Oxidation

der eingelagerten Farbstoffe, ohne dabei Zahnschubstanz oder vorhandene Restaurationen anzugreifen. Das 17%ige Bleichgel enthält zusätzlich Kalium und Fluorid zur Vorbeugung gegen eventuell auftretende Hypersensibilität. VOCO Perfect Bleach hat einen angenehmen Geschmack. Die Anwendung ist nach Instruktion und bei regelmäßiger Überwachung durch den Zahnarzt unbedenklich.

Komplettsatz mit Zusatznutzen: Zusätzlich zu den 6 x 2,4 ml Spritzen mit Bleichgel und der Aufbewahrungsdose für die Bleichschiene beinhaltet das Perfect Bleach Set eine Farbskala zum Nachvollziehen des Behandlungserfolgs für den Patienten. Verpackt in einer attraktiven Tasche bietet das Set für den Patienten einen Zusatznutzen über die Behandlung hinaus. Dem Zahnarzt stehen neben einer 1,2 ml Spritze Block Out Gel LC zwei Tiefziehfolien zum Herstellen der Bleichschiene zur Verfügung. Für eine dem Bleichen vorangehende professionelle Zahnreinigung ist zusätzlich die Zahnreinigungspaste Klint beigefügt.

VOCO GMBH

Postfach 7 67
27457 Cuxhaven
Tel.: 0 47 21/7 19-0
Fax: 0 47 21/7 19-1 69
E-Mail: info@voco.de
www.voco.de

P BUTLER® WHITENING PATIENTENINFORMATION & POSTER

KENNZIFFER 0882

Zu den auf der diesjährigen IDS eingeführten Butler® Whitening Zahnaufhellungssystemen bietet SUNSTAR BUTLER jetzt Verkaufshilfen für die Zahnarztpraxis an, um das Interesse an Bleaching bei den Patienten zu wecken.

Als Blickfang gibt es Poster, welche die interessierten Patienten auffordern, sich in der Praxis individuell über Zahnaufhellung beraten zu lassen. Die Poster besitzen drei verschiedene Formate (DINA 2, DINA 3 und DINA 4), die – je nach vorhandenem Platz – im Wartezimmer aufgehängt oder an sonstiger prominenter Stelle, z. B. auf dem Empfangstresen platziert werden können.

Eine achtseitige Patienteninformation unterstützt das Beratungsgespräch und kann auch in der Praxis ausgelegt werden. Alle Fragen rund um das Thema Bleaching werden in patientengerechter Weise beantwortet. Die verschiedenen Methoden (In-Office- oder Home-Bleaching) werden anschaulich erklärt.

Die Butler® Whitening Zahnaufhellungssysteme umfassen:

- Butler® Whitening Pro: In-Office-System mit 35% Wasserstoffperoxid für die Anwendung in der Praxis. Der Inhalt einer Packung reicht für drei Patienten.
- Butler® Whitening Day: Home-Bleaching-System



Die achtseitige Patienteninformation unterstützt das Beratungsgespräch und kann auch in der Praxis ausgelegt werden.

mit 7,5 % Wasserstoffperoxid für die häusliche Anwendung in einer Schiene tagsüber.

- Butler® Whitening Night: Home-Bleaching-System mit 16% Carbamidperoxid für die häusliche Anwendung in einer Schiene über Nacht.

Der SUNSTAR BUTLER Außendienst steht interessierten Zahnarztpraxen gerne für alle Fragen zum Thema Bleaching zur Verfügung. Die neuen Butler® Whitening Patienteninformationen und Poster erhalten Zahnarztpraxen über den SUNSTAR BUTLER Außendienst oder bei der JOHN O. BUTLER GmbH.

JOHN O. BUTLER GMBH

Beyerbachstr. 1
65830 Kriftel
Tel.: 0 61 92/9 51 08 55
Fax: 0 61 92/9 51 08 44
E-Mail: service@jbutler.de
www.jbutler.com

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.