Dominoeffekt – Die Kunst der natürlichen Verjüngung

Basierend auf der Arbeit von renommierten Anatomen und Ästhetikern präsentiert FILLMED einen einzigartigen Ansatz, der sich unter anderem auf das Sagging des Gesichts konzentriert, um die Zeichen der Zeit zu korrigieren und den Dominoeffekt des Alterns umzukehren. Dieser umgekehrte Dominoeffekt basiert auf einem Prinzip: Die primäre Behandlung spezifischer Gesichtspartien hat einen positiven Sekundäreffekt auf die umliegenden Partien und wirkt sich somit positiv auf das gesamte Gesicht aus.

Eine progressive Behandlung: von oben nach unten

Basierend auf dem Verständnis der Anatomie (faziale Biomechanik) und der Alterung der einzelnen Gesichtsschichten erzeugt dieses Protokoll einen Dominoeffekt.

Schritt 1: Behandlung der Schläfe

Die Behandlung des Patienten beginnt am oberen Rand des Gesichts (wie beim Dominostein), einem besonders strategischen Bereich: der Schläfe.

Mit ein bis zwei Injektionspunkten wird die temporale Injektion den Liftingeffekt für den Rest des Gesichts einleiten. Der positive Kollateraleffekt wirkt sich sofort auf die umliegenden Bereiche wie Wangenknochen, Augenbrauenansatz und sogar die Unterkieferlinie aus.

Schritt 2: Behandlung der Wangen

Der zweite zu injizierende Bereich ist der Wangenknochen. Auch hier sind zwei bis drei Injektionspunkte erforderlich. Ein lateraler Punkt, der einen positiven Nebeneffekt hat: Anhebung der Nasolabialfalten und der Marionettenfalten. Und, falls erforderlich – je nach Patient, ein medialer Punkt, um dem Bereich mehr Projektion zu verleihen.

Schritt 3: Behandlung der Kieferlinie

Der letzte Zielbereich der ART FILLER® VOLUME Injektion befindet sich im Bereich des Unterkiefers. Die Abgabe von Hyaluronsäure in diesem Areal hilft, die Kieferlinie zu modellieren und den unteren Teil des Gesichts in einer V-Form zu definieren.

Diese drei Injektionsbereiche sind nicht zufällig gewählt. Die positive Wirkung auf die umliegenden Bereiche ermöglicht es dem Arzt, eine minimale Menge des Produkts zu injizieren, um eine maximale Wirkung in den nicht injizierten Bereichen zu erzielen. Durch die Arbeit an diesen drei präzisen – eher lateralen – Bereichen wird das gesamte Gesicht behandelt, um Harmonie und Verjüngung herzustellen und ein überbehandeltes, zu voluminöses Mittelgesicht zu vermeiden.

Laterale Injektion zum Anheben

Die seitlichen Bereiche des Gesichts sind unbewegliche Zonen. Sie sind daher strategisch sehr stabil und ideal für Injektionen, die einen Liftingeffekt haben.

Im Gegensatz dazu werden die medialen oder zentralen Bereiche des Gesichts durch die Mimikmuskeln bewegt. Sie sind viel dynamischer und werden injiziert, um einen volumisierenden Effekt (Projektion) zu erzielen.

Das Konzept des Dominoeffekts kann auf mehrere Sitzungen aufgeteilt und nach Bedarf natürlich mit den anderen Protokollen von FILLMED kombiniert werden, um beispielsweise mittels Biorevitalisierung zusätzlich einen positiven Effekt auf die Hautqualität, Tonizität, Spannkraft und Elastizität zu erzielen.

Das richtige Produkt: ART FILLER® VOLUME

- injizierbarer Hyaluronsäure-Gel-Filler
- einzigartige Textur, die sowohl straffend als auch volumisierend wirkt, ideal für den Dominoeffekt
- lang anhaltende Wirkung:1

Schläfen: 79 Prozent der Patienten sind nach zwölf Monaten und 62 Prozent nach 18 Monaten immer noch korrigiert.

Wangenknochen: 55 Prozent der Patienten haben nach 18 Monaten immer noch eine Verbesserung. Kieferpartie: 61 Prozent der Patienten sehen nach zwölf Monaten und 53 Prozent nach 18 Monaten immer noch eine Verbesserung.

Für mehr Informationen registrieren Sie sich kostenfrei auf www.fillmed.com für die FILLMED E-ACADEMY oder wenden Sie sich an NOVVIA ESTHETIC – offizieller FILLMED Partner in Deutschland und Österreich.



Quelle

1 AF3 18 Monate Langzeit-Vergleichsstudie, multizentrisch in fünf Zentren in Frankreich, 2019–2021, 98 Probanden, Durchschnittsalter 54,7 Jahre. Injektion von ART FILLER® VOLUME an den Schläfen (33 Probanden). Injektion von ART FILLER® VOLUME an der Kieferlinie (72 Probanden). Injektion von ART FILLER® VOLUME im Mittelgesicht (56 Probanden).

NOVVIA ESTHETIC Tel.: +49 8161 969940 www.novvia.de

