



# Körpereigene Prozesse gezielt anregen

Mit CRISTAL Shape® gegen Cellulite und schlaffe Haut – das ist die Mission von ICE AESTHETIC, um Menschen mit Orangenhaut zu einem verbesserten Wohlbefinden zu verhelfen. Die Weiterentwicklung der innovativen DIAMOND Technologie überzeugt in der neuen Behandlung durch CRISTAL Shape® mit hoher Leistungskraft und effizienten Ergebnissen.

Sabrina Kirsten

**V**on Orangenhaut sind 80 bis 90 Prozent der erwachsenen Frauen betroffen. Zwar können auch Männer die unschönen Dellen einer Cellulite aufweisen, doch da vor allem das weibliche Sexualhormon Östrogen einen hohen Einfluss auf die Entwicklung von Cellulite nimmt, indem es das Gewebe weicher werden lässt und seine Struktur in der Festigkeit beeinträchtigt, sind Frauen deutlich häufiger betroffen. Die medizinisch als Cellulite bezeichnete Hautveränderung ist keine Erkrankung, aber für viele Betroffene ein optisches Problem. Das Wohlbefinden leidet unter der Optik und dem Hautgefühl in den von der Orangenhaut betroffenen Arealen, das durch die natürlichen Alterungsprozesse der Haut, beispielsweise dem Rückgang der Kollagenproduktion, aber auch durch äußere Einflüsse, wie den Konsum von Alkohol und Nikotin, beeinflusst wird.

Mit der richtigen Behandlung lassen sich die Anzeichen von Cellulite und schlaff gewordene Haut gezielt behandeln. Hierfür muss die körpereigene Produktion von Elastin und Kollagen reaktiviert werden, die ohne entsprechende Anregung schon im Alter von Mitte 20 abnimmt und mit ca. 40 Jahren vollständig eingestellt wird. Mit CRISTAL Shape® gelang dem renommierten Medizinproduktehersteller Deleo aus Frankreich eine nachhaltige Verbesserung der bereits bewährten DIAMOND Technologie, die in Deutschland von ICE AESTHETIC® und einem breit gefächerten Netzwerk medizinischer Spezialisten angewandt wird.

## Behandlung von Cellulite und schlaffer Haut durch Reaktivierung der Faserproduktion

Schon seit einigen Jahren bieten Spezialisten wie ICE AESTHETIC® mit hochwertiger Medizintechnik Behandlungen an, welche die Kollagenproduktion erhöhen und somit die Anzeichen der Hautalterung ebenso wie Cellulite nichtinvasiv reduzieren. Die bewährte DIAMOND Technologie setzte dabei neue Maßstäbe. Sie nutzt die Kombination mehrerer Technologien, um synergetisch auf Cellulite und die Hautstruktur allgemein einzuwirken. Die Behandlung wird über einen Applikator mit dem Kryolipolysegerät CRISTAL Pro® umgesetzt, um mittels Vakuum und spezifisch abgestimmter Infrarotstrahlung eine Neubildung von Kollagen und Elastin anzuregen.

Nun wurde diese Technologie vom Hersteller Deleo® in einem neuen Gerät optimiert. Das innovative CRISTAL Shape® greift die zielführende Wirkung auf die Hautstruktur auf und sorgt mit erhöhter Leistungskraft im Vakuum und einer verbesserten Differenzierung der Wellenlänge für optimale Behandlungsergebnisse, welche die Ergebnisse der DIAMOND Technologie noch übersteigen.

In der Behandlung wird eine perfekt abgestimmte Infrarotstrahlung mit Dioden so ausgerichtet, dass sie tief in die Haut eindringt und subkutane Fettzellen erwärmt. Dies ruft im Gewebe eine unmittelbare Kollagenkontrak-

tion hervor, welche die physiologische Reaktion der Dermis aktiviert und somit eine Neubildung von Elastin- und Kollagenfasern (Neokollagenose) fördert. Gleichzeitig sorgt die modulare Ansaugung über ein Vakuum im Applikator für die Stimulation verhärteter Fibroblasten, deren Struktur gelockert wird, um die Elastizität zu erhöhen. Auf die Zellen entsteht der Effekt einer Lymphdrainage, die sowohl die Ausschüttung überschüssiger Flüssigkeit aus dem Gewebe anregt als auch einen Dehnungseffekt auf die Septen ausübt. In der Folge werden die neu gebildeten Fasern in das Gewebe eingebaut. Das Gewebe wird straffer, zugleich geschmeidiger und in seiner Struktur gleichmäßiger, wodurch auch die Optik der Hautoberfläche profitiert.

### CRISTAL Shape® für die nichtinvasive Behandlung

Cellulite zeigt sich vornehmlich an den Hüften, den Beinen, am Bauch und am Po. Die CRISTAL Shape® Behandlung erfolgt daher bevorzugt an diesen Stellen, kann jedoch auch an den Knien oder den Armen zum Einsatz kommen.

Das komfortable Gerät wird dabei in Position gebracht und mittels an das Körperareal angepassten Applikatoren durch die Führung über die Haut behandelt. Ein Vakuum erzeugt den Effekt der Lymphdrainage, saugt das zu behandelnde Gewebe ein und erlaubt somit die zielgenaue Infrarotlichtbehandlung im gewünschten Sektor. Der Organismus reagiert auf diese Behandlung mit der gewünschten Bildung neuer Bindegewebsfasern, während die Zellen überschüssige Flüssigkeit abgeben, welche über das Lymphsystem abtransportiert wird. Der Effekt im Gewebe wird dabei nur gestartet, vom Organismus im Anschluss an die Behandlung jedoch noch weiter geführt.

Die Kombination aus Neokollagenose und die Entlastung des Gewebes sorgen für eine Glättung und Straffung der tief liegenden Gewebeschichten. Mehrere Behandlungen im Abstand von einigen Tagen erlauben somit einen gesteigerten Anschlag der körpereigenen Faserproduktion, die sich im Langzeiteffekt auch auf der Hautoberfläche durch deutlich reduzierte Cellulite-Anzeichen zeigt. Die Glättung im Gewebe prägt auch die Optik der Hautoberfläche: Nach der erfolgreichen Behandlung mit CRISTAL Shape® liegt die Hautoberfläche entsprechend der Glättung im Untergewebe sichtlich ebener und mit spürbar reduzierter Dellenbildung vor. Die Hautstraffung im Gewebe mindert dabei auch vorliegende Dehnungsstreifen im begrenzten Maß.

Die CRISTAL Shape® Behandlung erfolgt ausschließlich von außen, weshalb sie zu den nichtinvasiven Behandlungen der Ästhetischen Medizin für das 360°-Bodyforming zählt. Ohne den Bedarf an schmerzlindernden Medikamenten wie Lokalanästhetika sowie Eingriffen in den Körper ist die Behandlung frei von Ausfallzeiten und Narbenbildung. Leichte Nebenwirkungen wie Hautrötungen oder Blutergüsse sind möglich, jedoch in der Regel innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder verschwunden. Direkt im Anschluss an die Behandlung können Patienten der Arbeit, dem Sport und anderen Aktivitäten nachgehen. Somit lassen sich Behandlungssitzungen mit der innovativen CRISTAL Shape® Technologie unkompliziert in den aktiven Alltag einbinden.

Weiter Informationen finden Sie auf der Website von ICE AESTHETIC.

ICE AESTHETIC GmbH  
Tel.: +49 30 88692158  
[www.ice-aesthetic.com](http://www.ice-aesthetic.com)

Hintergrund: © Pacha M Vector/Shutterstock.com

