

Mein Material der Wahl:



PANAVIA™ SA Cement Universal

Ein Beitrag von Minka Mordas

TESTIMONIAL /// Ein selbstadhäsives Befestigungskomposit, welches MDP- und LCSi-Monomere enthält, wodurch es auf praktisch jedem Restaurationswerkstoff haften kann, ohne dass die separate Anwendung eines Primers erforderlich ist – genau darüber spricht Anwender Dr. Michael Teitelbaum im Testimonial.

Bereit, sich von komplizierten Befestigungsverfahren zu verabschieden: Dr. Michael Teitelbaum begrüßt die Einfachheit, mit der sich PANAVIA™ SA Cement Universal – eine vielseitige Befestigungslösung – von komplizierten Bonding-Prozessen verabschiedet, ohne den langfristig stabilen Haftverbund zu beeinträchtigen. „PANAVIA™ ist ein Name, den ich seit meiner Tätigkeit in der zahnärztlichen Prothetik kenne und dem ich vertraue“, so Dr. Teitelbaum. Er sagt, dass PANAVIA™ SA Cement Universal es ihm aufgrund der langfristigen Zuverlässigkeit ermögliche, Restaurationen sicher im Mund zu befestigen.

All-in-one-Befestigungssystem

PANAVIA™ SA Cement Universal ist ein selbstadhäsives Befestigungsmaterial, welches das separate Anwenden eines Primers überflüssig macht. Das Material enthält zusätzlich zu MDP-Monomer das einzigartige LCSi-Monomer. Dies liefert eine starke, dauerhafte chemische Bindung zu Keramiken, Lithiumdisilikat und Kompositen, während das MDP-Monomer chemisch mit Zirkonoxid, Dentin und Schmelz reagiert. „Wenn ich Restaurationen aus Zirkonoxid im Mund befestige, ist mein Material der Wahl PANAVIA™ SA Cement Universal, weil es

PANAVIA™ SA Cement Universal, mit LCSi-Monomer ein Vorreiter, haftet ohne separaten Primer an nahezu allen Materialien, auch Glaskeramik. Das Befestigungskomposit enthält einen einzigartigen Silanhaftvermittler – das LCSi-Monomer – und bietet somit eine starke und dauerhafte chemische Haftung an allen Keramiken (inklusive Lithiumdisilikat- und Hybridkeramik) und Komposit. PANAVIA™ SA Cement Universal ist in einer Automixspritze erhältlich und leicht zu applizieren – ohne separaten Dispenser.



MDP enthält, den „magischen“ Inhaltsstoff, der tatsächlich an Zirkonoxid bindet“, erklärt Dr. Teitelbaum. Dank einer Ein-Schritt-Bonding-Formel ist PANAVIA™ SA Cement Universal eine benutzerfreundliche All-in-one-Lösung. „Einer der großen Vorzüge von PANAVIA™ SA Cement Universal ist, dass Sie, wenn Sie es eilig haben – vielleicht mehrere Einheiten befestigen müssen oder ohne Assistenz arbeiten –, die automatisch mischende Spritzenspitze (Automix) verwenden können.“

Vielseitig und einfach zu bedienen

PANAVIA™ SA Cement Universal haftet auf praktisch allen Restaurationen, ohne die Notwendigkeit eines separaten Primers, Silans oder Ätzmittels. Dies vereinfacht das Befestigungsverfahren und spart den Patienten Zeit.

„Ich habe einen Patienten, der nicht nur würgt, sondern auch überdurchschnittlich viel Speichel produziert. So war es fast unmöglich (mit anderen Befestigungsmaterialien), den Zahn lange genug trocken zu halten, um sandstrahlen, ätzen, grundieren, Material mischen und applizieren sowie die Krone einsetzen zu können. PANAVIA™ SA Cement Universal war das einzige Material, welches mir dies zuverlässig ermöglicht hat.“

Nach dem Einsetzen der Restauration lässt sich überschüssiger Zement nach einer schnellen 2- bis 5-sekündigen Lichthärtung

leicht entfernen. „Sobald Sie die Krone eingesetzt haben, können Sie das Polymerisationslicht einige Sekunden lang über die Ränder schwenken, um den Vorgang einfach zu starten. Das überschüssige Material springt leicht ab, während es sich noch in der gummiartigen Phase befindet“, bestätigt Dr. Teitelbaum.

PANAVIA™ SA Cement Universal ist in drei Farbtönen erhältlich: universal (A2), transluzent und weiß, die, laut dem amerikanischen Zahnarzt, für die meisten Situationen geeignet sind. „Für transluzente Restaurationen, wie Inlays, bei denen die Ränder sichtbar sein könnten, bevorzuge ich ein transluzentes Universalkomposit. In anderen Situationen, wie bei einer opaken Restauration oder einem Stift, bevorzuge ich reines Weiß als Farbton für das Befestigungsmaterial.“ PANAVIA™ SA Cement Universal eignet sich für Kronen, Brücken, Inlays/Onlays, Stifte sowie Adhäsionsbrücken und ist vielseitig einsetzbar: eine Befestigungslösung für nahezu jedes Material.


Weitere Informationen zum Produkt unter:

www.kuraraynoritake.eu



Kuraray Noritake Deutschland – Infos zum Unternehmen

ANZEIGE

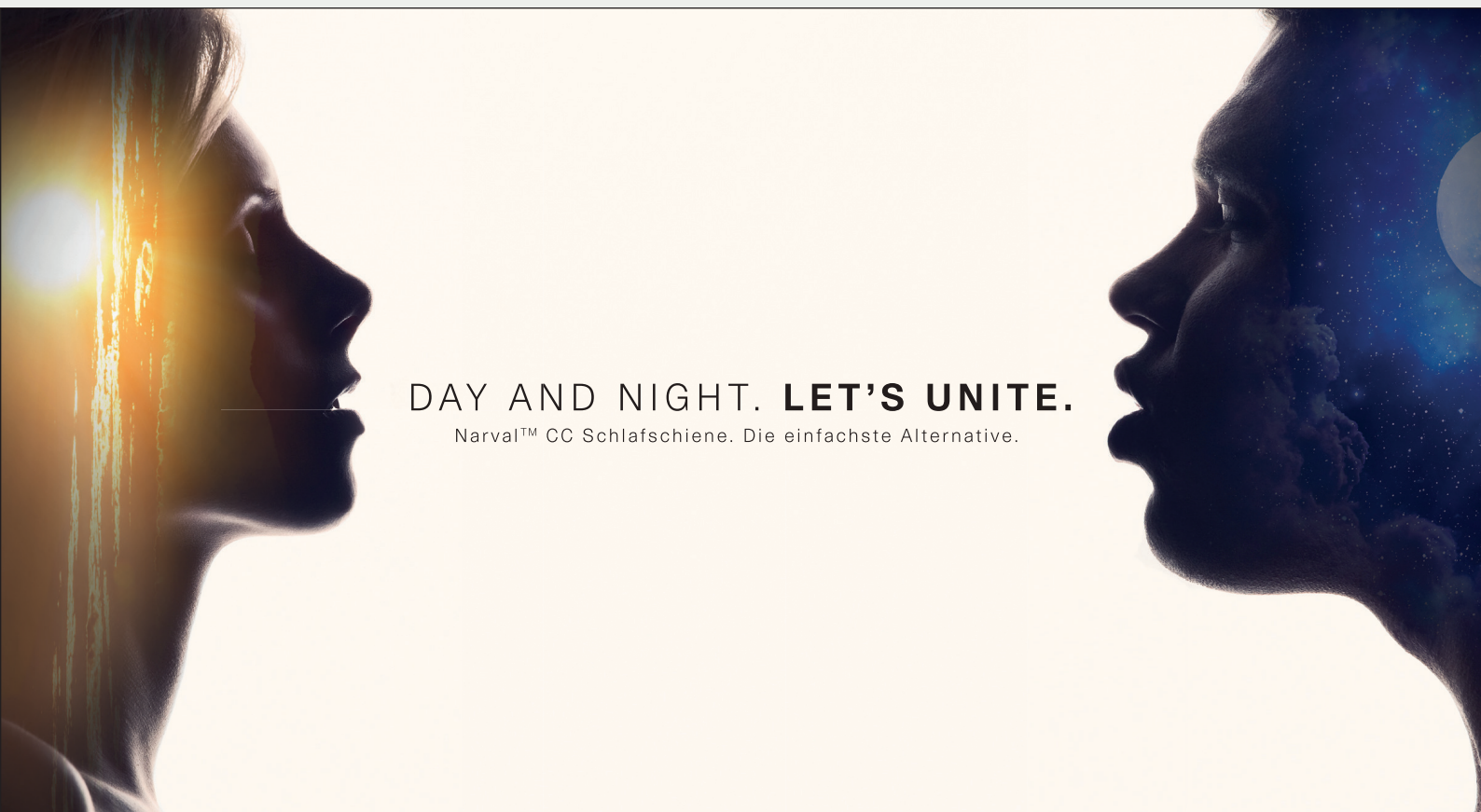

DAY AND NIGHT. **LET'S UNITE.**

Narval™ CC Schlafschiene. Die einfachste Alternative.



Jetzt entdecken
resmed.com/narval-schlafschiene


ResMed