

Professionelle Zahnaufhellung

So individuell wie der Patient

Die Opalescence™ Zahnaufhellungsprodukte genießen das Vertrauen der Anwender. Dank intensiver Forschungsarbeit steht die Gesundheit der Patienten dabei immer im Fokus.

Christin Hiller



Prophylaxe Journal 3/23

Seit mehr als 45 Jahren setzt Ultradent Products Standards in der professionellen Zahnaufhellung: Mit dem Opalescence System hat sich das Unternehmen zum weltweiten Marktführer in diesem Bereich entwickelt. Mehr als 50 Branchenpreise für die Opalescence Produktfamilie und rund 100 Millionen aufgehellte Lächeln sprechen für sich. Das Opalescence System bietet zahlreiche bewährte Lösungen für alle Indikationen zur kosmetischen wie medizinischen Zahnaufhellung. Ein Beispiel für die kosmetische Zahnaufhellung ist Opalescence PF (10% und 16% Carbamidperoxid) zur häuslichen Anwendung mit individuellen Tiefziehschienen. Noch bequemer und komfortabler ist die kosmetische Zahnaufhellung mit Opalescence Go™. Das Gel enthält 6% Wasserstoffperoxid und ist dank vorgefüllter Einwegschienen sofort und flexibel einsatzbereit. Die PF-Formel der Opalescence Produkte mit Kaliumnitrat und Fluorid reduziert Empfindlichkeiten und stärkt den Zahnschmelz. Der hohe Wasseranteil der Opalescence Gele verhindert die Dehydrierung der Zähne und garantiert gleichzeitig eine höhere Farbstabilität.

Die perfekte Ergänzung zu beiden Zahnaufhellungsprodukten ist die dazugehörige Whitening Zahncreme. Diese entfernt oberflächliche Verfärbungen sanft und erhält ein gesundes Lächeln. In Kombination mit anderen Opalescence Zahnaufhellungsprodukten können somit optimale Ergebnisse erzielt werden – auch im Bereich der Patientencompliance. Denn das positive Gefühl der neuen Zahnfarbe wird dank der Zahncreme auch im heimischen Badezimmer verankert.

Mehr Infos zur Opalescence™ Produktfamilie finden sie über die abgebildeten QR-Codes.

Opalescence™
Masterclass



Ultradent
Products



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Wissenschaftlich fundiert

Sieben interessante Fragen und Antworten zur Zahnaufhellung für Ihre Patientenkommunikation finden Sie im Folgenden:

Kann ich meine Zähne im Schlaf aufhellen?

Mit einer individuellen Schiene können Sie Ihre Zähne auch im Schlaf aufhellen! Eine Universitätsstudie belegt, dass Opalescence™ 10% Zahnaufhellungsgel bei der Aufhellung über Nacht acht bis zehn Stunden lang aktiv ist.¹

Kann ich meine Zähne auch bei einer festsitzenden Zahnspange aufhellen?

Ja! Wenn Sie eine festsitzende Zahnspange tragen, können Sie Ihre Zähne mit Opalescence Go™ Trays aufhellen. Diese sind mit Zahnaufhellungsgel vorgefüllt und passen auch über Drähte und Brackets.² Da das Peroxid in den Zahn eindringt und sich dort ausbreitet, wird auch der Teil des Zahns aufgehellt, der von der Zahnspange bedeckt ist.

Helfen UV- oder LED-Lampen bei der Zahnaufhellung?

Wiederholt haben Studien gezeigt, dass UV- bzw. LED-Licht nicht zur Effizienzsteigerung von Zahnaufhellungen beiträgt.³ Einige Untersuchungen haben sogar ergeben, dass die Verwendung von Licht bei der Zahnaufhellung schädlich für Lippen und Zahnfleisch sein kann.⁴ Außerdem sind Farbrückfälle in diesem Rahmen verbreitet.

Wie lange halten meine Ergebnisse?

Das hängt von mehreren Faktoren ab. Von der Biologie bis hin zur Ernährung kann sich alles darauf auswirken, wie lange die Zähne weiß bleiben. Im Vergleich zu anderen Zahnaufhellungsprodukten trägt Opalescence jedoch effektiv zur Vorbeugung einer erneuten Verfärbung bei.⁵ Außerdem kann eine gute Aufhellungszahncreme (wie Opalescence™ Zahncreme) die Zeitspanne zwischen den Aufhellungsbehandlungen verlängern.

Ist die Zahnaufhellung unangenehm und schadet sie meinen Zähnen oder meinem Zahnfleisch?

Dank seiner klebrig viskösen Formulierung läuft das Opalescence Zahnaufhellungsgel nicht aus der Schiene, wie andere Aufhellungswirkstoffe.⁶ Es ist sehr wichtig, das Gel nicht zu stark im Mund zu bewegen. Haftet es am Zahnfleisch, kann es Reizungen oder Schmerzen verursachen. Um Beschwerden zu vermeiden, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur korrekten Anwendung der vorgefüllten Schienen bzw. Spritzengele. Verwenden Sie vor und während der Zahnaufhellung die Opalescence Aufhellungszahncreme für empfindliche Zähne, um etwaige Irritationen zu lindern.

Ist eine Zahnaufhellung teuer?

Die Kosten für eine Zahnaufhellung können stark variieren. Sie sind abhängig vom gewählten Produkt und von der Bezugsquelle. Frei verkäufliche Zahnaufhellungsprodukte sind zwar am preiswertesten, aber unter Umständen nicht am wirksamsten, weil sie nicht auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Außerdem können sie das Risiko von Empfindlichkeiten erhöhen. Einige zahnärztlich durchgeführte Aufhellungsbehandlungen können kostenintensiver sein, da teure Zahnaufhellungslampen oder Laser verwendet werden. Im Allgemeinen bringen solche Geräte jedoch keinen Zusatznutzen. Die Zahnaufhellung mit Opalescence gestaltet sich diesbezüglich ideal: sie bietet die Vorteile einer zahnärztlich betreuten Behandlung aber ganz ohne teure Gerätschaften. Sprechen Sie mit Ihrer Zahnarztpraxis über die Kosten und die für Sie individuell am besten geeignete Lösung.

Welche der am Markt erhältlichen Zahnaufhellungsprodukte sind wirksam aber auch sicher?

Die Opalescence™ Zahnaufhellungsprodukte wurden mehr als jede andere Marke weltweit untersucht. Auf Basis der Studienergebnisse können Sie eine sichere und zuverlässige Zahnaufhellungsbehandlung empfehlen. Bereiten Sie sich und Ihr Praxisteam mit den richtigen Antworten vor, um Ihre Patienten bestmöglich beraten zu können. Es geht um Fakten, die direkt von Forschungsexperten stammen.

kontakt.

Ultradent Products GmbH

Am Westhover Berg 30

51149 Köln

Tel.: +49 2203 3592-15

infoDE@ultradent.com

www.ultradentproducts.com

www.opalescence.de

Literatur



7 Fragen und Antworten

