



# Mit EnGO durch die Endo!

## 1. Funktionen

**Warum darf das neue Komet-Handstück EnGO als Multitalent für die Endodontie bezeichnet werden?**

Das Komet-Handstück EnGO eignet sich sowohl für die reziprokierende als auch rotierende Arbeitsweise. Es bietet individuelle Einstellungsmöglichkeiten zu Drehzahl, Torque und Winkel. Die integrierte Speicherfunktion bietet Platz für bis zu zehn unterschiedliche Bewegungsmodi. Die Spezifikationen für die meistgenutzten Feilen in der Praxis können also im Gerät gespeichert werden. Es sind fünf Speicherplätze für vorinstallierte Komet-Systeme verfügbar. Ein Modus ist für die elektronische Längenmessung bestimmt, die Speicherplätze M 1–9 sind frei programmierbar. Die Reziprokbewegung ist modifizierbar, das heißt, die Drehwinkel können im 10-Grad-Intervall für jede handelsübliche Feile individuell eingestellt werden. Grundsätzlich sind die Parameter aller Komet-Feilensysteme bereits vorinstalliert. Das ermöglicht den Schnellstart direkt ab der ersten Behandlung.

## 2. Ergonomie

**Wie das Wort „Handstück“ es schon impliziert: Es muss geschmeidig in der Hand liegen und leichtes Arbeiten ermöglichen. Welche Aspekte für Ergonomie bietet EnGO?**

EnGO eignet sich für Rechts- wie auch Linkshänder. Das integrierte LCD-Display lässt sich nach persönlichen Bedürfnissen einstellen. EnGO liegt unter anderem aufgrund seiner ausgeglichenen Gewichtsverteilung perfekt in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsarmes Arbeiten. Durch die ergonomische Form und den geschmeidigen Lauf bringt es maximale Kontrolle in die Behandlung. Dank seines um 360 Grad drehbaren Winkelstücks erlaubt EnGO einen optimalen Zugang zum Behandlungsort. Dabei ist optimale Sicht das A und O: Während der Behandlung ermöglicht der schlanke Winkelstückkopf ein besonders großes Sichtfeld auf die Behandlungsfläche. EnGO arbeitet übrigens kabellos und bietet damit beim Arbeiten bzw. Aufladen maximale Flexibilität.

### Flexibel, sicher und

**leistungsstark:** EnGO überzeugte die Besucher auf der IDS am Messestand von Komet Dental.

## 3. Apexlocator

**Wie kann sich der Behandler sicher sein, dass die Feile dem originären Wurzelkanal folgt und vor allem nicht über den Apex hinausarbeitet?**

EnGO besitzt einen integrierten Apexlocator, was die Behandlung noch sicherer macht: Die automatische Längenbestimmung zeigt in Echtzeit an, wie weit die Feile bis zum Apex vorgedrungen ist. Der Zahnarzt hat also die aktuelle Feilenposition jederzeit unter Kontrolle. So wird das Risiko einer Überpräparation minimiert. Bei eingestecktem Apexkabel startet EnGO auf Wunsch automatisch, sobald die Feile in den Kanal eingeführt wird, und stoppt, sobald sie aus dem Kanal entfernt wird.

## 4. Weitere Features

**Mit welchen interessanten Eigenschaften ist EnGO außerdem ausgestattet?**

EnGO arbeitet mit einem borstenlosen Motor. Das reduziert die Reibung und macht das Handstück ausgesprochen langlebig. Gleichzeitig läuft es dadurch vibrationsarm und leise, was für mehr Patientenkomfort sorgt. Und wenn die Behandlung einmal länger dauert, besteht kein Grund zur Sorge: EnGO überzeugt dank seines leistungsstarken Akkus mit gleichbleibender Stärke.

Infos zum Unternehmen



# „Liebe Kollegen & Kolleginnen! Wisst Ihr, was ich heute gehört habe?“

**Dr. Martina Pionier:** 12:05  
Ich habe gehört, dass Du auch mit dent.apart zusammen arbeitest?

**Dr. Martina Pionier:** 12:05  
Warum?

**Dr. Jan Neugierig:** 12:06  
Ja! Das tue ich! 😊 Immer häufiger fragen meine Patienten, ob sie den Rechnungsbetrag für die anstehende Behandlung in Raten zahlen können.

**Dr. Martina Pionier:** 12:07  
Ja das kenne ich! Für manche Patienten ist das ein echtes Kaufhindernis, insbesondere wenn ich hochwertige Lösungen vorschlage.

**Dr. Jan Neugierig:** 12:08  
Siehst Du! Und genau da kommt dent.apart ins Spiel! Denn durch den dent.apart-Zahnkredit entsteht diese Einstiegshürde gar nicht erst!

**Dr. Jan Neugierig:** 12:09  
Der Patient schließt den dent.apart-Zahnkredit einfach online ab. Und der Kreditbetrag für die Gesamtbehandlung wird sofort auf mein Praxiskonto überwiesen. Erst danach beginnt die Behandlung!

**Dr. Martina Pionier:** 12:11  
Echt? Das kann ich gar nicht glauben! 😲

**Dr. Martina Pionier:** 12:11  
Hat bei Dir ein Patient schon mal die gesamte Behandlung mit dent.apart im Voraus bezahlt?

**Dr. Jan Neugierig:** 12:12  
Ja klar, schon einige! 😊😊

**Dr. Jan Neugierig:** 12:12  
Das Beste daran ist, dass sowohl alle Mat.&Lab.-Kosten als auch das Gesamthonorar bereits **im Voraus** komplett bezahlt sind! Es kann also kein Risiko mehr entstehen, dass ein Patient später mal nicht zahlt! **Keine Factoringgebühren** mehr und **kein Mahnwesen!** 😊

**Dr. Martina Pionier:** 12:14  
So habe ich das noch nie gesehen!!! 💡💡💡  
Ich möchte dent.apart auch meinen Patienten empfehlen!  
Wie geht das? 😊

**Dr. Jan Neugierig:** 12:15  
Einfach das Starterpaket bestellen! Du bekommst die Info-Materialien sofort zugeschickt! 📄

**Dr. Martina Pionier:** 12:16  
Das ist ja einfach! 😊

scan mich!



Jetzt kostenfrei Starterpaket bestellen!



Tel.: 0231 – 586 886 – 0



[www.dentapart.de](http://www.dentapart.de)



Einfach bessere Zähne.®

**dent.apart**®