

# Kein Stress bei der Begehung – Dentale Prozessvalidierung

Die Hygieneprozesse in Zahnarztpraxen variieren, da sie von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Diese Faktoren umfassen die zur Verfügung stehenden Geräte, die Beschaffenheit der Praxisräumlichkeiten sowie das fachmedizinische Personal und den Behandler. Der folgende Beitrag geht auf typische Fehler bei der Aufbereitung ein und trägt somit zur Optimierung der Prozesse bei.

**Autorin: Doreen Broich**



Oft verändern sich Gegebenheiten im Praxisalltag, wie zum Beispiel Personalumstellungen durch Elternzeit einer Kollegin, der Zugewinn eines weiteren Behandlers, räumliche Veränderungen und Ähnliches – all dies kann Auswirkungen auf die Hygienekette haben.

Daher lohnt es sich, bei täglich wiederkehrenden Routinen und möglichen Abweichungen im Alltag den Validierungstermin zu nutzen, um die praxisindividuellen Begebenheiten genau unter die Lupe zu nehmen und dort, wo nötig, Verbesserungen und Anpassungen vorzunehmen.

Die Valisy-Profis verstehen ihre Aufgabe ganzheitlich, und mit ihrer Erfahrung aus vielen Arbeitskonzepten zahlreicher Zahnarztpraxen können sie zu einer Optimierung der Hygienekette in der Praxis beitragen. Ihre oberste Priorität: gesetzeskonform Begehungssicherheit zu schaffen, Prozesse keimfrei zu halten und so das Praxisleben leichter zu gestalten.

Es können zum Beispiel verschiedene Fehler bei der Instrumentenaufbereitung auftreten, die zu einer unzureichenden Aufbereitung führen können:

**Unzureichende Reinigung:** Eine unvollständige oder unsachgemäße Reinigung der Instrumente kann zu Rückständen von Blut, Gewebe oder anderen Verunreinigungen führen. Dies kann die Desinfektion oder Sterilisation beeinträchtigen und das Risiko einer Übertragung von Infektionen erhöhen.

**Falsche Desinfektion:** Die Verwendung von falschen Desinfektionsmitteln oder das Nichtbefolgen der vorgeschriebenen Einwirkzeiten kann die Effektivität der Desinfektion reduzieren. Es ist wichtig, zugelassene Desinfektionsmittel zu verwenden und die Herstelleranweisungen genau zu befolgen.

**Mangelnde Sterilisation:** Wenn Instrumente, die steril sein sollten, nicht ordnungsgemäß sterilisiert werden, besteht das Risiko einer Kontamination und einer potenziellen Übertragung von Krankheitserregern. Die Verwendung der falschen Sterilisa-

Jeder Valisy-Profi prüft, validiert und checkt zuverlässig sowie gesetzeskonform. Damit sind Praxen auf die nächste Begehung ideal vorbereitet. Hier: Denise Ostermeier, Medizin-Validiererin.

tionsmethode oder das Nichtbefolgen der empfohlenen Zykluszeiten und -temperaturen kann zu unzureichender Sterilisation führen.

**Fehlerhafte Verpackung:** Eine fehlerhafte Verpackung der sterilisierten Instrumente kann zu einer Beeinträchtigung der Sterilität führen. Wenn die Verpackung beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß verschlossen wird, können Keime eindringen und die Instrumente kontaminieren.

**Ungeeignete Lagerung:** Eine unsachgemäße Lagerung der sterilisierten Instrumente kann zu Kontaminationen führen. Die Instrumente sollten an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahrt werden, der vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Kontaminationsquellen geschützt ist.

**Mangelnde Dokumentation:** Eine unzureichende Dokumentation der durchgeführten Schritte der Instrumentenaufbereitung kann zu Problemen bei der Rückverfolgbarkeit und bei Qualitätskontrollen führen. Eine genaue Aufzeichnung der durchgeführten Verfahren, Sterilisationszyklen und Verpackungsdetails ist wichtig, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

**Fehlende Schulung und Weiterbildung:** Wenn das Personal nicht ausreichend geschult ist oder nicht über aktuelles Wissen zu den richtigen Verfahren und Vorschriften verfügt, können Fehler bei der Instrumentenaufbereitung auftreten. Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass das Personal auf dem neuesten Stand ist und bewährte Praktiken befolgt.



Die Validierung von Prozessen ist ein wichtiger Faktor, um die Qualität der Patientenversorgung und damit auch Begehungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.

Mit dem ValiDEAL von Valisy erreicht die Validierung nicht nur Planbarkeit und Preisstabilität für zwei Jahre, sondern schafft auch greifbaren Mehrwert für die praxisinternen Hygieneprozesse.

Darum ist Weiterbildung des Praxisteams ein wesentlicher Bestandteil des ValiDEALS. Qualifikation der Praxismitarbeiter ist ein Schlüssel für qualitative Hygieneprozesse, die einem Validierungsverfahren standhalten und ein Prüfsiegel erhalten.

Das optimiert den zeitlichen Einsatz des medizinischen Personals und schont gleichzeitig Material und Kosten.

Valisy GmbH · Tel.: 0800 0060987 · [www.valisy.de](http://www.valisy.de)

ANZEIGE

# METASYS Absaugung & Kompressor

METASYS BOOSTERT  
IHREN MASCHINENRAUM!

METASYS Saugmaschinen und Kompressoren erfüllen höchste Ansprüche abgestimmt auf die unterschiedlichsten Anforderungsprofile einer Zahnarztpraxis. Auch nach mehrstündigem Dauereinsatz und kontinuierlicher Materialbelastung garantieren sie eine langfristig gleichmäßig starke Leistung.

- >> Verfügbar für bis zu 15 Behandlungs-Plätze
- >> Entspricht höchsten hygienischen und medizinischen Standards
- >> Optional ausgestattet mit zentraler Amalgamabscheidung



T +43 512 205420 | [info@metasys.com](mailto:info@metasys.com) | [metasys.com](http://metasys.com)

 **METASYS**  
protect what you need