

**Öffnet neue
Horizonte:**



Das Komet Sortiment zur Bearbeitung von Vollkeramik

Infos zum
Unternehmen



1. Vertrauen

Warum sollte der Zahnarzt bei vollkeramischem Zahnersatz besser mit Komet-Produkten arbeiten?

Das 100-jährige Unternehmen setzt mit seinen innovativen Lösungen seit eh und je neue Maßstäbe in der dentalen Welt. Auch bei der Präparation sowie Bearbeitung und Erstellung von Vollkeramik-Restaurationen demonstriert es, dass die Fusion langjähriger Erfahrung und Expertise die Grundlage qualitativ hochwertiger Instrumente darstellt. Kunden erhalten für jeden Schritt der Vollkeramik-Restaurationsqualität vom Experten, seien es Okklusionsonlays, Keramikinlays, keramische Teilkronen, Veneers oder Keramikkrone.

2. DIAO


Insbesondere beim Anlegen des Kronenrandes braucht es Kontrolle, Präzision und Sicherheit. Mit welchen Spezialinstrumenten ist dies möglich?

Bei DIAO sorgen zusätzlich eingebettete Keramikperlen für den Innovationssprung. Weniger Druck und gleichzeitig mehr Schärfe bedeuten eine bessere Kontrolle über das Instrument. Dies ist besonders beim Anlegen eines Kronenrandes entscheidend. DIAO-Instrumente lassen sich absolut geschmeidig führen, bieten die perfekte Kontrolle und damit Sicherheit bei der Präparation.

3. Schallinstrumente

Die Kronenstumpfpräparation ist besonders im Approximalkontaktbereich wegen der Nachbarzähne kritisch. Gibt es hierfür eine elegante Lösung?

Ja, die zwei Schallspitzen SFM6 und SFD6 führen im Rahmen der Kronenstumpfpräparation zu einem vorzüglichen approximalen Finish. Wenn mit einem dünnen Diamant-Finierer der Approximalkontakt eröffnet wurde, kommen die einseitig diamantierten Spitzen zum Glätten und Finieren der Approximalkontakflächen zum Einsatz – für ein zügiges Vorgehen mit glattem Ergebnis, ohne den Nachbarzahn zu gefährden.

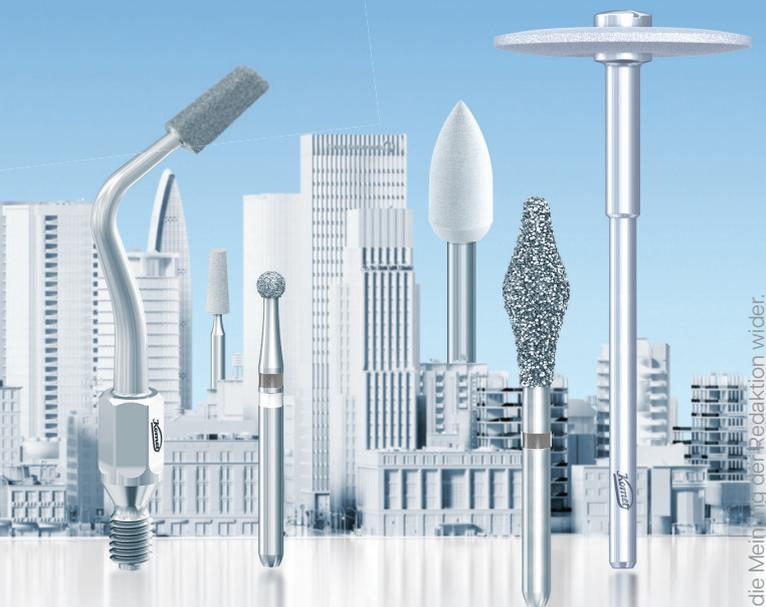

Gibt es weitere Schall-Lösungen für die Kronenstumpfpräparation?

Ja, die Schallspitzen SF856/SF8856 (konische Hohlkehle, rund) sind für eine feine Bearbeitung (Präparieren und Finieren) sehr gut geeignet. Die Instrumente sind formkongruent mit den Diamantinstrumenten mit unbelegtem Führungsstift. Die Verletzungsgefahr von Nachbarzahn ist in schwer zugänglichen Bereichen mit Schallinstrumenten grundsätzlich reduziert.

4. Rundum-Portfolio

Darf man bei Komet Dental von einem ganzheitlichen System zur Bearbeitung von Vollkeramik sprechen?

Absolut! Von der perfekten Präparation mit DIAO-Diamantinstrumenten und Schallspitzen über die Vollkeramik-Bearbeitung mit Diamantkörnern durchsetzten Schleifern bis hin zur Politur und finalen Eingliederung beim Patienten – Komet Kunden können aus einem umfangreichen Portfolio das passende Instrument wählen. Damit sind sie bestens auf die Besonderheiten der vollkeramischen Versorgung vorbereitet und erzielen langlebige Ergebnisse.