

Mundgesunde Reinigung und Pflege

blue®m oral foam für Aligner, Retainer & KFO-Apparaturen.



Abb. 1a und b: Der neue blue®m oral foam für Aligner, Retainer & KFO-Apparaturen – einfach in der Anwendung, sorgt er zu Hause und unterwegs für eine mundgesunde Reinigung und Pflege. (Bilder: © Bluem Europe)


Hoch motivierte Alignerpatienten, die ihre Schienen zuverlässig tragen, regelmäßig reinigen und zudem auf eine sorgfältige Mundhygiene achten, wünscht sich wohl jede Praxis. Gibt man ihnen mit dem ersten Schienensatz gleich die richtige Pflege in die Hand, wird aus einem Wunsch garantiert viel öfter Wirklichkeit. Der neue blue®m oral foam für Aligner, Retainer & KFO-Apparaturen verhilft Alignern nicht nur zu hygienischer Sauberkeit und angenehmer Frische. Dank hochwirksamer Sauerstoffformel* pflegt er auch Zähne und Zahnfleisch, trägt zur Regeneration entzündlicher Schleimhaut bei und unterstützt somit nachweislich die Mundgesundheit. Zudem bietet der antibakterielle Reinigungs- und Pflegeschäum einen zahnauhellenden Effekt.

Einfache Anwendung – jederzeit und überall

Ob zu Hause oder unterwegs – die Anwendung des DE/AT-exklusiv über dentalline erhältlichen blue®m oral foam für Aligner, Retainer & KFO-Apparaturen ist denkbar einfach. Zu Hause wird dieser nach erfolgter Mundhygiene in und auf den Aligner gesprüht und mittels Finger oder weicher Zahnbürste gründlich verteilt. Nach kurzer Einwirkzeit kann der Aligner samt Schaum wieder eingesetzt werden. Überschüsse ausspucken, fertig. Ein Spülen ist nicht erforderlich. Ist der Aligner stark verschmutzt oder vergilbt, wird eine längere Einwirkzeit (ca. 5 Min.) empfohlen. Zudem sollte der Schaum abgebürstet und die Schiene unter klarem Wasser abgespült werden, bevor sie wieder eingesetzt wird.



Abb. 2: Der Mundschäum ist einzeln sowie als praktischer Aufsteller für den Praxistresen inklusive zwölf Fläschchen über dentalline beziehbar. (Bilder: © Bluem Europe/ dentalline)

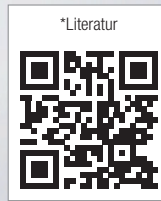


Zähne und Interdentalräumen zwischendurch nicht zulässt, keine störenden Gerüche oder Vergilbungen der Korrekturschienen entstehen. Zu Hause können die gründliche Mundhygiene und Reinigung der verschmutzten Aligner dann wie gewohnt nachgeholt werden.

Praktischer Aufsteller für den Praxistresen

Der blue®m oral foam für Aligner, Retainer & KFO-Apparaturen ist ab sofort bei dentalline bestellbar, z.B. im praktischen Aufsteller mit zwölf Fläschchen für den Praxistresen. Übrigens, neben Alignerpatienten können auch Träger von anderen KFO-Apparaturen, Retainern, Knirscherschienen oder Sportmundschutzen von der hochwirksamen Sauerstoffformel profitieren.

Wer den neuen Reinigungs- und Pflegeschäum kennenlernen und dessen effektive Wirkung testen möchte, erhält beim DGAO-Kongress (22. und 23.11.2024) am Stand von dentalline dazu Gelegenheit.

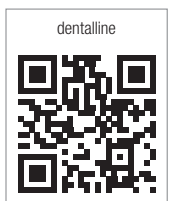

dentalline GmbH & Co. KG

info@dentalline.de
www.dentalline.de

Auch unterwegs bietet der blue®m oral foam einen angenehmen Frischekick und sorgt durch seine antibakterielle Wirkung dafür, dass z.B. nach Mahlzeiten, wenn der Schul- oder Berufsalltag ein Reinigen von

ANZEIGE

30 JAHRE
smiledental®
www.smile-dental.de

**BESTE PREISE
& TOP QUALITÄT**

**JETZT ZU BESTEN
PREISEN KAUFEN.
QR-CODE SCANNEN UND
GLEICH ONLINE BESTELLEN!**

Online auf www.smile-dental.de
oder persönlich und telefonisch bestellen
unter + 49 2102 15467-0.



Angebote gültig so lange der Vorrat reicht.