


Zwei MTAs für alle Fälle

MTA-Zement – ohne Mischen zu lang anhaltender Stabilität

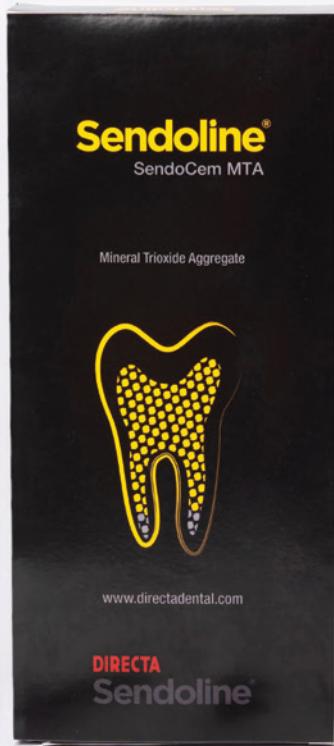

SendoCem-Indikationen

- Reparatur von Perforationen
- Direkte und Indirekte Pulpenüberkappung
- Pulpotomie
- Wurzelspitzenfüllung
- Apexifikation

SendoSeal MTA ist ein biokompatibler Wurzelkanalsealer auf MTA-Basis. Er härtet durch Absorption von Feuchtigkeit im Wurzelkanal aus, trägt zur Bildung von Hydroxylapatit in den Dentintubuli bei und ist formstabil. Der hohe pH-Wert von 10 bis 12 hat eine antibakterielle Wirkung, die den Heilungsprozess fördert.

SendoSeal MTA ist röntgenopak, sodass die Wurzelfüllung leicht zu erkennen ist und das Ergebnis auf der Röntgenaufnahme leicht beurteilt werden kann. Das Produkt wird direkt aus der Spritze applizierbar geliefert.



SendoCem MTA für verschiedene Behandlungen der vitalen Pulpa ist ein gebrauchsfertiger, biokeramischer Kalziumsilikatzement. Er nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und härtet ohne Mischen aus. Dank seiner Bioaktivität setzt er Kalziumionen frei, fördert die Apatitbildung und bietet Biokompatibilität, Dichtigkeit und antibakterielle Eigenschaften.

SendoCem ist sofort einsatzbereit und erfordert kein Mischen, was eine schnelle und unkomplizierte Anwendung ermöglicht. Dank der feinen Kanüle lässt er sich einfach und präzise applizieren. Er überzeugt durch herausragende physikalische Eigenschaften, darunter eine hohe Druckfestigkeit, geringe Löslichkeit sowie Röntgenopazität. Zudem verfärbt er die Zähne nicht, da er kein Wismutoxid enthält.

Für eine Produktberatung nehmen

Sie gerne Kontakt unter **+49 5221 3455-0**

oder per E-Mail **info@kaniedenta.de** auf.

Infos zum Unternehmen



DIRECTA AB

Alexander Haid

Tel.: +49 171 8187933

www.sendoline.com