

CP GABA GmbH

Effektiver Fluoridlack für schnelle Schmerzlinderung in der Praxis

In der Praxis

&

zu Hause



© CP GABA GmbH



Mit dem elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Duraphat Fluoridlack in Einzeldosen bietet CP GABA eine praktische In-Office-Anwendung zur schnellen Schmerzlinderung bei Dentinhypersensibilität. Der Fluoridlack sorgt mit einer einzigen Anwendung für einen vollständigen Tubulverschluss.^{1,*} Er kann auf diesem Weg eine schmerzfreie zahnärztliche Behandlung unterstützen.

Diese professionelle Fluoridanwendung ergänzt die elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta mit klinisch bewährter PRO-ARGIN Technologie, die Patienten mit schmerzempfindlichen Zähnen zu Hause verwenden können.

Vollständiger Tubulverschluss nach einmaliger Anwendung

Die hochfluoridhaltige Formel des elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Duraphat Fluoridlacks (5 Prozent Natriumfluorid, 22.600ppm F⁻) dringt tief in die Dentintubuli ein.² Bereits eine einzige Anwendung erzielt einen vollständigen Verschluss der tubulären Struk-

turen, wie rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen belegen.^{1,*} Dentinhypersensibilität, die durch den Kontakt mit kalten oder heißen sowie süßen oder sauren Getränken und Speisen ausgelöst werden kann, wird auf diesem Weg gelindert. Bei Patienten mit starker Schmerzempfindlichkeit kann der Fluoridlack alle drei bis sechs Monate angewandt werden.

Unterstützt eine schmerzfreie zahnärztliche Behandlung

Auch zahnärztliche Behandlungen können Schmerzempfindlichkeit auslösen: Klinischen Studien zufolge leidet mehr als die Hälfte der Patienten eine Woche nach einer Parodontalbehandlung an Dentinhypersensibilität.^{3,4} Um hier vorzubeugen, kann der elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Duraphat Fluoridlack im Anschluss an die Parodontalbehandlung angewandt werden. Er ist zudem geeignet für die Anwendung nach der professionellen Zahnreinigung sowie vor einer professionellen Aufhellungsbehandlung.

* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider

Praktische, schnelle Anwendung in wenigen Schritten

Eine Einzeldosis enthält neben dem Lack auch einen Applikationspinsel. Die Behandlung erfolgt in wenigen Schritten: Die Zahnoberfläche wird mit Gaze oder Luft getrocknet, der Lack mit dem Applikationspinsel kurz umgerührt und anschließend als dünne, gleichmäßige Schicht aufgetragen. Vor dem erneuten Eintauchen des Pinsels sollte dieser mit Gaze abgewischt werden. Der transparente Lack mit Himbeergeschmack nimmt beim Trocknen die natürliche Farbe des Zahnschmelzes an.

In der Praxis und zu Hause: elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL bei Dentinhypersensibilität


In der zahnärztlichen Behandlung erfordert Dentinhypersensibilität ein besonderes Augenmerk. Die Schmerzempfindlichkeit kann bei Betroffenen zu einer Vermeidung der Mundhygiene führen und zudem die Lebensqualität einschränken.⁵

Für die tägliche häusliche Zahnpflege eignet sich für Patienten mit Dentinhypersensibilität die elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta. Die Zahnpasta enthält acht Prozent Arginin, Kalziumkarbonat sowie ein Prozent Zinkphosphat. Diese PRO-ARGIN Technologie ahmt die natürlichen Remineralisierungsprozesse des Speichels wirksam nach und bietet eine klinisch erprobte Möglichkeit zur sofortigen** und lang anhaltenden Schmerzlinderung bei Dentinhypersensibilität.^{6,7} Bereits nach drei Anwendungen sind die Tubuli zu 76 Prozent, nach fünf Anwendungen sogar zu 90 Prozent verschlossen.⁷ Klinische Daten zeigen zudem eine dauerhafte Verbesserung der Empfindlichkeit sowohl bei taktilen Reizen als auch bei Luftstoßmessungen nach vierwöchiger Anwendung der elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Zahnpasta bei 100 Prozent der Patienten.⁸

Patienten, die zusätzlich zu einer Dentinhypersensibilität erste Anzeichen für Zahnfleischprobleme oder bereits bestehende Zahnfleischbeschwerden haben, können von der elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL REPAIR & PREVENT Zahnpasta profitieren. Auch

Eindringen des 5-prozentigen Fluoridlacks in die offenen Tubuli (10 µm Maßstab)

© CP GABA GmbH

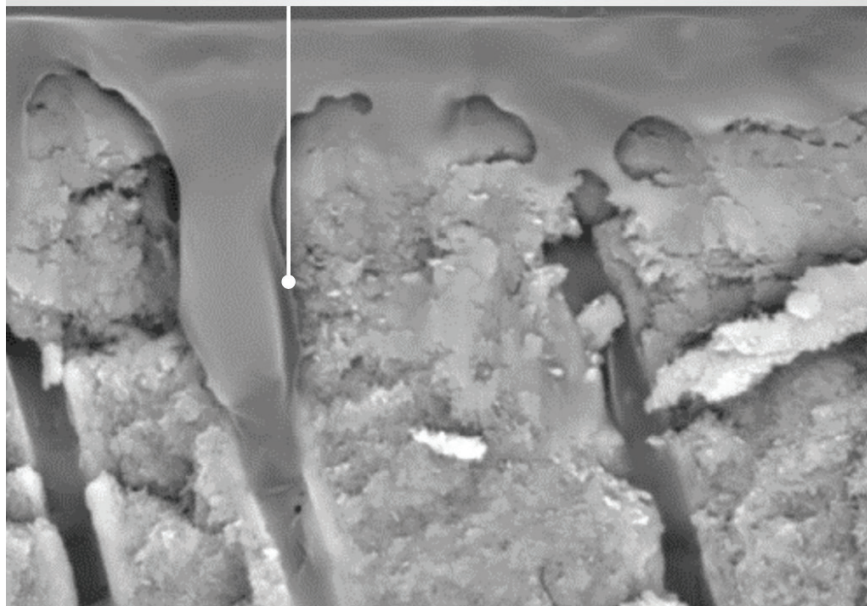

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme sechs Stunden nach Applikation des elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL Duraphat Fluoridlacks auf eine Dentinprobe.

hier wirkt die PRO-ARGIN Technologie gegen Dentinhypersensibilität. Zusätzlich enthält die Formulierung weitere Zinkverbindungen in Form von Zinkoxid und Zinkcitrat, welche helfen, das Zahnfleisch zu stärken und dessen Rückgang vorzubeugen.⁹

Ergänzend empfiehlt sich die elmex® EXPERT PRÄZISION SENSITIVE Zahnbürste. Mit mehr als 4.000 ultraweichen und hochdichten Borsten reinigt sie gründlich und extra sanft die Zahnzwischenräume und die Zahnoberfläche.

Kontakt

CP GABA GmbH
CSDentalDE@CPgaba.com
www.cpgabaprofessional.de

Quellen



* In-vitro-Studie, konfokales Bild nach einer Anwendung.

**Für sofortige Schmerzlinderung bis zu zweimal täglich mit der Fingerspitze auf den empfindlichen Zahn auftragen und für eine Minute sanft einmassieren.