

HERSTELLERINFORMATION // Wer in der Zahnarztpraxis täglich mit Hand- und Winkelstücken oder Turbinen arbeitet, kennt den Unterschied: Ein neues oder optimal gepflegtes Übertragungsinstrument läuft spürbar leichter, präziser und zuverlässiger. Es liegt gut in der Hand, arbeitet ruhig und unterstützt einen reibungslosen Behandlungsablauf. Genau dieses Gefühl hat jetzt einen Namen: MELAcare.

WELLNESSPROGRAMM FÜR INSTRUMENTE

Mit dem neuen kompakten Aufbereitungs- und Pflegegerät erweitert MELAG im 75. Jubiläumsjahr sein Portfolio um eine Lösung, die Reinigung, Desinfektion und – je nach Instrument – Öl-Pflege vollautomatisch zwischen den Behandlungen ermöglicht.

Aufbereitung als tägliche Herausforderung

Für Zahnarztpraxen und Kliniken ist die sichere Aufbereitung dentaler Hohlkörper-Instrumente längst weit mehr als eine organisatorische Pflicht. Sie ist ein zentraler Bestandteil von Hygiene, Patientensicherheit, Werterhalt und Wirtschaftlichkeit. Denn Hand- und Winkelstücke, Turbinen sowie weitere komplexe Instrumente gehören zu den besonders sensiblen und wertvollen Arbeitsmitteln in der Praxis. Sie müssen nach

der Behandlung zuverlässig aufbereitet werden, sollen gleichzeitig aber möglichst schnell wieder verfügbar sein. Hinzu kommt: Eine unzureichende oder unregelmäßige Pflege kann die Lebensdauer der Instrumente verkürzen und Reparaturen verursachen, die im Praxisalltag nicht nur Kosten, sondern auch Ausfallzeiten bedeuten.

Reinigung, Desinfektion und Pflege in einem System

Mit MELAcare bietet das Berliner Familienunternehmen MELAG nun eine Lösung, die genau an dieser Schnittstelle ansetzt. Das System verbindet validierbare Aufbereitung mit einer automatisierten, instrumentenschonenden Öl-Pflege und unterstützt Praxisteams dabei, Hygieneprozesse effizienter, sicherer und komfortabler zu gestalten.

Denn im Praxisalltag zählt jede Minute. Deshalb wurde MELAcare auf kurze Prozesszeiten und einfache Abläufe ausgelegt. Je nach Anwendung sind Reinigung, Desinfektion und ggf. Pflege von bis zu sechs Instrumenten bereits ab 14 Minuten möglich. Hochgerechnet auf einen Arbeitstag ermöglicht MELAcare damit eine systematische Aufbereitung von bis zu 144 dentalen Hohlkörper-Instrumenten.

Zwei Deckel für vielfältige Anforderungen

Für unterschiedliche Anforderungen in der Zahnarztpraxis stehen zwei MELAcare Deckel zur Auswahl. In Kombination mit 28 speziell entwickelten Adaptern lässt sich MELAcare somit flexibel an das jeweilige Instrumentarium und die indivi-



* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



duellen Anforderungen der Praxis anpassen:

- Der MELAcare Deckel Blue ist für die Reinigung, Desinfektion und Pflege von bis zu sechs Hand- und Winkelstückchen, Turbinen sowie Winkelstückköpfen konzipiert. Die Prozesszeit liegt hier bei ca. 17 Minuten.
- Der MELAcare Deckel Green eignet sich für die Reinigung und Desinfektion von bis zu sechs ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel, Ultraschallhandstücken, Sprayvit-Düsen oder Prophylaxehandstücken – und das bereits in nur 14 Minuten.

Läuft wie geschmiert – von der Spannzangenpflege bis zur Routineprüfung

Bei der Entwicklung von MELAcare hat MELAG seine Erfahrung aus über 5.000 installierten Careclave-Geräten und damit mehr als sechs Jahren Markterfahrung in der Aufbereitung und Pflege von Hand- und Winkelstücken sowie Turbinen einfließen lassen. Das Ergebnis ist ein System, das die täglichen Abläufe in der Praxis konsequent weiterdenkt – von der intuitiven Bedienung über die smarte Dokumentation bis hin zur Routineprüfung:

- **Intuitiv bedienen:** Das große Touchdisplay ist auf die Bedienlogik bestehender MELAG Autoklaven- und Reinigungs- und Desinfektionsgeräte abgestimmt. Das erleichtert die Anwendung, verkürzt die Eingewöhnung und sorgt für ein einheitliches Bedienerlebnis in der Aufbereitung.

- **Smart dokumentieren:** Dokumentation und Freigabe erfolgen direkt am Gerät – ohne Aufpreis. So wird nicht nur der Aufbereitungsprozess selbst unterstützt, sondern auch die nachvollziehbare Prozessdokumentation im Praxisalltag vereinfacht.
- **Platzsparend integrieren:** Das kompakte Design mit geringer Stellfläche ermöglicht die einfache Integration in bestehende Aufbereitungszeilen – ein klarer Vorteil, wenn der verfügbare Platz in der Praxis begrenzt ist.
- **Instrumente schonen:** Die punktgenaue Ölung und Spannzangenpflege unterstützt die zuverlässige Funktionsweise hochwertiger Übertragungsinstrumente und trägt zu deren langfristigem Werterhalt bei.
- **Schnell wieder einsatzbereit:** Die optionale intelligente Zusatzkühlung bringt die Instrumente nach Prozessende automatisch in rund fünf Minuten auf eine angenehme Entnahmetemperatur – ganz ohne zusätzliche Handgriffe. Das spart Zeit, vermeidet Wartezeiten und entlastet den Instrumentenkreislauf besonders in eng getakteten Behandlungsabläufen.
- **Routineaufwände reduzieren:** Automatisierte Abläufe entlasten das Praxisteam Woche für Woche und helfen dabei, wiederkehrende Arbeitsschritte effizienter zu gestalten.
- **Wasserqualität einfach erfüllen:** Die Anforderungen an die Wasserqualität lassen sich komfortabel und zuverlässig erfüllen – so unkompliziert, wie Praxisteams es von ihrem MELAG Autoklaven gewohnt sind.

Fazit: Mehr Sicherheit, weniger Routineaufwand

Mit MELAcare ergänzt MELAG sein Portfolio um ein Gerät, das die Aufbereitung dentaler Hohlkörper-Instrumente konsequent weiterdenkt. Es geht nicht allein darum, Instrumente zwischen zwei Behandlungen schnell wieder verfügbar zu machen. Es geht um einen systematischen Prozess, der Hygiene, Dokumentation, Bedienkomfort, Werterhalt und Effizienz miteinander verbindet. Für Zahnarztpraxen bedeutet das eine spürbare Entlastung im Alltag – insbesondere dort, wo viele Instrumente zuverlässig, nachvollziehbar und schonend aufbereitet werden müssen.

So wird aus einer täglichen Routine ein automatisierter, validierbarer und komfortabler Prozess. Oder anders gesagt: MELAcare bringt das gute Gefühl perfekt gepflegter Instrumente zurück in den Praxisalltag – Behandlung für Behandlung.

MELAG MEDIZINTECHNIK
GMBH & CO. KG
www.melag.com