

# Maximus<sup>®</sup> powered by TriLipo<sup>®</sup>

**\_Auch chirurgischen Eingriffen abgeneigte Patienten** können nun endlich die Ergebnisse erlangen, die sie sich schon immer gewünscht haben. Ergebnisse, die sowohl unmittelbar als auch langfristig sind! Mit dem klinisch bewährten TriLipo<sup>®</sup> können unerwünschte lokale Fettablagerungen sicher und zielgerichtet behandelt werden.

Das neue Maximus<sup>®</sup> System arbeitet mit der TriLipo<sup>®</sup> Technologie, welche einen Durchbruch in der nicht invasiven Körpergestaltung darstellt. Maximus<sup>®</sup> bietet eine breite Vielfalt kosmetischer Anwendungen, wie z.B. Umfangsreduzierung, Bodycontouring, Reduzierung von Cellulite und Dehnungsstreifen. Außerdem kann mit dem Maximus<sup>®</sup> eine deutlich sichtbare Hautstraffung sowohl am Körper als auch im Gesicht erreicht werden.

Das Maximus<sup>®</sup> System stellt ein universelles Kompaktgerät im nicht invasiven kosmetisch-ästhetischen Bereich dar.

Die aktuelle Statistik der „American Society for Aesthetic Plastic Surgery“ stellt unter Beweis, dass es seit 1997 einen Anstieg um 147 Prozent bei der Gesamtzahl der kosmetischen Verfahren gegeben hat. Im Detail erfolgte ein Anstieg der chirurgischen Verfahren über 50 Prozent und der nicht chirurgischen Verfahren mit über 231 Prozent. (Quelle: [www.surgery.org/sites/default/files/2009stats.pdf](http://www.surgery.org/sites/default/files/2009stats.pdf))

**Abb. 1** Aus den Fettzellen gelöstes verflüssigtes Fett.

**Abb. 2** Gleichzeitiger externer und interner Druck optimieren die Ableitung.

**Abb. 3** Kollagenregenerierung in der Dermalschicht schafft eine glattere Hautoberfläche.

## **\_Schnell, bequem und angenehm**

Die Behandlung mit dem Maximus<sup>®</sup> erfordert beim Patienten keine Ausfallzeit und keine Erholungsphase. Patienten können danach sofort zu ihrer Tagesordnung zurückkehren.

## **\_Die Behandlung – was passiert genau?**

Die TriLipo<sup>®</sup>-Technologie vereint gebündelte TriLipo<sup>®</sup> RF-Energie und TriLipo<sup>®</sup> Muskelenergie, die in einzigartiger Weise zeitgleich auf der Haut wirken. Die dreifache Wirkung der TriLipo<sup>®</sup>-Technologie besteht aus tiefgehender volumetrischer Erwärmung durch Radiofrequenz (RF), kombiniert mit interner Muskelkontraktion und externer Anwendung mechanischen Drucks, die gemeinsam maximale Fettbehandlung mit lymphatischer Ableitung sowie Hautstraffung erzielen können.

Die RF-Energie erzeugt Wärme durch den Widerstand des Gewebes, sowohl in den dermalen als auch in den subkutanen Schichten. Die selektive und gebündelte elektrische Erwärmung der Haut stimuliert und erhöht den Fettmetabolismus in der subkutanen Fettschicht sowie die Kollagenregenerierung in der Dermalschicht. In der subkutanen Fettschicht beschleunigt die Wärmewirkung den natürlichen Fettmetabolismus und die Freigabe flüssigen Fetts aus den Fettzellen in die extrazelluläre Matrix (Abb.1).

Die Ableitung des gelösten flüssigen Fetts wird durch gleichzeitige Ausübung von internem und externem Druck auf die Fettschicht beschleunigt. Intern regeln TriLipo<sup>®</sup>-Muskelenergieimpulse die Muskelschicht an, sodass die Muskeln kontrahieren.

Diese Kontraktion hebt den Muskel und drückt die Fettzellen zur Oberfläche hin. Gleichzeitig übt der Applikator mechanischen Druck von außen auf die Haut aus.

Diese kombinierten internen und externen Druckvorgänge verstärken die Entfernung flüssigen Fetts durch beschleunigte lymphatische Ableitung (Abb. 2).

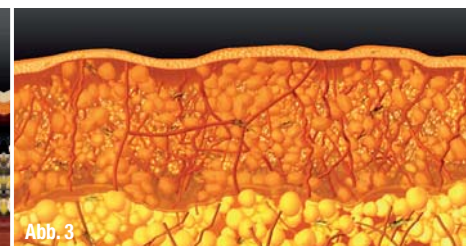
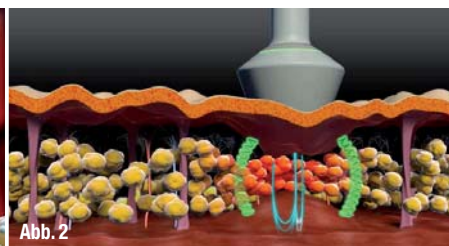
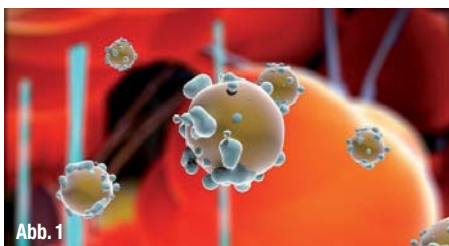




Abb. 4



Abb. 5

Die gleichzeitige Anwendung der RF und der verstärkten Ableitung verursacht eine homogene Erwärmung, die den Blut- und lymphatischen Kreislauf beschleunigt und die Oxidation und Entgiftung des Gewebes optimiert.

In der Dermalschicht erwärmt gebündelte RF-Energie die Kollagenfasern und verursacht ihre Kontraktion. Dies führt unmittelbar zur Straffung und Glättung der Haut.

Darüber hinaus wird der Metabolismus der Fibroblasten beschleunigt und damit die Kollagenregeneration und langfristige Hautstraffung und -festigung erzeugt (Abb. 3).

Die dreifache Wirkung der TriLipo®-Technologie ist von der ersten Behandlung an sichtbar. Langfristige Körpergestaltung kann bereits nach wenigen Anwendungen erzielt werden.

#### Die Fakten:

- \_ Reduzierung lokaler Fettablagerungen
- \_ Angenehme, schnelle und einfache ambulatorische Behandlung
- \_ Verbessertes Blutkreislauf und Oxidation
- \_ Langfristige Verringerung des Körperumfangs und Verbesserung der Körpergestaltung
- \_ Sichtbare Ergebnisse ab der ersten Behandlung
- \_ Muskel-Lifting und Toning
- \_ Optimale Entgiftung
- \_ Klinisch bewährt
- \_ Nicht invasiv.

#### Kontraindikationen:

Das System darf nicht angewendet werden während einer Schwangerschaft, bei jeder Art von implantierbaren elektronischen Vorrichtungen, bei dermatologischen oder Gefäßerkrankungen und Bereichen der sensorischen Beeinträchtigungen wie in Fällen von

Nervenverletzungen und Neuropathien. Die klinische Bewertung der neuen Technologie demonstriert Sicherheit und hohe Wirksamkeit bei der Verringerung der Fettpolster, Reduzierung des Körperumfangs und Hautstraffung.

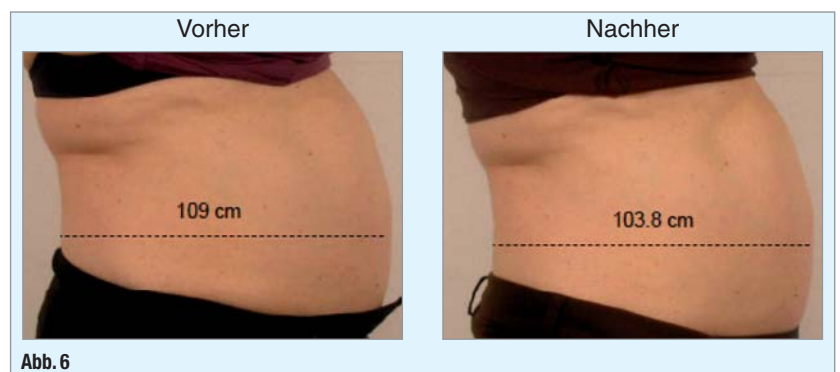


Abb. 6

Signifikante Ergebnisse sind sofort nach der ersten Behandlung sichtbar. Jede Behandlungssitzung dauert etwa 30 Minuten. Langfristige klinische Ergebnisse sind nach wenigen Behandlungen erreicht. Für die langfristigen Ergebnisse werden vier Behandlungen empfohlen, abhängig von der persönlichen Verfassung des Patienten (Abb. 6).

**Abb. 4\_** Das Maximus®-System.  
**Abb. 5\_** Maximus® Behandlungsbild.  
**Abb. 6\_** Vorher und Nachher (Studie der Pollogen® Ltd.) Fettreduzierung des Bauches und Straffung der Haut nach der vierten Sitzung. Erreichte Reduktion des Bauchumfangs: 5,2 cm.

#### \_ Kontakt

face

#### K-Form Beauty Medical Equipment

Spessartstraße 30  
63743 Aschaffenburg  
Tel.: 0 60 21/5 88 38-0  
Fax: 0 60 21/5 88 38-20  
www.k-form.de