

# BeutiSealant

## *Fissurenversiegelung - einfach, schonend und schnell!*



**Selbstätzender  
Primer**  
*(Ohne Etch & Rinse-  
Technik!)*



PRG  
Technology  
**Giomer**

**Patentierter  
S-PRG-Füller**  
*(Kariostatische Wirkung!)*

**Vier Arbeitsschritte in nur 30 Sekunden:**



**1** Primer auf gereinigten Zahn  
auftragen und 5 Sek. einwirken  
lassen



**2** Mit sanftem Luftstrom 5 Sek.  
trocknen



**3** Versiegler auftragen



**4** Mit Halogen-Lampe (20 Sek.)  
oder LED-Lampe (10 Sek.)  
lichthärten



Official Partner  
**miCD**  
Minimally Invasive  
Cosmetic Dentistry



[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

Besuchen  
Sie uns in  
**IDS** Halle 4.1  
Stand  
A40/B49  
12.-16.3.2013