

# BeutiSealant

***Fissurenversiegelung -  
einfach, schonend und schnell!***



**Selbstätzender  
Primer**  
*(Ohne Etch & Rinse-  
Technik!)*



PRG  
Technology  
**Giomer**

**Patentierter  
S-PRG-Füller**  
*(Kariostatische Wirkung!)*

***Vier Arbeitsschritte in nur 30 Sekunden:***



**1** Primer auf gereinigten Zahn auftragen und 5 Sek. einwirken lassen



**2** Mit sanftem Luftstrom 5 Sek. trocknen



**3** Versiegler auftragen



**4** Mit Halogen-Lampe (20 Sek.) oder LED-Lampe (10 Sek.) lichthärten



[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

Official Partner  
**miCD**  
Minimally Invasive  
Cosmetic Dentistry