

Prophylaxepaste

# Der Weg zu sauberen Zähnen ist rot-gelb-grün

Eine Paste, die poliert, reinigt, Rückstände entfernt und Zahnbeläge zuverlässig der Vergangenheit angehören lässt? All das kann CleanJoy, die neue Zahnreinigungs- und Polierpaste zur professionellen Zahnreinigung und Politur im Rahmen der Prophylaxebehandlung von VOCO.

Natascha Ahlff/Cuxhaven

■ Die Paste entfernt weiche und harte Zahnbeläge sowie extrinsische Verfärbungen wie sie etwa durch Tee, Kaffee oder Tabak verursacht werden. Als verlässlicher Helfer bei professionellen Zahnreinigungen reinigt und poliert CleanJoy Zahnoberflächen und Füllungen. Darüber hinaus kommt die Polierpaste vor der Anwendung von Bleichgel und nach der Entfernung von KFO-Geräten zum Einsatz. Aber auch vor dem definitiven Zementieren indirekter Restaurationen entfernt sie Rückstände temporären Befestigungsmaterials.

CleanJoy ist in drei Reinigungsstärken erhältlich, sodass je nach Grad der Verunreinigung individuell auf die jeweilige Patientensituation eingegangen werden kann. Das einfache Ampelsystem garantiert dabei eine sichere Anwendung ohne Verwechslungsrisiko:  
Rot = grob/hohe Reinigungsstärke  
Gelb = mittel/mittlere Reinigungsstärke  
Grün = fein/Polierpaste

CleanJoy enthält 700 ppm Fluorid und leistet damit auch einen Beitrag zur Remineralisierung und Stärkung der natürlichen Zahnhartsubstanz.

Die Prophylaxepaste ist einfach in der Anwendung und lässt sich mit jedem handelsüblichen Kelch und Bürstchen verwenden: Einfach in der gewünschten Menge auf einen Misch-

block geben, mit dem Arbeitsgerät aufnehmen und mit angepassten Drehzahlen bzw. leichtem Druck auf die zu bearbeitende Oberfläche auftragen. Schließlich werden die gereinigten Flächen gründlich mit Wasser abgespült und eventuell überschüssiges Material abgesaugt. Nach Anwendung

der rot bzw. gelb gekennzeichneten Reinigungspaste erfolgt stets eine abschließende Behandlung mit der Polierpaste (grün), um die gereinigten Flächen zu glätten und vor neuerlichen Partikelanhaftungen zu schützen. Die Polierpaste sorgt außerdem für optimalen Glanz auf den gereinigten



## FALL 1

Fotos: Dr. Sanzio Marques, Brasilien



Abb. 1

▲ Abb. 1: Leichte extrinsische Verfärbungen im Unterkieferfrontzahnbereich.



Abb. 2

▲ Abb. 2: Einsatz der gelben Reinigungspaste.



Abb. 3

▲ Abb. 3: Abschließende Politur mit der grünen Polierpaste.



Abb. 4

▲ Abb. 4: Ergebnis: Saubere und glatte Zahnoberflächen.



▲ Zahnmedizinische Fachangestellte Andrea Beyer.

Flächen und rundet so das ästhetische Ergebnis ab.

### Erfahrungsbericht

Auch Andrea Beyer aus Münchhausen, Zahnmedizinische Fachangestellte mit Schwerpunkt Prophylaxe und Kieferorthopädie, setzt auf die Prophylaxepaste von VOCO und berichtet von ihren Erfahrungen:

„Professionelle Zahnreinigungen werden von Patienten aller Altersgruppen immer stärker nachgefragt. Deshalb waren wir im Team lange auf der Suche nach einer Reinigungspaste, die hartnäckige Belege entfernt und sanft den Zahn reinigt. Außerdem wünschten wir uns mit Blick auf unsere jungen Patienten eine Prophylaxepaste, die sowohl

**i** FALL 2
Fotos: Dr. Sanzio Marques, Brasilien

**Abb. 5**

▲ Abb. 5: Starke extrinsische Verfärbungen im Unterkieferfrontzahnbereich.

**Abb. 6**

▲ Abb. 6: Bearbeitung der Zahnoberflächen mit der roten Polierpaste.

**Abb. 7**

▲ Abb. 7: Abschließende Politur mit grüner Paste.

**Abb. 8**

▲ Abb. 8: Die Zahnoberflächen glänzen glatt und sauber.

bei Kindern im Allgemeinen als auch im Besonderen bei Kindern, die Multiband tragen, bedenkenlos angewendet werden kann. Eine Paste, die reinigt, ohne ein raues Gefühl zu hinterlassen oder die Brackets zu beschädigen.

Mit CleanJoy haben wir jetzt eine Paste gefunden, deren Anwendung Spaß macht und die dank der „Ampelfarben“ für jeden Patienten individuell nach Verfärbungsgrad der Zähne eingesetzt werden kann. Durch das Arbeiten von Rot (für gröbere Verfärbungen) nach Grün (für kleinere Verfärbungen) bleibt ein samtiges Gefühl ohne raue Stellen.

Die besten Erfahrungen haben wir mit CleanJoy in Kombination mit Silikon-Reinigungskelchen gemacht.“ <<

>>
**KONTAKT**

**VOCO GmbH**  
Anton-Flettner-Straße 1–3  
27472 Cuxhaven  
Tel.: 04721 719-0  
Fax: 04721 719-109  
www.voco.de



**Abb. 9**  
▲ Abb. 9: Ein starkes Trio – die CleanJoy Prophylaxepasten.

## Flexibilität

in Form und Service

**Aktion im Juni**

**8% Rabatt**

**auf die Möbellinie „Ansoma“**

(ausgenommen sind hierbei die Arbeitsplatten sowie das Zubehör)

Sie erreichen uns telefonisch unter:  
**03 69 23/8 39 70**

E-Mail: [service@le-is.de](mailto:service@le-is.de)  
Web: [www.le-is.de](http://www.le-is.de)