

## Erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung

ENDO Cleaning Pack – Produkte für Endo-Fachleute und -Einsteiger.

Wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung sind die Reinigung, Desinfektion und Trocknung des Wurzelkanals. Der Dentalspezialist COLTENE unterstützt den Behandler dabei mit einer Vielzahl an Produkten, die sowohl bei Endo-Fachleuten als auch bei -Einsteigern beliebt sind. Das neue „ENDO Cleaning Pack“ bietet ab sofort eine praktische Auswahl an Produkten für den Spül- und Trocknungsprozess zum attraktiven Vorteilspreis. Dieses aufeinander abgestimmte Paket erleichtert das Handling und erhöht die Sicherheit, da die einzelnen Komponenten perfekt harmonisieren.

Neben bekannten Produkten wie die Spüllösung, Papierspitzen und Wattekügelchen sind auch ausgeklügelte Innovationen im Paket enthalten.

Basis ist die farbcodierte dreiprozentige Spüllösung CanalPro NaOCl

(480 ml) und die dazugehörige Spritze in Rot. Alle CanalPro Spüllösungen weisen eine smarte Farbcodierung auf, um eine Verwechslung zu vermeiden. Mit den praktischen CanalPro Slotted-End Tips werden auch tiefste Kanäle, Taschen und Fisteln gründlich gespült.

Zur Erhöhung des Reinigungseffekts der Spüllösung steht ROEKO CanalBrush zur Verfügung. Die flexiblen Mikrobürstchen werden zur Entfernung jeglicher Verunreinigungen im Kanal eingesetzt und gelangen zu Stellen, die selbst mit Feilen nicht erreicht werden.

Die neue ENDO-Absaugkanüle ROEKO Surgitip-endo wurde speziell zur Trocknung des Wurzelkanals entwickelt. Das innovative Kugeldesign verleiht ihr aussergewöhnliche Rundumbeweglichkeit, die das Einbringen auch in schwer zugängliche Wurzelkanäle erleichtert und eine gute Sicht



auf das Arbeitsfeld ermöglicht. Der Zeitaufwand zur Trocknung und der Papierspitzenbedarf werden deutlich verringert. Lediglich zur abschliessen-

den Trocknungskontrolle wird die Verwendung einer Papierspitze empfohlen. Hierfür stehen ROEKO Papierspitzen Top color (Sortierung 15–40)

im „ENDO Cleaning Pack“ parat. Die ROEKO Wattekügelchen in Grösse 1 runden das Paket ab.

COLTENE versorgt den Endo-Fachmann genau wie Einsteiger mit dem gesamten, optimal aufeinander abgestimmten Behandlungs-Equipment, von der Aufbereitung bis zur Obturation. Regelmässige Schulungen und Workshops informieren über das optimale Handling. Das COLTENE-Expertenteam hilft dem Zahnarzt dabei mit jeder Menge praktischer Tipps und Anwendungstricks. Weitere Informationen und Fortbildungstermine gibt es unter [www.coltene.com](http://www.coltene.com).

Coltene/Whaledent AG

Tel.: +41 71 757 53 00


[www.coltene.com](http://www.coltene.com)

## Ein Implantatmaterial erobert den Markt

Roxolid von Straumann überzeugt mit hoher Ermüdungsfestigkeit und erstklassiger Biokompatibilität.

Präklinische und klinische Studien belegen: Straumanns patentiertes Zahnimplantatmaterial Roxolid besitzt eine besonders hohe mechanische Festigkeit und überzeugt mit hervorragenden Osseointegrationseigenschaften.

Roxolid, eine Metalllegierung aus Titan und Zirkonium, verfügt über eine bis zu 40 Prozent höhere Ermüdungsfestigkeit gegenüber entsprechenden Titan-Implantaten (Bernhard et al., 2009) und ist auch in puncto Biokompatibilität herkömmlichen Implantaten überlegen. Diese spezifischen Materialeigenschaften kommen insbesondere beim Einsatz von durchmesserreduzierten und den neuen kurzen 4-mm-Implantaten von Straumann zum Tragen. Eine klinische Studie der Universität Zürich (Benic et al., 2013) belegt die Gleichwertigkeit von 3,3-mm-Roxolid-Implantaten gegenüber 4,1-mm-Titanimplantaten. Dies

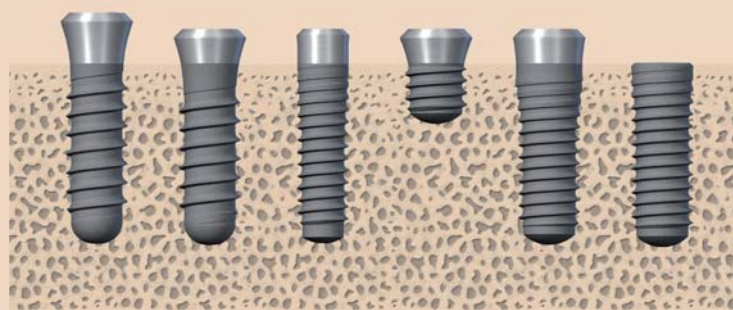

Roxolid – für jede Anwendung erhältlich.

ergibt neue Möglichkeiten für eine weniger invasive Behandlung von Patienten mit eingeschränktem Knochenangebot und der Vermeidung von aufwendigen und teuren Knochenaufbauten.

Seit Jahresanfang 2014 bietet Straumann den Kunden ein kostenloses Upgrade von Titan auf das hochfeste Material Roxolid. Neben den

zahlreichen Vorteilen für die Patienten profitiert auch die zahnärztliche Praxis mit Wettbewerbsvorteilen und Imagegewinn, erklärt das Dentalunternehmen.

Straumann Schweiz

Tel.: 0800 810812

[www.straumann.ch](http://www.straumann.ch)

## Interdentärbürsten auf dem Winkelstück

Bessere und schnellere Reinigung bei 200 Touren.

Von Curaprox gibt es die CRA prime: Interdentärbürsten für das grüne Winkelstück. Damit können Interdentarräume besser und auch schneller gereinigt werden. Am Winkelstück gibt es sowohl Wasser als auch Licht. Ausserdem ermöglicht die Farbcodierung der CRA prime, dem Patienten gleich die richtige Interdentärbürste mitzugeben.



Wird die CRA schön gerade eingeführt, entwickelt sich bei 200 Umdrehungen pro Minute eine Fliehkraft, die die Reinigungswirkung erhöht. (Foto: zumstein dental clinic ag)

Die CRA prime werden einfach auf das grüne Winkelstück gesetzt. Das erlaubt es, mit einer Rotation von 200 bis 400 Umdrehungen pro Minute zu reinigen. Schon bei 200 Umdrehungen entwickelt sich eine Fliehkraft, die die Reinigungswirkung erhöht. Bedingung ist, dass die CRA prime schön gerade eingeführt wird. Wichtig: Die Rotation muss im Uhrzeigersinn erfolgen; ansonsten wickelt sich der Draht auf.

Jetzt kann mit Rotation, mit Licht und Wasser, mit Prophylaxepaste, einem 1%-CHX-Gel sowie mit Polierpasten gearbeitet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Rotation die Abrasivität erhöht. Allzu abrasive Poliergels sollten also vermieden werden.

Für das Winkelstück und zur Pflege zu Hause

Die Interdentärbürsten sind in fünf Farben codiert. Das sorgt dafür, dass dem Patienten gleich die richtige Interdentärbürste der fünf CPS prime-Grössen für die Pflege zu Hause mitgegeben werden können.



Interdentärbürsten fürs grüne Winkelstück, das ist zeitsparend, komfortabel und gründlich: Die CRA prime sind einsetzbar mit oder ohne Rotation, Prophylaxepaste, Wasser, Licht. Die CRA prime reinigen den Zahnfleischsaum und die konkaven Flächen bis unter den Kontaktpunkt – mit oder ohne Drehung, langsam und schonend.

Bis auf den Verschluss nämlich sind die Interdentärbürsten für das Winkelstück und die für die Pflege zu Hause identisch. Der Verschluss der CRA prime passt auf das grüne Winkelstück, der Verschluss der CPS prime hingegen auf alle Curaprox-Halter.

Die IAP-Sonde

Um die richtige Grösse der Interdentärbürsten zu bestimmen, bietet Curaprox sogenannte IAP-Sonden an. Diese Sonden lassen sich ganz einfach in den Zwischenraum einführen, und dank Farbcodierung ist sofort klar, welches die passende Interdentärbürste ist.

Zur Sonde gibt es die Chart für die Instruktion der Patienten. Hier lässt sich einzeichnen, welche Interdentarräume welches Bürstchen benötigen: Patienten sind also bestens instruiert, wie sie zu Hause ihre Interdentarräume richtig pflegen.

CURADEN International AG

Tel.: +41 41 319 45 50

[www.curaprox.com](http://www.curaprox.com)

## Flexibilität hat einen Namen

Behandlungseinheit F60 auf Bedürfnisse der Praxen abgestimmt.

Dass diverse Praxiseinrichtungen über die Jahre älter werden und verschleissen, ist bekannt. Dass nicht immer

gleich eine komplette Einheit neu angeschafft werden muss, zeigt die ANTERAY Group. Durch den modularen Aufbau der firmeneigenen Behandlungseinheit F 60 ist ANTERAY in der Lage, auf alle Wünsche und Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Das Arztelement funktioniert nicht mehr? – ANTERAY hat die neue Elektronik bei gleichbleibender Handhabung (z. B. M1) oder ein komplett neues und modernes Modul. Ist das Helferinnenelement nicht mehr up to date, kann ohne Probleme ein modernes Modul mit neuester

Technologie am Stuhl angebaut werden. Des Weiteren ermöglicht das ein-schwenkbare Mundspülbecken in individueller Farbwahl eine ergonomische Nutzung.

Zudem sorgen standardisierte oder speziell gefertigte Adapter für eine hellere Beleuchtung. Die modernen, sparsamen und berührungsfreien LED-OP-Lampen sind mit jedem Stuhl zu kombinieren.

Die ANTERAY Group ist in der Lage, aus allen Varianten ein optimales Ergebnis für die Praxis zu erzielen, denn die Umstellung der Trocknung auf Nassabsaugung und das Kombinieren von eigenen Elementen mit ANTERAY-Modulen sowie die Integration von Amalgamabscheiderlösungen stellen neben dem Anbringen eines modernen Speiblocks bis zur Kompletterneuerung der Einheit kein Problem dar.

ANTERAY GmbH

Tel.: +49 9128 9266-60

[www.anteray.de](http://www.anteray.de)



Infos zum Unternehmen



## Schweizer Qualitätsprodukte überzeugen

**SAREMCO Dental – mit neuem Auftritt und optimierten Produkten zum Erfolg!**

27 Jahre nach Gründung des Unternehmens erstrahlt SAREMCO Dental im Jahr 2014 in neuem Glanz. Das neue Logo und der frische Auftritt stehen im Einklang mit den hochwertigen Produkten für die zahnärztliche Fülltherapie. Das Un-

ternehmen hat sich in jüngsten Jahren zu einem gestandenen Nischenplayer mit viel Know-how im Bereich Dentalmedizin entwickelt. Mit glänzenden Produkten, wie dem Komposit „els extra low shrinkage“, das per April 2014 mit einer konsistenzoptimierten Rezeptur in 23 verschiedenen Farben aufwartet, trifft SAREMCO Dental den Zahn der Zeit. Darüber hinaus bietet SAREMCO Patienten und Anwendern mit nachgewiesenen Allergien Kompositlösungen frei von TEGDMA und HEMA, und dies mit sehr niedriger Schrumpfspannung und Volumenschrumpfung.



Weitere Produkte aus dem Hause SAREMCO mit dem Prädikat „frei von TEGDMA und HEMA“ sind:  
– cmf adhesive system (prime & bond)  
– els FLOW (Flow-Komposit in acht Farben)  
– els paintart (sechs verschiedene Malfarben)  
– els cem (Zement in praktischer 10-g-Spritze)

Besuchen Sie die neu konzipierte Website [www.saremco.ch/dental](http://www.saremco.ch/dental) und überzeugen Sie sich von den Schweizer Qualitätsprodukten. SAREMCO Dental – Wir waren noch nie so nahe an der Natur. **DI**

**SAREMCO Dental AG**  
Tel.: +41 71 775 80 90  
[www.saremco.ch](http://www.saremco.ch)

## Bewährter Glasionomerzement

**GlasTec jetzt in neuer Darreichungsform.**

Der bewährte Glasionomerzement GlasTec von Dentaaurum zur sicheren Befestigung von orthodontischen Bändern wurde optimiert. Mit der neuen Darreichungsform ist es nun möglich, die Bänder im Patienten-

mund noch effizienter zu setzen. Die Mischzeit beträgt hierbei circa 30 Sekunden.

GlasTec lässt sich bei Raumtemperatur bis etwa drei Minuten nach Mischbeginn verarbeiten und bindet anschließend im Mund in drei bis vier Minuten ab. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit. Damit ist es gelungen, die Verarbeitungs- und Aushärtezeiten im Vergleich zum bisherigen Material deutlich schneller einzustellen. Das spart Zeit und Geld. Eine ästhetische Verbesserung bringt die Änderung der Farbe von Blau auf Weiss. Ab sofort ist der neue GlasTec im Lieferprogramm der Dentaaurum-Gruppe verfügbar. **DI**



**DENTAURUM GmbH & Co. KG**  
Tel.: +49 7231 803-0  
[www.dentaaurum.de](http://www.dentaaurum.de)

## Schluss mit hohen Kosten für rotierende Instrumente!

**Produktangebot für die Schweiz wird erweitert.**

Die Dr. Ihde Dental AG, bekannt für die Herstellung von Präzisions-Dentalimplantaten, erweitert das Produktangebot für die Schweiz und bietet seinen Kunden ein Sortiment mit leistungsstarken Turbinen und Winkelstücken an.

Die Instrumente sind sowohl von den Anschaffungskosten als auch im Fall einer Reparatur sehr preiswert. Dennoch müssen keine Qualitätseinbußen in Kauf genommen werden. Die Instrumente werden auf hochpräzisen, computer-gesteuerten Maschinen vollautomatisch produziert und geprüft, und sie übertreffen alle internationalen Normanforderungen.

Im Sortiment befindet sich eine Turbine mit integriertem Generator für volle Lichtfunktion ohne Strom



oder Kabel. Damit kann auch bei allen älteren Dentaleinheiten mit Licht im Mund gearbeitet werden, ohne dass Umbauten erforderlich sind.

Für neuere Dentaleinheiten mit Lichtfunktion befindet sich eine leistungsstarke Turbine mit KAVO-kompatibler Schnellkupplung im Angebot. Die Dr. Ihde Dental AG bietet in einer Einführungsaktion ein

wirklich vorteilhaftes Package an: Bei Bestellung von drei Turbinen wird die Schnellkupplung kostenfrei mitgeliefert.

Das Sortiment wird durch Luftmotoren mit interner und externer Sprayführung und dazu passenden Winkelstücken (1:1) abgerundet. Für die Reinigung der Instrumente wird ein Spezialöl mitgeliefert.

Besuchen Sie unseren neuen Shop [www.shop-implant.com](http://www.shop-implant.com) und fordern Sie auch den bebilderten Kurzprospekt an unter [contact@implant.com](mailto:contact@implant.com) an. **DI**

**Dr. Ihde Dental AG**  
Tel.: +41 55 293 23 23  
[www.ihde.com](http://www.ihde.com)



ANZEIGE

INTRODUCING

# DIGITAL DENTISTRY SHOW

AT  
**INTERNATIONAL EXPODENTAL MILAN**

16 17 18 **OCTOBER 2014**

EXHIBITION  
LIVE PRODUCT PRESENTATIONS  
HANDS-ON WORKSHOPS  
PRINTED REFERENCE GUIDE  
COFFEE WITH THE EXPERTS

[www.DigitalDentistryShow.com](http://www.DigitalDentistryShow.com)

Organized by Dental Tribune International in cooperation with Promunidi.  
Dental Tribune International | Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig | Germany  
T +49 341 48474 134 | F +49 341 48474 173  
E [info@digitaldentistryshow.com](mailto:info@digitaldentistryshow.com) | W [www.DigitalDentistryShow.com](http://www.DigitalDentistryShow.com)