

Erfahrungsbericht

Aufbereitung mit System

Eine zuverlässig eingehaltene Praxishygiene bildet die Basis für erfolgreiche Behandlungen. Stehen für die Instrumentenaufbereitung und Dokumentation aufeinander abgestimmte Systemlösungen zur Verfügung, wird der Praxisalltag erheblich erleichtert.

Dr. Mathias Topp/Duisburg

■ In unserer Praxis in Duisburg bieten wir das komplette Spektrum moderner Zahnheilkunde mit Rundumbetreuung unter Einsatz modernster Techniken, ohne dass der persönliche Aspekt zu kurz kommt. Wir nehmen die Hygiene in unserer Praxis sehr ernst, denn eine einwandfreie Instrumentenaufbereitung bildet die Grundlage für unsere Arbeit. Lange Zeit haben wir die Instrumente manuell aufbereitet. Dabei konnten allerdings auch Fehler auftreten, z.B. bei der Einhaltung der Einwirkzeit oder der Dosierkonzentration von Desinfektionsmitteln. Um solche Fehler zu vermeiden und nach RKI-Richtlinien arbeiten zu können, haben wir uns entschieden, zur maschinellen Aufbereitung zu wechseln.

Warum MELAtherm?

Weil wir bei der Instrumentenaufbereitung schon mit anderen Produkten von

MELAG sehr zufrieden waren, lag es nahe, auch den Thermodesinfektor MELAtherm von MELAG einzusetzen.

Der MELAtherm hat sehr kurze Programmlaufzeiten und verbraucht vergleichsweise wenig Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmittel – sogar weniger, als es bei der manuellen Aufbereitung der Fall ist. Alle Programmparameter werden automatisch überprüft, dadurch können die klassischen Fehlerquellen ausgeschlossen und immer sichere Ergebnisse erzielt werden. MELAtherm ist sehr leicht zu bedienen. Die Versorgung mit den Prozessmedien erfolgt aus den integrierten Behältern automatisch.

Durch die aktive Trocknungsfunktion können die Instrumente trocken entnommen und direkt weiterverwendet werden. Bei kritischen Instrumenten, die verpackt werden müssen, kommt unser Siegelgerät MELAseal 200 zum Einsatz.

Es versiegelt schnell und zuverlässig und ist validierbar. Sterilisiert werden unsere Instrumente im Vacuklav 40 B von MELAG. Die Programmlaufzeiten sind kurz und die Bedienung sehr einfach. Die Dokumentations-Software MELAtrace ermöglicht eine unkomplizierte, sichere und vollständige Dokumentation und Freigabe aller Prozessschritte, sodass wir immer nach RKI-Richtlinien arbeiten können und abgesichert sind.

Die Systemlösung war eine gute Wahl

Durch den Einsatz der Systemlösung von MELAG haben wir in unserer Praxis einen reibungslosen Workflow sichergestellt. Nicht nur bei der Aufbereitung und deren Einfluss auf unseren Alltag, sondern auch außerhalb der Praxis. Denn wenn es um Fragen, Wartungs-



Abb. 1



Abb. 2

▲ Abb. 1: Dr. Topp und sein Praxisteam. ▲ Abb. 2: Der Aufbereitungsraum mit dem Hygienesystem von MELAG.



Abb. 3



Abb. 4


▲ Abb. 3: Der MELAtherm passt gut in die Möbelzeile. ▲ Abb. 4: Die Software MELAtrace macht die Dokumentation einfach und unkompliziert.

arbeiten oder Ähnliches geht, müssen wir für alle Geräte nur auf einen Hersteller zugehen. Das erleichtert die Kommunikation und Auftragsabwicklungen ungemein, sodass mehr Zeit für das Wesentliche bleibt. ◀◀

>> KONTAKT

Dr. Mathias Topp
 Friedrich-Ebert-Str.25
 47179 Duisburg
 Tel.: 0203 491774
 Fax: 0203 491526
 E-Mail: praxis@dr-topp.de
 www.dr-topp.de

Die NEUHEIT von ALPRO

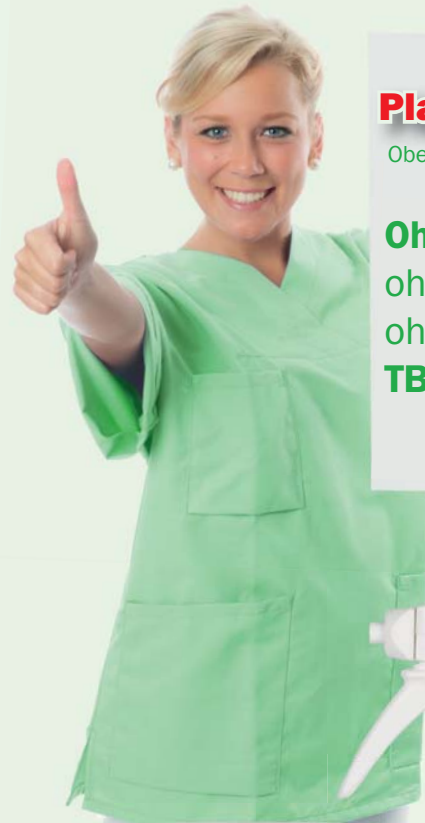

PlastiSept^{eco}
 Oberflächendesinfektion

**Ohne QAV,
 ohne Alkohol,
 ohne Aldehyde,
 TBC-wirksam**



ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstraße 9 • 78112 St. Georgen
 Tel. 0 77 25 93 92-0 • www.alpro-medical.de