



Instrumente für die Problemzonen Approximalbereich und Fissur



Abb. 1: Micro-/Bevel-Schallspitzen von Komet (hier exemplarisch die mesialen Versionen).

Abb. 2: Die Experten für Fissuren: H59, K59 und SF849. Abb. 3: SonicLine- und SonicLine Quick-Broschüre.

1. Indikation

Bei der Diagnostik entdeckt man oft Kleinstläsionen an den Approximal- oder in den Okklusalfächern. Vor welcher Problematik stand der Zahnarzt bisher?

Bei beginnender Karies sind bei herkömmlicher Arbeitsweise die Präparationen oft größer als nötig, im kritischen Approximalraum gehen sie mitunter sogar zulasten gesunder Nachbarzähne. Komet begegnete dem Thema schon früh mit rotierenden Instrumenten für die Mikropräparation (Set 4337 und 4383). Jetzt gibt es eine Lösung innerhalb der Schallspitzenfamilie SonicLine: die sogenannten Micro-Spitzen.

2. Micro-Spitzen

Wie arbeite ich im Approximalraum, ohne den Nachbarzahn zu beschädigen?

Mit den sechs neuen Micro-/Bevel-Spitzen stehen nun auch Schallspitzen für die minimalinvasive Therapie zur Verfügung, die mit ihrer oszillierenden Arbeitsweise nicht nur in der Kinderzahnheilkunde sehr beliebt sind. Mit ihren filigranen Arbeitsteilen sind sie für kleine, schwer zugängliche Läsionen konzipiert. Eine kleine (Größe 016) und große Halbkugel (Größe 024) stehen zur Auswahl. Alle Spitzen sind einseitig mit Diamantkorn belegt, sodass die Nachbarzähne geschont werden. Es stehen jeweils mesiale und distale Varianten zur Verfügung. Für eine ge-

zielte Abschrägung der Kavitätenränder im 45°-Winkel können zusätzlich die Bevel-Spitzen eingesetzt werden – das optimiert die Qualität der Präparation. Durch den Einsatz von Lupenbrille oder Behandlungsmikroskop werden die Voraussetzungen für eine minimalinvasive Versorgung von Kleinstläsionen zusätzlich verbessert.

3. Fissurenkaries

Mit welchen Instrumenten kann bei einer Hidden Caries bzw. einer Fissurenkaries vorsichtig vorgegangen werden?

Der H59.314.010 oder H59.313.010 (3 mm kürzerer FG-Schaft für schwer zugängliche Bereiche) ist zur Detektion versteckter Karies die erste Wahl. Diese Hartmetallinstrumente besitzen ein 2,5 mm langes Arbeitsteil mit schneidender Spitze, die gezielt in die Fissur eindringt. Optional gibt es den K59.314.010 aus der CeraLine, also ein Keramikinstrument. Sein extrem filigranes Arbeitsteil eignet sich bestens für das vorsichtige, minimalinvasive Aufziehen von Fissuren. In den Praxen, in denen bereits mit Schallhandstück gearbeitet wird, bietet sich bei dieser Indikation auch eine Schallspitze an: die SF849.000.009 aus der SonicLine. Sie besitzt ein spitzes, diamantiertes Arbeitsteil und hat eine relativ geringe Schwingungsamplitude. Die minimalinvasivste Lösung im Vergleich zu jedem rotierenden Instrument!

4. Quick-Variante

In welchem Handstück sind die Schallspitzen einsetzbar?

45 der mittlerweile über 70 Spitzen der SonicLine gibt es inzwischen auch als Quick-Version, also in der Version mit kürzerem Gewinde zum schnellen Einspannen. Dazu gehören auch die Micro-/Bevel-Schallspitzen, die nicht nur für das Komet Handstück SF1LM verfügbar sind, sondern auch für das Komet Quick Handstück SFQ2008L oder das SONICflex quick Schallhandstück (KaVo, Serie 2008/S/L/LS). Der zeitsparende Quick-Anschluss steht für Flexibilität und Komfort im Handumdrehen. Den kompletten Überblick bieten die SonicLine- und SonicLine Quick-Broschüre.



Infos zum Unternehmen

WWW.KOMETDENTAL.DE

“Ich kann meine Laborkosten um 50 % senken ohne dabei auf höchste Qualität und Seriosität zu verzichten”

Dr. Rafael Filpo

Lic. Nr. 47310. Abschluss der Zahnmedizin
an der Universität Santiago

Liebe Kollegen, in Zeiten wo eine intensive Kostenkontrolle uns zum Erreichen der angestrebten Ziele zwingt möchte ich Ihnen ein komplett neues Labor-Konzept vorstellen.
Dental Lab! Eine einzigartige Entdeckung.

Seit über einem Jahr arbeite ich mit Ihnen zusammen und das Ergebnis ist einfach ausgezeichnet. Ich kann meinen Patienten **höchste Qualität zu weit unter den üblichen Marktpreisen anbieten**. Einsparungen von 50 % sind keine Seltenheit.

Haben Sie weitere Fragen oder wollen mehr darüber wissen?
Ich kann Ihnen eine Kontaktaufnahme nur empfehlen.


DENTAL
Lab

ITALIEN • FRANKREICH • SPANIEN
PORTUGAL • DEUTSCHLAND

Tel. 0049 3030807947

e-mail: info@dental-lab.fr

www.dental-lab.fr

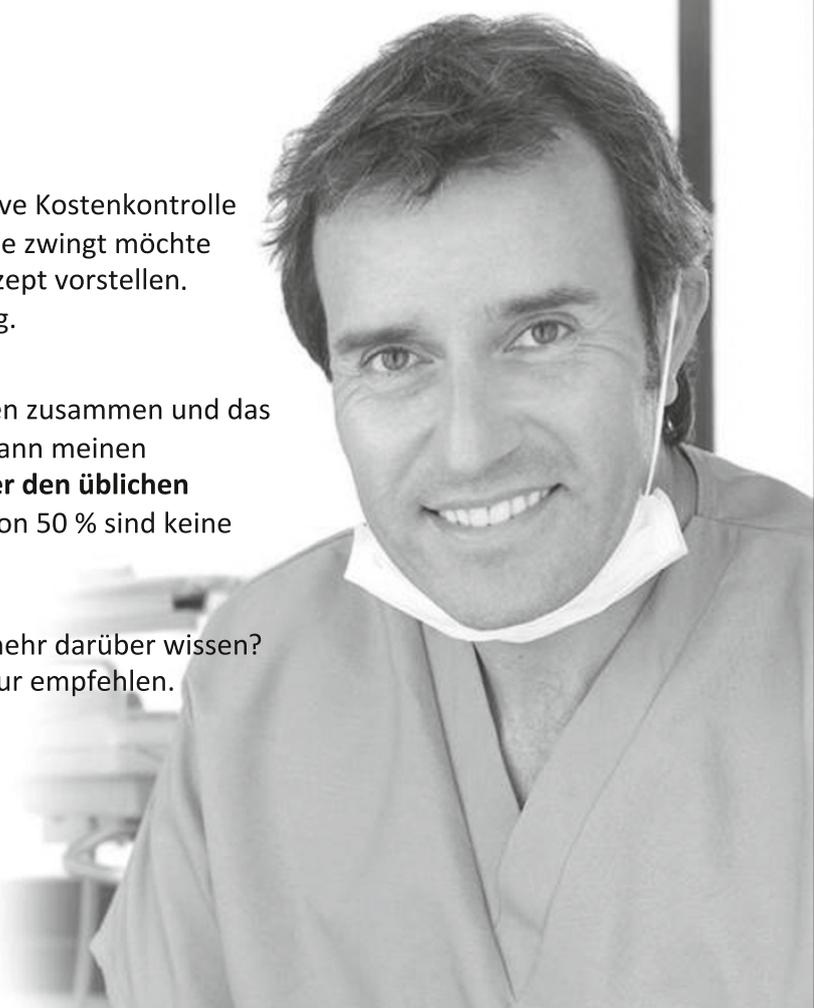

Porzellankrone.....	€ 89
8-teiliges Skelett.....	€ 190
Komplette Acrylat Zahnprothese (sup. oder inf.)	€ 196
Zirkoniumkrone.....	€ 120

Nutzen Sie dieses einmalige Angebot !

Aufgrund der starken Nachfrage an unser Labor bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2016
Ihren ersten Auftrag kostenfrei an

100 % GRATIS !!!

Desweiteren garantieren wir Kunden die vor dem 31.12.2017
bestellen die Preise unverändert bis Ende Jahr