


GUIDED BIOFILM THERAPY

KARIES-UND PARODONTITIS-PRÄVENTION

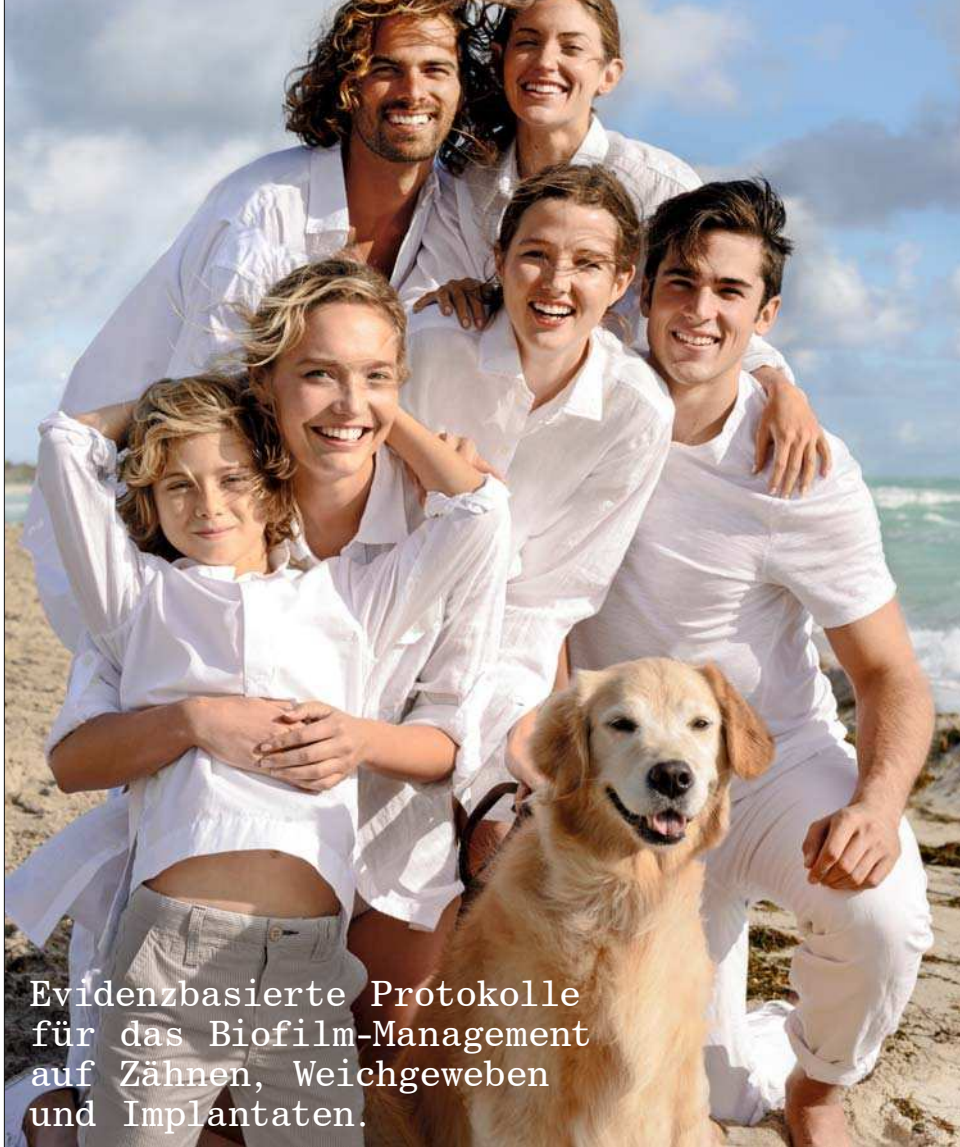

Evidenzbasierte Protokolle für das Biofilm-Management auf Zähnen, Weichgeweben und Implantaten.

DAS ORIGINAL. GENIAL. THE GAME CHANGER



Das Original vom Erfinder. Garantierte Schweizer Präzision und unvergleichliches Design. Zuverlässigkeit und Know-How seit 1981.


DIE 8 SCHRITTE DES GBT PROTOKOLLS

08 RECALL
GESUNDER PATIENT = GLÜCKLICHER PATIENT
Bestellen Sie Ihren Patienten risiko-abhängig zum Recall
► Fragen Sie, wie ihm oder ihr die Behandlung gefallen hat

07 CONTROL
PATIENTEN ZUM STRAHLEN BRINGEN
Prüfen Sie abschließend, ob der Biofilm vollständig entfernt wurde ► Wurden Zahnstein und Konkrement vollständig entfernt?
► Untersuchen Sie Zähne auf kariöse Läsionen ► Schützen Sie die Zähne mit Fluorid

06 PIEZON®
VERBLEIBENDEN ZAHNSTEIN ENTFERNEN
Verwenden Sie supragingival und bis zu 10 mm subgingival das minimal-invasive EMS PS Instrument ► Reinigen Sie Taschen >10 mm mit einer Minikurette ► Verwenden Sie um Implantate und implantat-getragene Restaurationen das EMS PI Instrument

05 PERIOFLOW®
BIOFILM ENTFERNEN IN TASCHEN >4 BIS 9 MM
Natürliche Zähne und Implantate, verwenden Sie PLUS Pulver
► Entfernen Sie den Biofilm auch interdental ► Verwenden Sie die tiefenmarkierten PERIOFLOW® Düsen

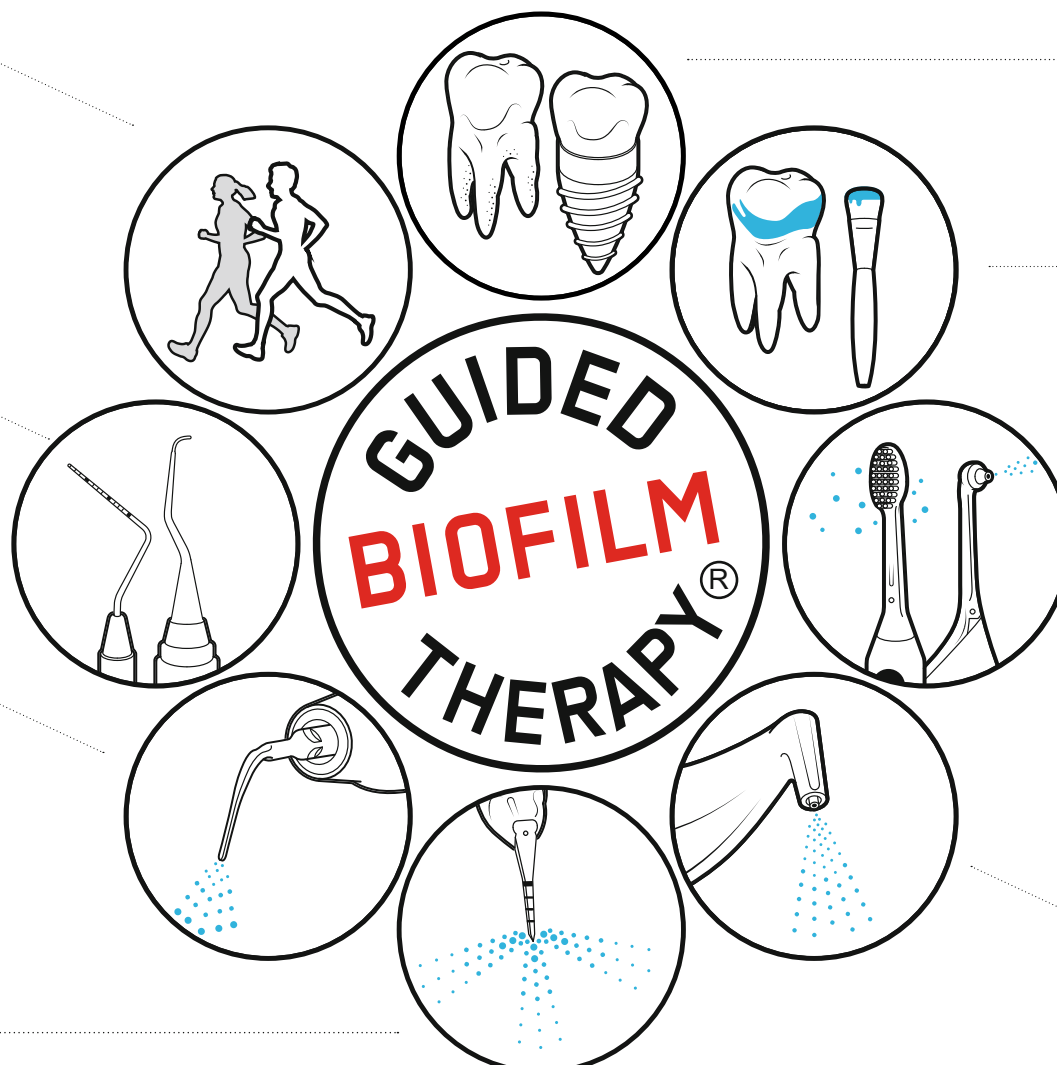

01 DIAGNOSE
BEFINDERHEBUNG BEI JEDEM PATIENTEN
► Gesunde Zähne, Karies, Gingivitis, Parodontitis
► Gesunde periimplantäre Gewebe, Mukositis, Peri-Implantitis ► Patient zuerst mit BacterX spülen lassen

02 DISCLOSE
ANFÄRBN UND BIOFILM SICHTBAR MACHEN
► Zeigen Sie Ihrem Patienten den angefärbten Biofilm
► Die Farbe steuert die Biofilm-Entfernung ► Ohne Biofilm ist Zahnstein leichter erkennbar

03 MOTIVATE
INSTRUIEREN UND MOTIVIEREN
► Prävention ist wichtig!
► Lehren Sie geeignete Mundhygiene ► Empfehlen Sie Philips Sonicare und ► Interdentalbürsten, oder Philips AirFloss Ultra

04 AIRFLOW®
BIOFILM, VERFÄRBUNGEN UND JUNGEN ZAHNSTEIN ENTFERNEN
► Natürliche Zähne, Restaurationen und Implantate
► Entfernen Sie supra- und subgingivalen Biofilm mit PLUS Pulver ► Entfernen Sie restliche Schmelz-Verfärbungen mit CLASSIC COMFORT Pulver ► Entfernen Sie Biofilm auch von Gingiva, Zunge und Gaumen