

## Schonendes und effizientes Scaling

**INTERVIEW** Gesunde und schöne Zähne bedürfen einer gründlichen Pflege. Daher ist es wichtig, in regelmäßigen Abständen eine professionelle Zahnreinigung vornehmen zu lassen. Karies und Erkrankungen des Zahnfleisches und Zahnhalteapparates können so frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Ziel muss eine entspannte Prophylaxe-anwendung sein, die sich den Bedürfnissen von Patient und Anwender optimal anpasst. W&H bietet mit dem Tigon+ ein Gerät, das sich durch seine hohe Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit auszeichnet. Das erweiterte Spitzensortiment von W&H unterstützt zudem eine substanzschonende Arbeitsweise.

Dentalhygienikerin Maria Semmler ist in der Zahnarztpraxis von Dr. Torsten Conrad in Bingen am Rhein tätig. In der oralchirurgischen Praxis mit den Schwerpunkten Parodontologie, Implantologie und Weichgewebechirurgie betreut das siebenköpfige Team rund 25 Patienten pro Tag. Maria Semmler behandelt täglich bis zu acht Prophylaxepatienten und schätzt die Eigenschaften des W&H Piezo Scalers. In einem Interview schildert sie ihre Erfahrungen mit dem Tigon+.



Der W&H Piezo Scaler Tigon+ erleichtert die täglichen Arbeitsprozesse um ein Vielfaches und ermöglicht ein schonendes, aber auch kraftvolles Arbeiten zugleich.



Maria Semmler, Dentalhygienikerin in der Zahnarztpraxis von Dr. Torsten Conrad in Bingen am Rhein.

**Frau Semmler, ein umfangreiches und durchdachtes Prophylaxeangebot ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal moderner Zahnarztpraxen. Wie hat sich Ihres Erachtens der Stellenwert der Prophylaxe bei den Patienten in den letzten Jahren verändert?**

Das Bewusstsein der Patienten für eine professionelle Zahnreinigung ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Grund dafür ist die verstärkte Aufklärung sowohl in den Zahnarztpraxen als auch durch die Medien, in denen das Thema Prophylaxe immer häufiger angesprochen wird. Die Nachfrage an Prophylaxebehandlungen ist auch in unserer Praxis gestiegen. Viele Patienten haben bereits eine private Zusatzversicherung abgeschlossen, um die Kosten einer Prophylaxebehandlung abzudecken, und lassen mindestens einmal jährlich eine professionelle Zahnreinigung durchführen.

**Sie arbeiten mit dem Piezo Scaler Tigon+ von W&H. Welche Vorteile in der Anwendung sehen Sie persönlich?**

Den größten Vorteil bietet für mich das Handstück mit dem 5-fach LED-Ring. Besonders im hinteren Molarenbereich ist die Behandlungsfläche schwer einsehbar, und wenn man, so wie ich, alleine arbeitet, muss man die Behandlung immer wieder unterbrechen, um das Behandlungsfeld mit der OP-Lampe neu auszuleuchten. Mit dem LED-Ring am Handstück des Tigon+ wird die Behandlungsstelle gleichmäßig ausgeleuchtet und ich profitiere in jeder Anwendungssituation von besten Lichtverhältnissen. Ein weiterer Vorteil ist das Lichtsignal, das auf einen niedrigen Flüssigkeitsstand im Kühlmittelkanal hinweist. Bei bisherigen Einheiten habe ich das oft erst sehr spät bemerkt und die Spitze wurde



Mit dem erweiterten Parospitzenortiment von W&H steht den Anwendern ein optimiertes Instrumentarium für die moderne Parodontalbehandlung zur Verfügung.

innerhalb kürzester Zeit sehr heiß. Mit dem Tigon+ kann ich mich nun voll und ganz auf den Patienten konzentrieren und werde dank des Lichtsignals frühzeitig auf einen niedrigen Flüssigkeitsstand aufmerksam gemacht. Ein besonderes Plus ist auch das W&H Spitzensortiment, das perfekt auf das jeweilige Anwendungsgebiet abgestimmt ist. Besonders die sehr feinen Spitzen erleichtern meinen Arbeitsalltag um ein Vielfaches. Ich kann nun gezielt unter dem Kronenrand reinigen, ohne dabei die Keramikverblendung zu beschädigen. Mit den feinen Spitzen von W&H gelange ich auch bei Zahnengstand in die Interdentalräume. Mit bisherigen Spitzen war das nicht möglich und ich musste häufig mit dem Handinstrument nacharbeiten.

**Welche Patientenreaktionen konnten Sie bisher beobachten?**

Viele Patienten reagieren auf hohe Töne sehr sensibel. Die Behandlungsstelle während einer professionellen Zahnreinigung liegt in der Nähe des Hörkanals und die Geräusche eines Piezo Scalers werden von den Patienten häufig als sehr unangenehm wahrgenommen. Mehrmals musste ich die Behandlung deshalb sogar abbrechen. Bei Behandlungen mit dem Tigon+ hingegen empfinden die Patienten die Töne als angenehmer und die gesamte Behandlung als weniger schmerzhaft.

Auch die temperierte Flüssigkeit wird von den Patienten besonders geschätzt, da sie eine Reizung empfindlicher Zähne verhindert.

**Wie bewerten Sie das Bedienkonzept des Tigon+?**

Mit dem Tigon+ kann ich mir mein eigenes Konzept erstellen, das ganz individuell auf meine Bedürfnisse und meine Art zu Arbeiten angepasst ist. Die Bedienung des Tigon+ ist einfach und unkompliziert, mit nur einem Knopfdruck kann ich während der Behandlung das Programm wechseln. Das ermöglicht es mir, die Durchflussmenge des Kühlmittels und die Leistungstärke auch während der Behandlung ganz einfach und ohne Unterbrechungen zu wechseln. Das Bedienkonzept des Tigon+ unterstützt einen flüssigen sowie effizienten Arbeitsablauf und spart wertvolle Handgriffe.

**Im Herbst 2016 hat W&H neue Parospitzen am Markt eingeführt. Mit welchen dieser neuen Spitzen arbeiten Sie besonders gerne?**

Bei normalen Prophylaxepatienten arbeite ich fast ausschließlich mit der Spitze 1P, weil sie vielseitig einsetzbar ist. Dank ihrer dünnen und langen Spitze gelangt man damit in jede Ecke speziell auch im Interdentalraum. Die gebogenen Spitzen 3Pr und 3PI verwende ich zum Beispiel bei paro-

# Kluge Konzepte als Garant für mehr Gewinn.

Consulting im Dentalbereich

- ✓ Existenzgründung
- ✓ Unternehmensentwicklung
- ✓ Praxisabgabe
- ✓ Praxiscoaching
- ✓ Abrechnungsmanagement
- ✓ Fördermittel



**Erfolg ist planbar!**

[www.dentaqum.de](http://www.dentaqum.de)  
Tel: 089 59 06 80 59

**dentaqum**  
CONSULT



Die hochwertigen Spitzen lassen sich mit dem W&H Spitzenwechsler mit integrierter Drehmomentkontrolle, um ein Überdrehen zu vermeiden, problemlos einsetzen und abnehmen.



Das Handstück mit dem 5-fach Ring-LED sorgt für eine stets optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle und ermöglicht eine verbesserte optische Wahrnehmung, eine exakte Wiedergabe der Zahnfarbe und ein Kontrastsehen wie bei Tageslichtqualität.



Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler entwickelt, der seinesgleichen sucht: Die temperierte Flüssigkeit schonert empfindliche Zähne, drei Modi garantieren eine absolut sichere Behandlung und mit den fünf voreingestellten Programmen arbeiten Sie jetzt noch effizienter.

dontalen Vorbehandlungen, wenn ich mehr Zeit für die Behandlung habe. Sie ermöglichen mir eine optimale Reinigung selbst bei schwer zugänglichen Zahnflächen.

**Gibt es eine Lieblingsspitze für die Prophylaxe?**

Meine Lieblingsspitze ist die Spitze 1P, weil sie ein richtiges Allroundtalent ist. Diese Spitze kann man überall einsetzen, egal ob subgingival oder supra-gingival. Die neuen Spitzen von W&H erleichtern meinen Arbeitsalltag enorm und ich muss nicht mehr so häufig mit dem Handinstrument nacharbeiten.

**Verraten Sie uns zum Schluss bitte noch Ihre persönliche Einschätzung des Tigon+ sowie des W&H Spitzen-sortiments?**

Der Tigon+ und das einfach zu bedienende Display ermöglichen mir ein individuelles Arbeiten. Ich kann mit nur einem Knopfdruck die Intensität und die Wasserzufuhr während der Behandlung perfekt regeln und an die verwendete Spitze anpassen. Wie bereits erwähnt, bedeutet die LED-Beleuchtung am Handstück des Tigon+ eine große Arbeitserleichterung. Das W&H Spitzen-sortiment ist perfekt auf das Gerät abgestimmt. Damit kann ich meinen Patienten eine schonende Behandlung bieten und gleichzeitig beste Arbeitsergebnisse erzielen. Ich bin mit dem Tigon+ von W&H sehr zufrieden und er ist ein fester Bestandteil meines Praxisalltags.

Frau Semmler, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.



W&H Deutschland GmbH  
Infos zum Unternehmen

## INFORMATION

**Dentalhygienikerin Maria Semmler**  
Zahnarztpraxis Dr. Torsten Conrad  
Heinrichstraße 10  
55411 Bingen  
Tel.: 06721 991070  
praxis@dr-conrad.de  
www.dr-conrad.de