

Welcher Feilentyp sind Sie?

Die Wurzelkanalaufbereitung ist das Herzstück jeder endodontischen Behandlung. Welche Feile dabei zum Einsatz kommt, ist reine Geschmacksache des Behandlers. Aber was unterscheidet Feilensysteme wie F360, F6 SkyTaper oder R6 ReziFlow voneinander und welches System passt am besten zur persönlichen Arbeitsweise? Eine klare Differenzierung hat nur ein Ziel: den Spaß an der Endo zu wecken bzw. weiter zu optimieren.

Autorin: Dorothee Holsten

Komet hat sich in den vergangenen Jahren im Endo-Markt durch sein dentales Know-how mehr als etabliert. Dafür wurde intensiv geforscht und entwickelt, das Portfolio und der Service Stück für Stück aufgebaut und optimal den Bedürfnissen des Marktes angepasst. Dieser Qualitätsanspruch erstreckt sich vom Anlegen der Zugangskavität über den Opener, PathGlider, die Feilensysteme F360, F6 SkyTaper und R6 ReziFlow bis hin zur postendodontischen Versorgung. Komet ist Endo – und darin richtig stark, mit eigenem Image und gezielter Kundenansprache. Die Präzision und Einfachheit der Instrumente überzeugt den spezialisierten Endodontologen genauso wie den Allgemeinzahnarzt, ja sogar die Zahnärzte, die die Endo in der Vergangenheit eher scheuten. Das spricht für eine beeindruckende Sicherheit der Produkte und den

professionellen Service drumherum. Kompetente Fachberatung und das beliebte EndoFIT Kursprogramm lassen keine Fragen im endodontischen Praxisalltag mehr offen. Nur eine Frage darf sich der Zahnarzt noch stellen: Welcher Feilentyp bin ich eigentlich? Die Antwort lautet: Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Vielmehr geht es um ganz persönliche Faktoren wie klinische Erfahrung und individuelle Vorlieben, wie z. B. die Frage nach der Wurzelfüllung, Spültechnik und dem Zeitaufwand. Das zeigen die folgenden Porträts der Feilensysteme F360, F6 SkyTaper und R6 ReziFlow. Ganz dezidiert steht jedes Feilensystem für sich – stark und sicher in der Anwendung.


F360: einfach und sicher

Mit dem 2-Feilen-System aus NiTi kann ein Großteil der Wurzelkanäle einfach und effizient aufbereitet werden. Die beiden F360-Feilen werden rotierend auf voller Arbeitslänge eingesetzt. Durch die sehr gute Schneidleistung der Instrumente (dank eines flexiblen Doppel-S-Querschnitts) ist die Abstufung der Instrumentengrößen in Zehnerschritten (025, 035, 045 und 055) ohne Probleme möglich und erlaubt eine vorsichtige und schonende Aufbereitung. Dank des schlanken Tapers .04 sind die Feilen sehr flexibel und passen sich jeder Kanal Anatomie optimal an. Nach der Aufbereitung mit F360 bietet sich die Obturation mittels Einstifttechnik an. ZA Robert Gorgolewski (Lüneburg) beschreibt, warum er ein F360-Fan geworden ist: *„Ich als ‚Rotierer‘ bevorzuge kleinere Taper – die rate ich übrigens auch allen Einsteigern. Durch den Taper .04 ist die F360-Feile extrem flexibel und eignet sich wunderbar für gebogene und enge Kanäle. Die „Single-use“-Anwendung und der große Spanraum unterstützen zudem die Fraktursicherheit. Das gibt mir Sicherheit und macht F360 zum Feilensystem meiner Wahl.“*

F6 SkyTaper für den Endo-Erfahrenen

Das lückenlose 1-Feilen-System F6 SkyTaper in fünf unterschiedlichen Größen und drei Längen passt für nahezu jede Kanal Anatomie. Das rotierende Feilensystem mit effizientem Doppel-S-Querschnitt sorgt für eine hohe Reinigungsleistung unter gleichzeitiger Einhaltung des



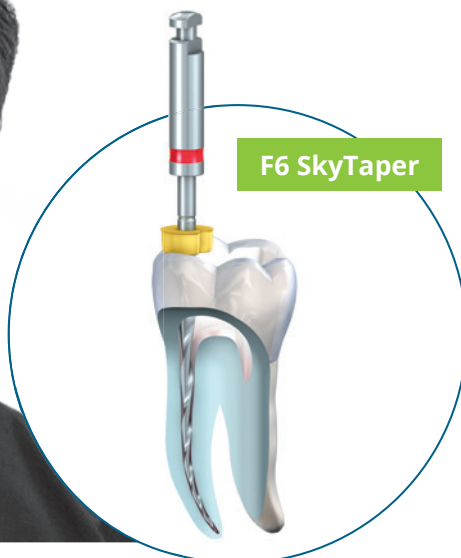

handlung erfolgreich abzuschließen. Das System hat mich wirklich überzeugt, ich kann es nur jedem Kollegen weiterempfehlen.“ Der auf die Instrumentengröße abgestimmte, konstante Taper bietet beste Voraussetzungen für eine schonende Aufbereitung, effiziente Spülung und homogene Abfüllung. R6-ReziFlow gibt es in den sechs Feilengrößen 025–050 und in den drei Längen L21/L25/L31. Diese breite Aufstellung gibt dem Anwender die Sicherheit, alle klinischen Fälle abdecken zu können.

Sie haben die Wahl

Alle drei Feilensysteme stehen für das, was sich ein Zahnarzt für einen sicheren, effizienten und unkomplizierten Endo-Alltag auf höchstem Niveau wünscht. Den perfekten Überblick über das gesamte Endo-Sortiment von Komet verschafft auch die Micropage www.ich-bin-endo.de. Ansonsten stehen sämtliche Kommunikationskanäle für eine Kontaktaufnahme zur Verfügung: Persönliche Komet-Fachberater betreuen bundesweit individuell und umfassend. Wer die zeitliche Unabhängigkeit liebt, für den steht der Online-Shop rund um die Uhr offen. Und wer noch eine Frage hat, kann gerne zum Telefon greifen. Unter 05261 701-700 werden die Anliegen – Bestellung, Fragen zum Produkt, System oder Kurs – garantiert beantwortet. Egal also, ob persönlich, online oder per Telefon – bei Komet wird immer kompetent beraten.

originären Kanalverlaufs. Für endodontisch tätige Kollegen, die eher eine warme dreidimensionale Obturation des Kanalsystems anstreben, wird das Kanalsystem durch den Taper .06 optimal für diese vorbereitet. Der F6 SkyTaper gehört besser in geübte Hände wie die von Dr. Günther Stöckl (Rottenburg): „Die Schnittfreudigkeit der Instrumente verkürzt die mechanische Aufbereitungszeit. Durch den Taper .06 ist das Kanalsystem hervorragend für die aktivierte chemische Desinfektion vorbereitet. Zudem erlaubt der größere Taper eine einfachere warme dreidimensionale Obturation des Kanalsystems.“

Arbeitsgefühl folgendermaßen: „Komet verwendet in der R6 ReziFlow-Broschüre den Begriff ‚Sanftheit‘. Ich würde es einmal folgendermaßen formulieren: Die reziproke Arbeitsweise der R6-Feile lässt kein Einschrauben zu, das gibt dem Anwender während der gesamten Behandlungszeit das Gefühl von Sicherheit. Gleichzeitig liefert der konstante Taper .06 besonders im Spitzenbereich in den kleinen ISO-Größen relativ viel Flexibilität. Liegen also stark gekrümmte Kanalsysteme vor, ist R6 ReziFlow das Feilensystem der Wahl, um kontrolliert zu arbeiten, die Bruchgefahr zu verringern und die endodontische Be-

R6 ReziFlow: ganz sanft

Wer grundsätzlich die reziproke Aufbereitungsweise favorisiert, wird mit dem Instrumentendesign von R6 ReziFlow erleben, wie sanft ein System mit nur wenigen Windungen arbeiten kann. ZA Nils Widera (Leipzig) beschreibt das



KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
 Trophagener Weg 25
 32657 Lemgo
 Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de