

**ZAHNTECHNISCHE GERÄTE** // Das Familienunternehmen W&H besitzt eine jahrzehntelange Erfahrung als Anbieter zahntechnischer Präzisionsgeräte und begann bereits 1926 mit der Herstellung von Handstücken für Zahntechniker. Entwicklung, Produktion und Service aller Laborgeräte finden auch heute noch in Salzburg statt. Mit den Perfecta-Modellen hat W&H Geräte entwickelt, mit denen sich Zahntechniker im Labor voll und ganz verwirklichen können.

## FÜR JEDEN ANWENDERTYP DAS PASSENDE GERÄT

Christin Bunn/Leipzig



**Abb.1:** Die Perfecta-Modellreihe von W&H überzeugt durch intuitive Bedienung und ergonomische Vorteile – und bildet mit Tisch-, Fuß- und Kniegeräten ein breites Ensemble für die Arbeit im Dentallabor.

Die Perfecta-Modellreihe bringt eine absolute Weltneuheit mit sich: Sowohl das Motorhandstück als auch das Schnellläuferhandstück besitzen eine integrierte Ausblasfunktion. Sie erspart dem Anwender den ständigen Griff zur Luftpistole – und somit jede Menge Zeit. Die ergonomische Form der Handstücke sorgt dabei für eine angenehme Handhabung. Es treten auch bei längerem Arbeiten kaum Ermüdungserscheinungen auf.

Mit beiden Handstücken arbeitet der Anwender materialschonend und zudem enorm leistungsstark. Beim Motorhandstück stehen auch bei herausfordernden

Arbeiten genügend Leistungsreserven zur Verfügung. Das Schnellläuferhandstück besitzt eine bis zu zehn Mal höhere Durchzugskraft als eine Luftturbine und ist somit für die Bearbeitung keramischer Materialien sehr gut geeignet. Das spezielle 3-fach-Spray schützt dabei vor Mikrorissen und garantiert eine hochwertige Kühlung in jeder Lage.

Bei der Perfecta 900 kann der Zahntechniker neben dem Schnellläuferhandstück wahlweise auch das Motorhandstück im Set\* anschließen und somit alle Materialien mit nur einem Gerät bearbeiten.

### Alles im Blick

Alle Perfecta-Modelle gibt es mit einem unkomplizierten Bedienelement, das separat vom Hauptgerät platzierbar ist und den Arbeitsplatz aufgeräumt hält. Mit ihm steuert der Anwender alle Funktionen und wechselt bei der Perfecta 900 zwischen den beiden Handstücken. Zusätzlich lassen sich mit dem Bedienelement die beiden Automatikprogramme steuern: Im „Bistabil“-Modus startet das Gerät automatisch mit der eingestellten Drehzahl. Im Modus „Tempomat“ wird die aktuell geregelte Drehzahl nach zwei

# Top 5 Gründe für den CS 3600 Intraoralscanner



**1** Schnell und einfach scannen



**2** Integration in Praxismanagement Software



**3** Präzise und genau



**4** Offene .STL und .PLY Daten



**5** Keine Lizenz-Kosten



© W&H

## Produktinfo-Übersicht

Perfecta 300	mit Motorhandstück 5,5Ncm und externem Bedienelement
Perfecta 600	mit Motorhandstück 7,8Ncm, externem Bedienelement und integrierter Ausblasfunktion
Perfecta 900	mit Schnellläuferhandstück 0,7Ncm, externem Bedienelement und integrierter Ausblasfunktion
Perfecta 900 Set*	mit Schnellläuferhandstück 0,7Ncm und Motorhandstück 7,8Ncm, externem Bedienelement und integrierter Ausblasfunktion

Sekunden automatisch gespeichert und gehalten.

Für eine noch individuellere Bedienung sind die Perfecta-Modelle wahlweise als Tischgerät, Kniegerät oder Fußgerät (nur für Perfecta 300 und 600) erhältlich.

## Umfangreiches Zubehör

W&H hat in den letzten Jahren auch ein umfangreiches Zubehör-Sortiment für die Perfecta-Modelle entwickelt: Mit dem Fräsgerät-Adapter können Anwender das Schnellläuferhandstück in beinahe jedes Fräsgerät einspannen und präzise gefräste Konstruktionen erstellen. Mit dem Technikhandstück 945 sind auch in der Praxis rasch und effizient Korrekturen, Anpassungen und Nachbearbeitungen von Zahnprothesen und Zahnregulierungs-

apparaten möglich. Eine verstellbare Halterung, mit der man das Bedienelement flexibel positionieren kann, und eine Handstückablage (inklusive Reinigungs- und Werkzeugset) runden das Zubehörsortiment ab.

\* Das Perfecta 900 Set mit beiden Handstücken ist kein eigener Verkaufsartikel. Hier muss das Motorhandstück und das dazugehörige Kabel mitbestellt werden.

## W&H DEUTSCHLAND GMBH

Raiffeisenstraße 3b  
83410 Laufen  
Tel.: 08682 8967-0  
Fax: 08682 8967-11  
office.de@wh.com  
www.wh.com

Jetzt Demo anfragen:  
[http://go.carestreamdental.com/CS\\_3600](http://go.carestreamdental.com/CS_3600)

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns: [deutschland@cspdental.com](mailto:deutschland@cspdental.com)  
Tel: 0711-2090 8111

