

## Darum werden es Ihre Patienten LIEBEN.


- Dank der firmeneigenen fortschrittlichen Technologie bemerken Patienten bereits nach **5-10 Tagen eine sichtbare Aufhellung**
- Die sichere und stabile Konzentration von **15 % Carbamid-Peroxid** ermöglicht wunderschöne Ergebnisse mit **minimaler Sensibilität**
- Signifikant **kürzere Behandlungszeit** als bei konventionellen Bleachingverfahren/-systemen
- Die aktiven Aufhellungswirkstoffe sind in den Streifen eingebettet und erfordern **keine Schienen und Gele**



- Dank der **Comfort-Fit-Technologie** haften die Streifen an den Zähnen und passen sich ihnen präzise an

## So funktioniert Daring White™ Befolgen Sie diese einfache Schritte:


- 1 Prüfen Sie, ob der Patient für eine Zahnaufhellung geeignet ist
- 2 Prüfen Sie die aktuelle Zahnfarbe mit einem Farbschlüssel und vermerken Sie diese in der Patientenakte.
- 3 Erklären Sie dem Patienten, dass bis zu dem Behandlungsende mehrere Farbveränderungen auftreten können.
- 4 Setzen Sie den ersten Streifen in der Praxis ein. Lassen Sie den Patienten den Streifen ein bis zwei Stunden lang tragen.
- 5 Geben Sie dem Patienten die übrigen Streifen für die Verwendung zu Hause in den nächsten 5-10 Tagen mit, je nach Anzahl der Streifen in der Packung.

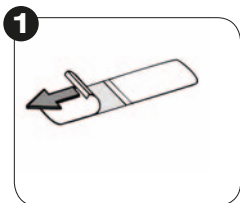

Die aufhellende Seite der Folie zeigt NACH OBEN. Die Folie am Ende greifen und wie abgebildet entnehmen.



Die Folie zentrieren und am Zahnfleischrand auf die Zähne legen.

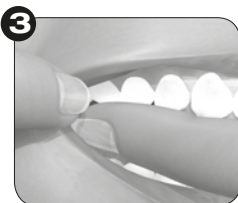

Die Wange zur Seite schieben und die Folie auf die Backenzähne aufbringen.



Die Wange beiseite ziehen und die Folie auf die hinteren Zähne drücken.



Tragezeit:  
1 – 2 Stunden



Zum Entfernen eine Ecke greifen und von der Vorderseite der Zähne abziehen, danach die Folie von der Zahnrückseite wegschieben.



Verbleibendes Gel durch Putzen oder Ausspülen entfernen. Durch den Ausguss entsorgen.

## Bestellbare Produkte mit natürlichem Minzgeschmack:

Artikel	Beschreibung	Anzahl der Patientenbehandl.	Anwendung	Preis
DWK03	Daring White™ Einführungs-Kit mit 3 Packungen für 10 tägige Behandlungen	3	Vollständige Aufhellungsbehandlung (10 Tage)	€ 210,00*
DWK01	Daring White™ Einführungs-Kit mit 6 Packungen für 5 tägige Behandlungen	6	Auffrischungsbehandlung (5 Tage)	€ 210,00*



DWK03

Holen Sie sich jetzt Ihre Probepackung Halle 10.1 Stand G068 und überzeugen Sie sich selber!

**Garrison**  
Dental Solutions

Tel.: +49 2451 971 409  
Fax: +49 2451 971 410  
info@garrisdental.net  
www.daringwhite.com



Besuchen Sie uns auf der IDS Halle 10.1 Stand G068 Halle 11.1 Stand G019

\*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB. © 2019 Garrison Dental Solutions, LLC