

# Lebensqualität durch Prophylaxe – Patientenbindung 60 plus

**HERSTELLERINFORMATION** Auf der diesjährigen IDS wurde von W&H mit Proxeo Aura ein wahrer Alleskönner im Bereich der Pulverstrahlbehandlung eingeführt. Seit Juli ist das talentierte Handstück erhältlich. Egal, ob klassische PZR, Parodontaltherapie, Periimplantitisprävention und -behandlung oder Biofilmmangement: Das neue System eignet sich gleichermaßen für supra- als auch subgingivale Indikationen. Und macht den österreichischen Dentalproduktehersteller zum Komplettanbieter in der Prophylaxe.

Mit dem neuen Proxeo Aura Pulverstrahlsystem werden supra- und subgingivale Indikationen effizient, kontrolliert und gründlich durchgeführt.



## Pulverstrahlsystem Proxeo die Vorteile im Überblick

- Praktischer Einstellring für einfaches Wechseln zwischen Prophy- und Parobehandlungen
- Drei verschiedene Pulver für eine Vielzahl von Indikationen
- Optimal gebündelter Pulverstrahl für ein kontrolliertes Spraybild und weniger Pulveremission
- Sprayaufsätze mit verschiedenen Winkeln und Längen für beste Erreichbarkeit
- Spezielles Parozubehör für die gründliche Behandlung von tiefen Taschen
- Transparente Pulverkammer mit seitlicher Öffnung für bequemes Nachfüllen und einfache Kontrolle der Pulvermenge
- Unterschiedliche Turbinenanschlüsse – für jede Einheit geeignet

Für die zahnärztliche Praxis haben Best Ager enormes Potenzial, schließlich stellen sie eine gleichermaßen anspruchsvolle, zuverlässige, verbindliche und meist vielseitig interessierte sowie gut informierte Zielgruppe dar. Der Wunsch nach Vorsorge und Gesundheit ist kennzeichnend, auch gutes Aussehen ist ihnen wichtig. Dies wiederum bedeutet, dass sich Best Ager oftmals für Behandlungen entscheiden, die Privatleistung sind. Nicht nur mit Blick auf eine höhere Anfälligkeit für Parodontitis und Karies oder möglicherweise eingeschränkter Motorik ist die Generation 60 plus daher das ideale Patientenklientel für hochqualitative Prophylaxe, sondern insbesondere auch aufgrund des sich wandelnden Ästhetikbewusstseins.

Best Ager wünschen sich heute schöne und gesunde Zähne. Auch für das Praxisteam ist dies das höchste Ziel, erreichbar durch eine regelmäßige und vor allem risikoorientierte Prophylaxe. Erfolgreiches Biofilmmangement ist demnach der stetige Kampf zwischen Prävention, Desinfektion, Reinigung und Reinfektion. Individuell soll die Behandlung sein, maximal schonend und möglichst komfortabel – für Anwender und Patient. Neben einer entsprechenden Qualifikation und regelmäßigen Weiterbildung der Prophylaxefachkräfte hat folglich auch die Praxisausstattung einen hohen Stellenwert für den Behandlungserfolg und das beidseitige Wohlbefinden.

### Im Dschungel der Möglichkeiten ...

... bedeutet das vor allem, den Überblick nicht zu verlieren. Da gäbe es Standgeräte versus Pulverstrahlhandgeräte. Pulverstrahlgeräte, die mit Pulver und Druckluft arbeiten. Geräte, die Pulver und Ultraschall nutzen. Geräte für die ausschließliche Anwendung von Paropulver.

Eine clevere All-in-one-Lösung ist Proxeo Aura. Das Pulverstrahlsystem entfernt gleichermaßen weiche Beläge wie auch Verfärbungen, ohne das Handstück wechseln zu müssen. Pulver, Handstück und Sprayaufsätze sind ideal aufeinander abgestimmt und sorgen für eine gründliche sowie schonende Reinigung, supra- und subgingival. Auch ergonomisch trumpft das Handstück und ist angenehm leicht. Über die Schnellkupplung wird es ganz unkompliziert an die Behandlungseinheit angeschlossen und ist dadurch mobil nutzbar sowie in verschiedenen



Passend zur klinischen Indikation wird die Sprayintensität über den Einstellring geregelt.

PROPHY: für supragingivale Anwendung

PERIO: für subgingivale Anwendung

Grazil – fast wie eine Parosonde. Mit den sterilen, schmalen Parospitzen sanft arbeiten, selbst in tiefen Taschen.



Zimmern einsetzbar. Das Proxeo Aura Pulverstrahlhandstück ist mit Anschlüssen für W&H Roto Quick, KaVo Multiflex, NSK und Dentsply Sirona erhältlich.

#### Pulverstrahlen mit System

Insgesamt lässt sich das Pulverstrahl-system Proxeo in drei Anwendungsgebiete unterteilen. A) Supragingival. B) Supragingival, Sulkus und für subgingivale Taschen bis drei Millimeter Tiefe. C) Subgingivale Taschen größer als drei Millimeter Tiefe. Am Einstellring direkt am Handstück ist der jeweilige Arbeitsdruck zu wählen. PROPHY wird genutzt für effizientes Arbeiten im supragingivalen Bereich. PERIO für die schonende Behandlung mit Glyzinpulver im supra- und subgingivalen Bereich. Selbstverständlich bietet W&H auch insgesamt drei Pulver zur Auswahl sowie verschiedene Sprayaufsätze – je nach klinischer Indikation – an.

# Zu viele Warenkörbe?!



... oder **AERA**<sup>®</sup>  
einfach

Bei AERA-Online finden Sie die tagesaktuellen Angebote von mehr als 250 Lieferanten an einem Ort im direkten Preisvergleich und Sie können überall sofort bestellen.

Clevere Optimierungsmethoden helfen Ihnen dabei, die Bestellungen auf möglichst wenig Warenkörbe aufzuteilen. Kostenlos, unabhängig, bequem.

[www.aera-online.de](http://www.aera-online.de)

Der Pulverbehälter ist seitlich zu öffnen und kann bequem auf den Tisch gelegt werden, sodass das Handstück beim Nachfüllen nicht gehalten werden muss. Durch die Transparenz des Behälters ist auch die Pulvermenge immer perfekt zu sehen, Arbeitsabläufe gestalten sich reibungslos.

Hervorzuheben ist bei den Sprayaufsätzen die 360-Grad-Rotationsfunktion, welche es ermöglicht, den Aufsatz dynamisch an die Behandlungsposition anzupassen. Mit den speziellen Paro-Sprayaufsätzen und den 90 bzw. 120 Grad gewinkelten Sprayaufsätzen in zwei verschiedenen Längen sind Praxen auch für schwer zugängliche Stellen bestens gerüstet. Natürlich wurde bei der Produktentwicklung auch an effiziente Hygiene gedacht. Das Handstück kann einfach wischdesinfiziert werden, die abnehmbaren Sprayaufsätze sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.

### Prophylaxe-Komplettanbieter aus Überzeugung

Den hohen Stellenwert einer bestmöglichen Prophylaxe hat W&H unlängst erkannt. So lag es für den Hersteller von Qualitätsprodukten made in Austria in den letzten Jahren nahe, dieses Segment immer weiter auszubauen mit dem Ergebnis, sich seit 2019 als Prophylaxe-Komplettanbieter zu positionieren. Anwender schätzen das ganzheitliche Lösungssystem insbesondere aufgrund seiner Produktvielfalt und Anwendungstiefe – schließlich liegen die Vorteile von Systemanbietern versus bunter Single-Konfigurationen klar auf der Hand.

Das Motto „Proxeo – Prophy for Professionals“ steht stellvertretend für das, was W&H in seinem Portfolio für die maschinelle Belagentfernung bietet. Das Proxeo-System unterstützt dabei den kompletten präventiven Workflow auf Basis wissenschaftlicher Empfehlungen, für jeden Patienten und jede Indikation. Allen voran die im Herbst 2018 eingeführten Proxeo Ultra Piezo Scaler für die schonende supra- und subgingivale Entfernung von Belägen. Ergänzt werden diese durch die oben im Beitrag vorgestellte Pulverstrahlösung Proxeo Aura.

Bei Prophylaxebehandlung oder Parodontitisbehandlung können Praxen außerdem auf das kabellose Poliersystem Proxeo Twist zurückgreifen. Mit dem Twist Poliersystem arbeiten Anwender

vollkommen ohne Einschränkungen dank eines kabellosen Polierhandstücks und steuern dieses über die ebenfalls kabellose Fußsteuerung. Die Kombination aus Handstück und dazu passenden Prophy-Einwegwinkelstücken sorgt für besseren Zugang zur Behandlungsstelle. Selbst der hintere Molarenbereich ist gut zu erreichen.

### Fazit

Mit Proxeo Aura steht Praxen ab sofort ein zuverlässiges und dabei gleichzeitig universelles Gerät für alle Indikationsbereiche des Air Polishings zur Verfügung, das sich insbesondere auch für die Zielgruppe Best Ager ideal eignet. Die klinische Anwendung kann als komfortabel, sicher und schnell beschrieben werden, vorausgesetzt die Auseinandersetzung mit entsprechender Technologie ist praxisseitig gegeben sowie Übung in der korrekten Handhabung vorhanden. Egal, ob Einsteiger oder Praxis mit bereits guter Erfahrung – Proxeo Aura lässt die Anwendung ein Leichtes werden und erweist sich aufgrund der Vielzahl herausragender Produkteigenschaften als unverzichtbarer Begleiter in der modernen Prophylaxe.

Als integraler Bestandteil der maschinellen Belagentfernung ist das neue Pulverstrahlhandstück außerdem als

wichtige Komponente im W&H-Prophylaxe-Gesamtsystem zu betrachten. Schließlich gilt insbesondere in dieser Disziplin: **Happy patient. Happy professional.**

### TIPP

Besuchen Sie die **PROPHY.community** – eine exklusive Plattform für Prophylaxefachkräfte, die Vernetzung, Dialog, Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer auf Augenhöhe ermöglicht.

### INFORMATION

#### W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3 b  
83410 Laufen/Obb.  
Tel.: 08682 8967-0  
office.de@wh.com  
www.wh.com



Infos zum Unternehmen



## Prophylaxis Powder starkes Trio

**SOFT** Entfernt sanft und effektiv supragingivalen Biofilm und Verfärbungen von der Zahnoberfläche. Basierend auf Natriumbicarbonat. Durchschnittliche Partikelgröße 40µm. Minzgeschmack.

**SMOOTH** Entfernt mit kugelförmigen Partikeln schonend supragingivalen Biofilm und schützt zugleich das Gewebe.

**SENSITIVE** Glycine Powder. Basierend auf Glyzin. Durchschnittliche Partikelgröße 25µm. Süßlicher Geschmack.