


**Multiband-Klebstoffentfernung:** Der schnittfreundige Hartmetall-Smoozie und der schmelzschonende Klebstoffradierer im aufbereitbaren Edelstahlständer-Set.

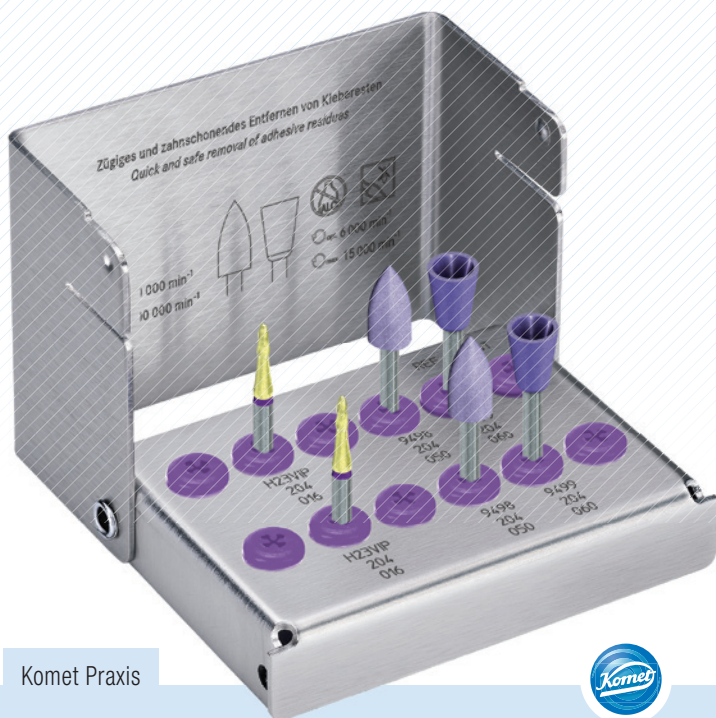


Komet Praxis



# Smoozies: Klebstoffentfernung ganz smooth

1 Klebstoffentferner H23VIP

2 Polierer 9498

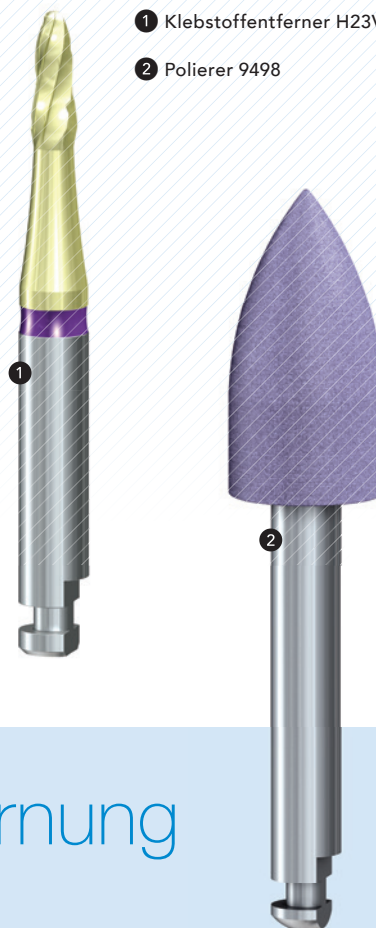

## 1. Finaler Behandlungsschritt

### Was erwartet der Zahnarzt von einem Klebstoffentferner?

Die Spannung ist seitens des Behandlers und des Patienten gleichermaßen groß, schließlich ist man kurz davor, endlich das unverstellte Ergebnis nach einer teilweise jahrelangen Multiband-Prozedur zu sehen. Da muss alles glatt laufen – im wahrsten Sinne des Wortes! Werden die Brackets vom Zahn entfernt, löst sich die adhäsive Verbindung des Brackets zum Kleber – nicht jedoch der Kleber vom Zahn. Dementsprechend möchte der Zahnarzt die anschließende Klebstoffentfernung möglichst schonend und flott umsetzen. Er wünscht sich ganz konkret, dass die Zahnhartsubstanz dabei nicht beschädigt wird, der Patient keine Schmerzen empfindet, insgesamt zügig gearbeitet werden kann und final eine schöne riefenfreie Zahnoberfläche entsteht.

## 2. Smoozies

### Welche Instrumente sind in dem Smoozie-Set enthalten?

Das Smoozie-Set enthält zwei Teamplayer: den schnittfreundigen Hartmetall-Smoozie und den schmelzschonenden Klebstoffradierer. Zuerst bereitet der Hartmetall-Smoozie die Oberfläche effizient vor. Er ist der perfekte Vorbereiter, zeitsparend und wirtschaftlich. Anschließend folgt der „Smoozie-Polierer“. Dieser Klebstoffradierer arbeitet ganz riefenfrei und sicher. Sein weiches Schleifgut radier die noch verbliebenden Klebereste ab, ohne die darunterliegende natürliche Zahnschmelz zu beschädigen.

### Warum der Set-Gedanke?

Grundsätzlich gibt es kein Instrument, das einerseits schnell und schnittfreudig den Klebstoff entfernt – und sich andererseits schonend und sicher zum Zahnschmelz verhält. Die Smoozies ergänzen sich ganz wunderbar, sie vereinen Schnelligkeit und absolute Sicherheit.

## 3. Zielgruppe

### Wer ist Zielgruppe für die Smoozies?

Das sind vor allem Kieferorthopäden, Zahnärzte und ihre Assistenz, die sich für die Klebstoffentfernung mit FG-Winkelstück eigens qualifiziert haben. Mit den Smoozies haben sie ihr ganz persönliches Edelstahl-Set mit aufgelaserten Figurnummern und Anwendungsdrehzahlen – und damit alles im Griff für diesen so wichtigen finalen Behandlungsschritt am Patienten. Alles in einem Set auf einen Blick, der aufbereitbare Edelstahlständer, das violette Farbkonzept – das sind die besten Voraussetzungen für den gesamten Behandlungsablauf, einen erfolgreichen Abschluss und zufriedene Patienten.

### Werden die Smoozies unter Wasserkühlung eingesetzt?

Ja, Komet Dental empfiehlt den Einsatz mit Wasserkühlung, um eine erhöhte Wärmeentwicklung am Zahn und eine daraus resultierende Nekrose zu vermeiden.




Infos zum Unternehmen

**WWW.KOMETDENTAL.DE**

# DIGITALE DENTALE TECHNOLOGIEN

14. und 15. Februar 2020  
Dentales Fortbildungszentrum Hagen

ONLINE-ANMELDUNG/  
KONGRESSPROGRAMM

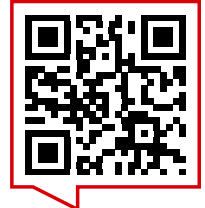

www.ddt-info.de



## Veranstalter:

OEMUS MEDIA AG  
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig  
Tel.: +49 341 48474-308  
Fax: +49 341 48474-290  
event@oemus-media.de | www.oemus.com

## Wissenschaftliche Leitung:

Dentales Fortbildungszentrum Hagen GmbH  
Handwerkerstraße 11 | 58135 Hagen  
Tel.: +49 2331 6246812  
Fax: +49 2331 6246866  
www.d-f-h.com



## Wissenschaftlicher Leiter:

ZTM Jürgen Sieger

Faxantwort an **+49 341 48474-290**

Bitte senden Sie mir das Programm zu den DIGITALEN DENTALEN TECHNOLOGIEN 2020 zu.

\_\_\_\_\_  
Titel, Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse (Für die digitale Zusendung des Programms.)

Stempel

ZMP 12/19