

Kurz gesagt: „Wir benötigen halt nur noch ein Produkt“

Ein Beitrag von Markus Ludolph

HERSTELLERINFORMATION /// Anwender berichten über ihre Produkterfahrungen – an dieser Stelle Markus Ludolph, Zahnarzt und Inhaber einer auf Endodontie spezialisierten Praxis in Dortmund über einen endodontischen Reparaturzement.



Das Mischungsverhältnis von Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement wird den verschiedenen Anforderungen flexibel angepasst. Das sehr feinkörnige, bioaktive Pulver ergibt mit dem patentierten Gelmedium eine stets glatte Konsistenz.

Endodontologen nehmen in Bezug auf den Zahnerhalt eine zentrale Schlüsselrolle ein. Eine Herausforderung, die mit Blick auf die zunehmend älter werdende Bevölkerung stets größer wird. Gefragt ist daher eine moderne Produktlösung wie Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement von Ultradent Products. Das Füllmaterial auf Basis von Mineral-Trioxid-Aggregat (MTA) ergänzt die Endo-Eze™-Produktreihe und kombiniert eine vielseitige, sichere und effiziente Anwendung mit langfristigem Zahnerhalt. Die Einsatzmöglichkeiten beinhalten Pulpotomien, Pulpaüberkappungen, retrograde Wurzelfüllungen, Apexifikationen sowie das Verschließen von Wurzelperforationen und die Reparatur von Wurzelresorptionen. Für jede gewünschte Anforderung bietet der Reparaturzement dabei die geeignete Mischoption. Das Geheimnis liegt in der Verbindung eines sehr feinkörnigen Pulvers mit einem Flüssigkeit-Gel-Gemisch, das eine unkomplizierte und jederzeit glatte Anwendung ermöglicht.

Zahnarzt Markus Ludolph, Dortmund:

„Bislang habe ich durchweg positive Erfahrungen mit Endo-Eze MTAFlow Reparaturzement gemacht. Das Präparat kann alles, wofür ich vorher mehrere Produkte brauchte. Im Prinzip habe ich vier Medikamente in einem. Durch die unterschiedlichen Konsistenzen¹ habe ich eines zur Perforationsabdeckung, eines für die direkte Überkappung, eines für Apexifikationen und eines für Strip-Perforationen. Dadurch, dass Endo-Eze MTAFlow Reparaturzement so mühelos durch eine 29ga-Kanüle appliziert werden kann², entfällt der Kauf teurer Applikationssysteme, die bei anderen MTA-Produkten nötig sind. Auch neigen übliche MTA-Produkte zum Bröseln. Endo-Eze MTAFlow Reparaturzement ist dagegen so fein, fast sahnig, dass das Applizieren in jedem Fall sehr einfach und zuverlässig funktioniert. Endo-Eze MTAFlow Reparaturzement hat, seitdem ich ihn in meiner Praxis benutze, fast alle anderen MTA-Produkte aus dem täglichen Betrieb verdrängt. Wir benötigen halt nur noch ein Produkt.“

Zahnarzt Markus Ludolph ist Praxisinhaber in Dortmund mit Spezialisierung auf Endodontie.

1 Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement bietet zahlreiche Mischoptionen von dünn- über dickflüssig bis hin zur äußerst festen Putty-Konsistenz.

2 Als einziger MTA-Reparaturzement kann Endo-Eze™ MTAFlow™ Reparaturzement in dünnflüssiger Konsistenz mit den NaviTip™ 29ga-Spitzen appliziert werden.

INFORMATION ///

Zahnarzt
Markus Ludolph
 Am Oelpfad 5–7
 44263 Dortmund
 Tel.: 0231 436702
 info@zahn-weh.de
 www.zahn-weh.de

Infos zum Autor




Ultradent Products
 Infos zum Unternehmen



Hautnah dabei


immer & überall

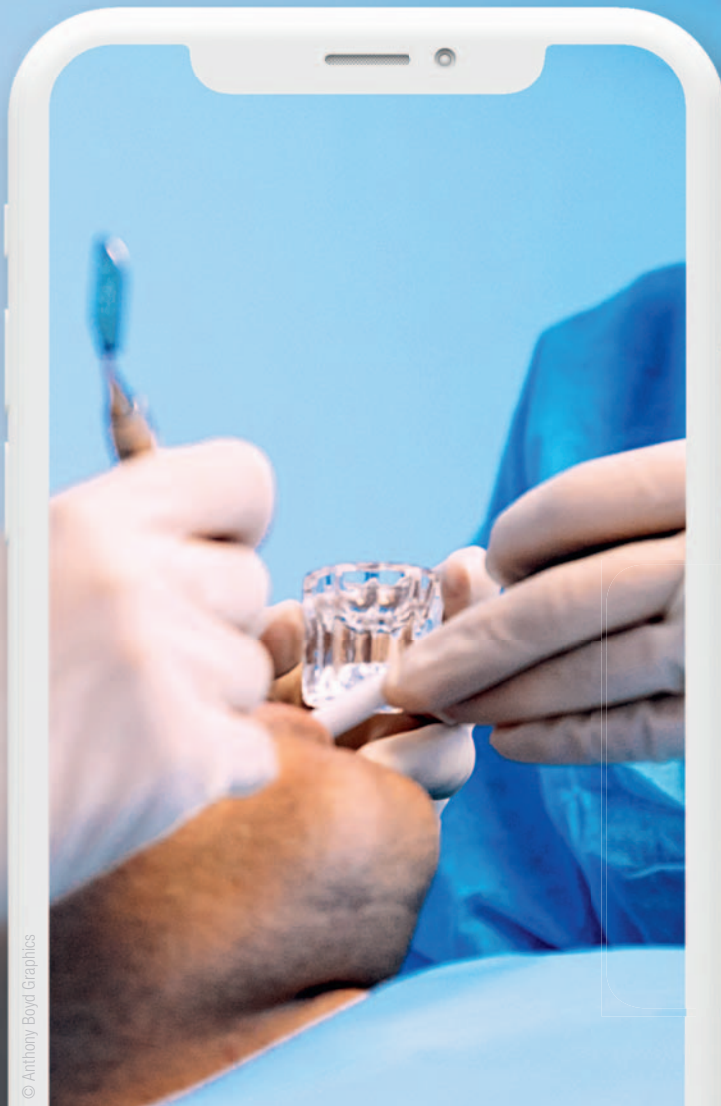

© Anthony Boyd Graphics

ZWP ONLINE
CME-COMMUNITY

www.zwp-online.info/cme-fortbildung

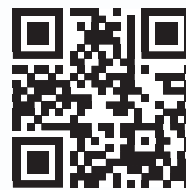

- Fachbeiträge
- Live-OPs
- Live-Tutorials
- Webinare

© santypari_soft - stock.adobe.com