




Küretten gehören zum Standardinstrumentarium einer jeden Zahnarztpraxis. Ihre Effektivität hängt von ihrer Schärfe ab. Viele Unternehmen bieten Küretten an, die nicht nachgeschliffen werden. Das Unternehmen Deppeler SA produziert dagegen weiterhin nachschärfbare Küretten und Scaler, um eine optimale Effektivität zu gewährleisten und den Zahnärzten mittelfristig Kosten zu sparen. Im Interview erklärt Diane Bonny, Director Innovation & Strategy, warum sich diese Küretten für den Behandler lohnen.

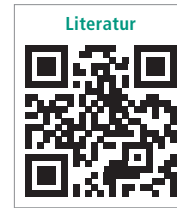


## Mit dem richtigen Kürettenschliff Kosten sparen

*Warum bietet Deppeler Küretten und Scaler an, die nachgeschärft werden können?*


Unser Unternehmen ist seinen Überzeugungen und seinem Leitgedanken stets treu geblieben. Zudem sind unser Know-how und unsere Kompetenzen in der Herstellung und Verarbeitung von Medizinstahl weltweit einmalig. Warum also keine Küretten und Scaler anbieten, die nachgeschärft werden können? Unsere Kunden profitieren vom Komfort und von der Effizienz, die ein frisch geschärftes Instrument bietet. So belegt eine von der Universität Zürich durchgeführte Studie, dass nicht nachschärfbare Instrumente und die Instrumente von Deppeler erst nach 1.000-maliger Berührung mit Dentin und fünffacher Aufbereitung ca. 75 Prozent ihrer Wirksamkeit verlieren (Abb. 2).<sup>1</sup> Ich denke, die Rechnung ist schnell gemacht. Unsere nachschärfbaren Instrumente bieten wichtige Vorteile und können zusätzliche Kosten ersparen. Die Arbeitsbereiche sind etwas weicher, flexibler und können nicht so leicht abbrechen. Es gibt keinerlei Oberflächenbeschichtung, welche die Effizienz der Schneide reduzieren könnte. „Nackter“ Stahl schneidet eben präziser. Der Behandler spart Zeit, Geld und schont die Umwelt durch Instrumente, die nicht nachgekauft



**Abb. 1:** Diane Bonny, Director Innovation & Strategy (r.), und Caroline Leopold-Metzger, Geschäftsführerin von Deppeler SA.

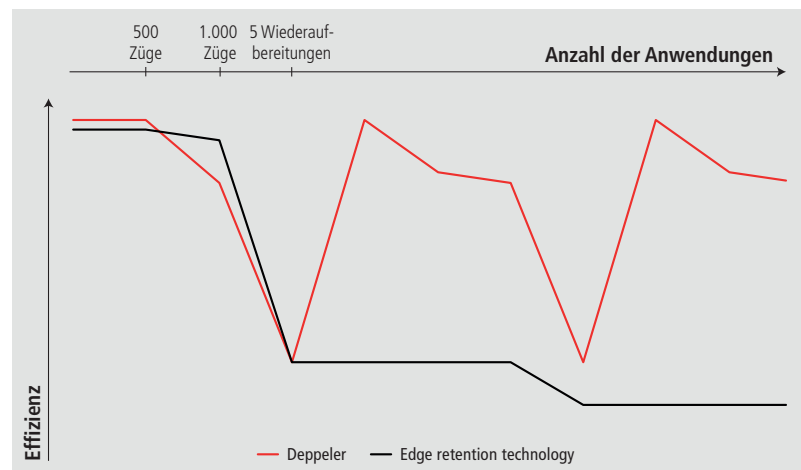

**Abb. 2:** In-vitro-Studie von drei Küretten mit Edge-Retention-Technologie nach häufigem Gebrauch.

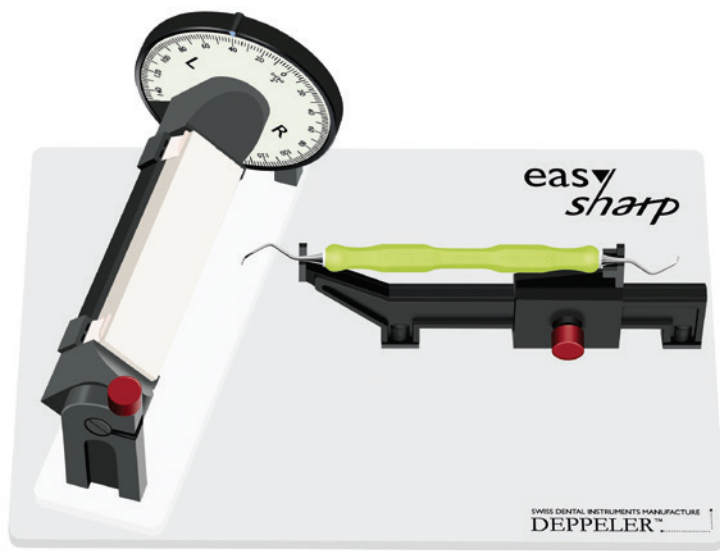

## Easy Sharp sorgt jeden Tag für scharfe Instrumente

1. Das Easy Sharp Schleifgerät für den passenden Schliff:
  - a. Jedes Instrument erfordert spezifische Winkeleinstellungen und Bewegungen. Die von Ihnen anzuwendenden Winkeleinstellungen entsprechen exakt denen, die wir bei der Herstellung der Klingen im Werk anwenden.
  - b. Die Klinge wird in Längsrichtung geschliffen. Dies erhöht die Schärfe und Lebensdauer der Schneide. Das ist sehr wichtig, damit Sie Ihre Küretten nicht zu oft nachschleifen müssen.
2. Mit dem universell einsetzbaren Easy Sharp Coach können Sie ...
  - a. die Klinge auch in Längsrichtung schleifen.
  - b. einen gleichmäßigen Winkel universell einstellen. Diese Lösung ist daher ideal zum Schleifen von Instrumenten aller Marken geeignet.

werden müssen, sondern immer wieder verwendet werden können.

### *Der Markt ist seit Jahrzehnten da. Denken Sie, dass es für diese Produkte auch in Zukunft einen Markt geben wird?*

Ich für meinen Teil bin überzeugt davon, dass es eine immer größere Nachfrage für diese Produkte geben wird. Mit einer einfachen, wirksamen und schnellen Schleifmethode, die leicht erlernt werden kann, bieten diese Instrumente nur Vorteile. Stahl ist ein komplexes Thema und um ein gutes Schleifergebnis zu erzielen, ist es von Vorteil, den Rat von Spezialisten einzuholen. Wir von Duppeler besuchen schon seit langer Zeit entsprechende Schulungen und informieren dort über das Schleifen. Mittlerweile werden auch gezielte Fortbildungen zum Thema Schleiftechnik angeboten.

### *Was würden Sie den Zahnärzten empfehlen?*

Es gibt viele Zahnärzte, die ihre Instrumente – aus Bedenken, etwas falsch

zu machen oder aus Zeitgründen – zunächst nicht selbst schärfen wollen. Aber nach wenigen Minuten der Erklärung und des Testens erlernen sie die richtige Schleiftechnik und beherrschen sie für immer. Unsere Schleifgeräte sind die besten auf dem Markt, weil sie auf die Besonderheiten der Instrumente und die Bedürfnisse der Ärzte zugeschnitten sind. Denn diese wollen keine Zeit mit dem Schleifen von Instrumenten verlieren, was ich natürlich verstehe. Wenn wir den Kosten-Nutzen-Zeit-Faktor genauer betrachten, stellen wir schnell fest, dass nachschärfbare Instrumente eine sehr gute Lösung sind und bleiben.

*Frau Bonny, vielen Dank für das Gespräch.*

**Kontakt**  
**Deppeler SA**  
 La Pièce 6  
 1180 Rolle, Schweiz  
 Tel.: +41 21 8251731  
 info@deppeler.ch  
 www.deppeler.ch

ANZEIGE

Sie kennen das  Prophylaxe-Handstück und die Polieraufsätze von **WHITE CROSS** noch nicht?

Fragen Sie nach unserem Testkit!

## HP-44 M Handstück 4:1

+ 2 Packungen **WHITE CROSS**  
Einweg-Polieraufsätze\* kostenlos!



Perfekte Polierlösungen:  
 W&H Proxeo und  
 die Einmal-Polier-Aufsätze  
 von **WHITE CROSS**

schnell, schonend,  
 RKI-konform und  
 kostengünstig

~~418,- €~~

**299,- €**

1x HP-44 M  
 + 2 Pack. POLIER-  
 AUFSÄTZE\*  
 Ihrer Wahl

\*im Wert von je 79,- €

**white cross GmbH** · Brückenstraße 28 · 69120 Heidelberg  
 Telefon 0 62 21 58 60 328 · Telefax 0 62 21 58 84 364  
 E-mail: info@white-cross.info · whitecross-shop.de