



Art2-Polierer: Politur und Zuordnung leicht gemacht

Die Art2-Polierer für Keramik und Komposite liefern in zwei Polierstufen glänzende Ergebnisse.



1. Anzahl der Polierstufen

Es gibt ein-, zwei- und dreistufige Polituroptionen. Wie viele Arbeitsschritte führen effizient zu glänzenden Ergebnissen?


Für wie viele Stufen sich ein Zahnarzt bei der Politur entscheidet, ist grundsätzlich Geschmackssache. Die Art2-Polierer führen in nur zwei Stufen zu einem natürlich aussehenden Finish. Sie bieten einen optimalen Mix aus Standzeit und Flexibilität, bedienen unterschiedliche Füllungs- und Restaurationsmaterialien und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Nach der Formgebung erfolgt zunächst die Vorphitur, den zweiten Schritt übernehmen die Hochglanzpolierer. Damit sind die Art2-Polierer als Team für den krönenden Abschluss einer Restauration unschlagbar.

2. Markierung

Auf dem Dentalmarkt tummeln sich unzählige Polierer. Wie finde ich heraus, welcher Polierer auf welchem Material eingesetzt wird? Welches ist die erste Polierstufe, welches die zweite?

Ja, Polierer sammeln sich mit der Zeit in den Schubladen in unterschiedlichsten Farben an, je nach Anbieter, mit variierenden Polierstufen, für diversere Materialien bestimmt. Die einen bedienen Gold, die anderen Komposit, die nächsten Keramik. Keine Frage, hier ist es schwer, den Überblick zu behalten. Alle Art2-Polierer besitzen einen goldenen Schaft. Dann gilt es, auf die Farbe des Arbeitsteils zu achten: Hellrosa/Gelb für Komposit, Hellblau/Grau für Keramik. Spiegelverkehrt zum Schriftzug „Komet“ steht auf der anderen Schaftseite CER 1 bzw. CER 2 (die beiden Polierstufen für Keramik) oder COMP 1 bzw. COMP 2 (die beiden Polierstufen für Komposite). Alles in standfester Laserqualität. Diese Farb- und Schrifthilfen erleichtern das Instrumentenmanagement. Finden und Sortieren vor der Behandlung bzw. nach der Aufbereitung sowie Nachbestellungen werden kinderleicht. Endlich kommen beim gezielten Griff in die Schublade Glanz, Zeitersparnis und noch mehr Effizienz zusammen.

Wer sich gerne über sämtliche Poliermöglichkeiten bei Komet Dental informieren möchte, schaut in den **Polierer-Kompass**.

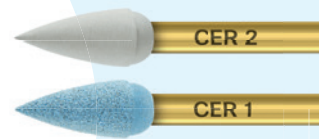

3. Setgedanke

Komet Dental steht für schlaue Setkombinationen, die sich an der Indikation orientieren. Gibt es so etwas auch für die Art2-Polierer?

Komet hat die Art2-Polierer mit weiteren sehr beliebten Instrumenten, den Q-Finierern, im Set 4679 für Komposite kombiniert. Vor der Politur steht die Formgebung. Die Q-Finierer erzeugen dank der innovativen Querhiebverzahnung bereits sehr feine Oberflächen. Sie decken labiales, palatinales und approximales Finieren, ja selbst die Zervikalbereiche langer Zähne ab. So ergeben die Q-Finierer mit den Art2-Polierern im Set 4679 die perfekte Instrumentenkombination für Komposite.

Wo finde ich detaillierte Informationen zu den Art2-Polierern?

Ein Blick auf den Leitfaden in der Art2-Polierer-Broschüre – und schon ist klar, welches Art2-Team im spezifischen Fall zu Hochglanz führt. Wer sich gerne über sämtliche Poliermöglichkeiten bei Komet Dental informieren möchte, schaut in den Polierer-Kompass.



Infos zum Unternehmen