



**Abb. 1:** Nupro White Varnish kommt in hygienischen Einzeldosen sowie mit einem praktischen Fingerhalter in die Praxis und hilft so dabei, Hypersensibilitäten bei einfachem Handling in den Griff zu bekommen.

## Alles im Lack:

## Hypersensibilitäten im Griff

Ob Heißgetränk, Eiskugel oder taktile Reiz: Für Menschen mit überempfindlichen Zähnen steht jeder dieser Begriffe für ein potenzielles Schmerzerlebnis, das sie ganz unmittelbar in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Nicht selten ist die zahnärztliche Praxis dann die erste Anlaufstelle bei der Suche nach Abhilfe – da ist es gut, wenn eine schnelle und unkomplizierte Lösung bereitsteht.

**Autor:** Marius Urmann


In diesem Kontext erweist sich der desensibilisierende Schutzlack Nupro White Varnish von Dentsply Sirona als ein zuverlässiges Hilfsmittel mit zahlreichen Vorteilen für Patienten und Praxisteams.

Zur Häufigkeit von Dentinhypersensibilitäten, also der schmerzhaften Reaktion auf chemische, thermische, taktile oder osmotische Reize, liegt eine Vielzahl von Untersuchungen vor. Ihre Ergebnisse weichen mitunter stark voneinander ab. So nennen etwa Beiträge zum Thema eine Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung zwischen 9 Prozent und 60 Prozent<sup>1</sup> oder rund 40 Prozent<sup>2</sup>. Bedenkt man zudem, dass Dentinhypersensibilitäten als unterdiagnostiziert gelten,<sup>3</sup> kommt dem Phänomen wohl eine noch größere Bedeutung zu, als es die genannten Zahlen nahelegen.

### Clevere Lösung für ein alltägliches Problem

Vor diesem Hintergrund erscheint eine wirkungsvolle und einfach anzuwendende Methode zur Desensibilisierung wünschenswert. In diesem Zusammenhang hat sich unter anderem das Auftragen von fluoridhaltigen Schutzlacken bewährt. Mit Nupro White Varnish hält Dentsply Sirona ein Produkt dieser Kategorie bereit, von dem Patienten gleich in mehrfacher Hinsicht profitieren.

Der erste wesentliche Vorteil kommt sogar schon vor der eigentlichen Anwendung zum Tragen: Denn bei anderen Schutzlacken ist es mitunter notwendig, die Zähne vor der Behand-

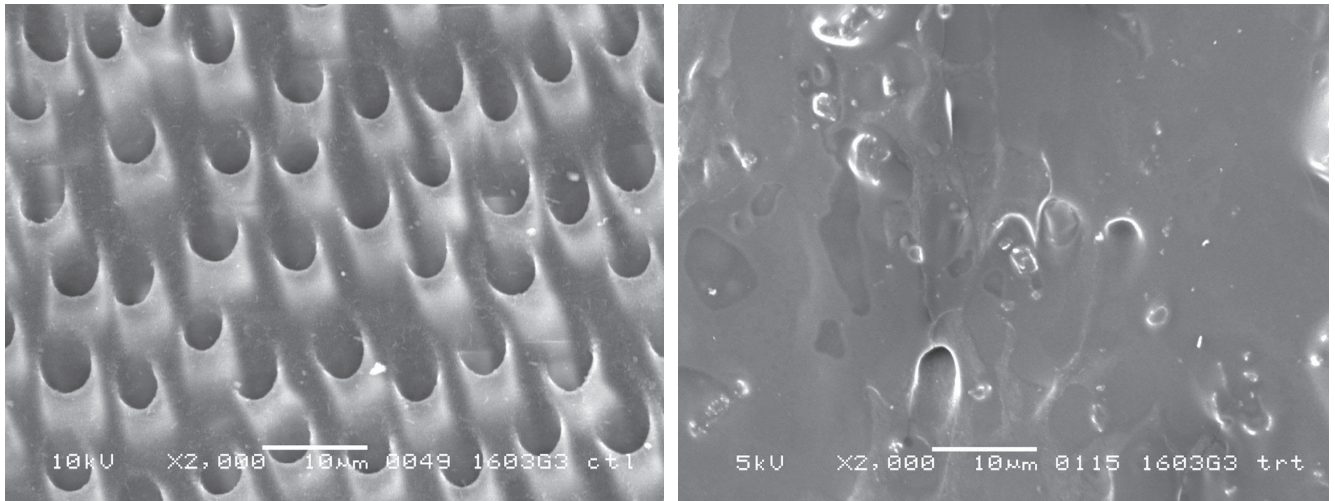

**Abb. 2 und 3:** In-vitro-Untersuchungen zeigen: Nach der Anwendung von Nupro White Varnish (rechts) sind die Dentintubuli nahezu vollständig verschlossen.

lung zu trocknen. Da Nupro White Varnish aber auf feuchte Zahnoberflächen aufgetragen werden kann, entfällt dieser zusätzliche Schritt – eine klare Zeitersparnis für Patienten und Praxisteams. Dank seiner speziellen Formulierung aus Harz und hydriertem Kolophonium erfolgt die Applikation zudem, ohne dass sich Fäden ziehen, es tropft oder der Lack verklumpt.

## „Vorteilskette“ von der Praxis bis nach Hause

Unmittelbar nach dem Auftragen greift dann auch schon der nächste Pluspunkt: Obwohl Nupro White Varnish im Sinne eines einfachen Handlings beim Auftrag gut sichtbar bleibt, wird es nach dem Abbinden transparent! Während insbesondere farbige Lacke in der Vergangenheit eine deutlich erkennbare ästhetische Beeinträchtigung darstellten, können Patienten die Praxis nun mit einem guten Gefühl verlassen. Dazu tragen auch die drei angenehmen Geschmacksvarianten Minze, Traube und Himbeere bei. So erfreut sich gerade bei den kleinen Patienten die Geschmacksrichtung Himbeere großer Beliebtheit.

Zu Hause angekommen, profitieren Patienten schließlich von der schnellen Fluoridabgabe von Nupro White Varnish. Denn durch sie verringert sich die Einwirkzeit des Lacks auf nur zwei Stunden. Konkret bedeutet das: Die Patienten können nach der Behandlung schnell wieder zu ihren gewohnten Ess- und Trinkgewohnheiten zurückkehren.



Infos zum Unternehmen \_\_\_\_\_

## Fazit für die Praxis

Dentinhypersensibilitäten sorgen nicht nur für ganz unmittelbar auftretende Schmerzerlebnisse, sie sind in der Bevölkerung auch weitverbreitet. Diesem Phänomen mit einer schnellen und einfachen Lösung begegnen zu können, dürfte somit für nahezu jede Praxis von Interesse sein. Mit Nupro White Varnish steht zu diesem Zweck ein fluoridhaltiger Schutzlack zur Verfügung, mit dem sich die Behandlung für die betroffenen Patienten angenehm gestalten lässt.

Literatur



## KONTAKT

**Dentsply Sirona Preventive**  
Dentsply Sirona Service Line:  
08000 735000 (gebührenfrei)  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)