

Maximaler Instrumentenschutz mit minimalem Aufwand

Die RKI-konforme Aufbereitung und sorgfältige Pflege von Winkelstücken und Turbinen ist in vielen Zahnarztpraxen eine zeitliche und wirtschaftliche Herausforderung. Mit welchem System die Berliner Zahnarztpraxis „Zahnärzte Feuerlandhöfe“ diese Herausforderung meistert, verrät der folgende Anwenderbericht.

Autor: Dr. Nicolas Wackerbeck



Um höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht zu werden, arbeiten wir in einer Gemeinschaftspraxis mit 19 Mitarbeiter*innen in acht Behandlungsräumen. Jeder von uns hat unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte, sodass unsere Patienten in jedem Bereich der Zahnmedizin optimal versorgt werden. Dank moderner technischer Ausstattung und hochwertiger Instrumente sind sicherere, schonendere und nicht zuletzt Erfolg versprechende Behandlungen möglich. Um diese Behandlungsqualität langfristig zu sichern, verlassen wir uns seit 2019 auf Careclave.

Instrumentenschutz à la Careclave

Jedes unserer Behandlungszimmer ist mit Winkelstück-Sets von W&H und NSK ausgestattet. Um teure Investitionen in weitere Instrumente zu vermeiden, sind wir auf strukturierte Prozesse, kurze Aufbereitungszyklen und eine zuverlässige Funktionsweise der Übertragungsinstrumente angewiesen.

Nach der Behandlung werden die kontaminierten Instrumente mit einem geschlossenen Behälter in den Aufbereitungsraum (AEMP) transportiert. Dort übernimmt unsere Sterilgutassistentin die Beladung der Carebox mit bis zu acht Winkelstücken oder Turbinen. Das innovative Dosiersystem stellt eine punktgenaue Aufbereitung für jedes Instrument sicher – selbst wenn nicht benötigte Adapter in der Carebox frei bleiben.

Besonders gefällt uns das Beladungskonzept: Die Carebox wird für die Reinigung, Desinfektion und Pflege einfach in die Tür des Careclave eingehängt. Falls wir im gleichen Zyklus weitere Instrumente sterilisieren müssen, legen wir diese zusätzlich auf die kurzen Tablettis im hinteren Teil der Kammer.

Nach nur 18 Minuten sind unsere Winkelstücke und Turbinen gereinigt, desinfiziert und gepflegt – die Grundlage für eine lange Lebensdauer der Instrumente. Auch die oftmals teuren Reparaturen der Winkelstück-Köpfe sind bei uns kein Thema.



Denn jeden Freitag erfolgt die Ölung der Instrumenten-Köpfe nach Herstellervorgaben. Mithilfe einer in der Tür integrierten Düse werden die Spannzangen mit einem vollsynthetischen Öl gepflegt. Für einen lückenlosen Nachweis dokumentiert Careclave die Aufbereitung und Pflege mit allen relevanten Prozessparametern.

Über ein Jahr mit Careclave, über ein Jahr keine Sorgen bei der Instrumentenaufbereitung

Die Kombination eines modernen Autoklaven mit einem Aufbereitungs- und Pflegegerät für Winkelstücke spart nicht nur Zeit und Platz im Aufbereitungsbereich, sondern sichert auch den Schutz unserer Patienten und Instrumente. Die maschinelle Reinigung und Desinfektion sowie die systematische Pflege garantieren eine zuverlässige Funktionsweise und langfristige Werterhaltung unserer Instrumente.

In den sozialen Medien wird häufig über hohe Kosten für Reparaturen von nicht ausreichend gepflegten Winkelstücken und Turbinen berichtet. Erfreulicherweise hatten wir in den vielen Monaten der intensiven Verwendung unserer Instrumente in Verbindung mit Careclave nicht einen pflegebedingten Ausfall eines Instrumentes.

So sehr wie wir uns auf unser Instrumentarium verlassen, verlassen wir uns auch auf das neue Gerätekonzept von MELAG: Careclave überzeugt im Arbeitsalltag mit zeitsparenden Funktionen in ausgezeichneter MELAG Qualität.

Weitere Informationen zu Careclave unter: www.melag.com

KONTAKT

Zahnärzte Feuerlandhöfe

Dr. Nicolas Wackerbeck
Chausseestraße 38
10115 Berlin-Mitte



**Bundesweit
vor ORT**

**Bequem und günstig –
Kein Verpackungs- und
Versandaufwand**

EGAL WELCHE PATRONE SIE HABEN – WIR TAUSCHEN IHR HARZ SCHNELL, ZUVERLÄSSIG, BUNDESWEIT.

Sie wissen: Autoklaven und Thermo-desinfektoren brauchen demineralisiertes Wasser.

Aber wussten Sie auch, dass der ORBEN Ionenaustauscher Express Service alle Entsalzungspatronen-Fabrikate regeneriert?

Ein Anruf genügt und wir sind in Kürze bei Ihnen, um die verbrauchten Ionenaustauscher-Harze gegen regenerierte auszutauschen. Unser Team berät Sie gerne.

Telefon 0175 279 7916
info@orben.de

ORBEN Wasseraufbereitung
Entsalzen mit System

www.orben.de