

Das moderne Zahnaufhellungssystem mit LED-Technologie für zu Hause

Pola Light – für ein helleres, selbstbewussteres Lächeln in fünf Tagen.

Pola Light ist ein fortschrittliches Zahnaufhellungssystem, das die preisgekrönte Formel von Pola mit einem LED-Mundstück kombiniert, das wiederum die Aufhellung beschleunigt.

Das System wird mit Pola Day 6% Wasserstoffperoxid-Gel geliefert. Es ist einfach und komfortabel mit einer Behandlungsdauer von nur 20 Minuten pro Tag zu Hause anzuwenden. Die Gele wirken schnell und entfernen dank ihrer Zusammensetzung Langzeitverfärbungen in nur fünf Tagen. Aufgrund der hohen Viskosität und des neutralen pH-Werts sorgen die Gele für sehr hohen Patientenkomfort. Die einzigartige Mischung schonender Zusatzstoffe und der hohe Wasseranteil verringern Empfindlichkeiten. Das Pola LED-Mundstück deckt beide Zahnbögen ab, hat eine Universalgröße, ist portabel, wieder aufladbar und einfach zu tragen, ohne dass ein Kabel am Mundstück befestigt ist. Eine Praxisbehandlung oder individuelle Schiene ist nicht notwendig und das System damit zeitsparend für Patient und Zahnarzt. Zudem wird es in einer hochwertig gestalteten Verpackung geliefert.

SDI Germany GmbH

Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au/de-de



Pola Light – Lieferumfang

- 1 Pola LED-Mundstück
- 4 Spritzen à 3g Pola Day Zahnaufhellungsgel (6% Wasserstoffperoxid)
- 1 USB-Ladekabel
- 1 Gebrauchsanleitung

CREATED BY SDI

POLA

ADVANCED TOOTH WHITENING SYSTEM

Janette Knop (Zahnarztpraxis Meike Naether/Potsdam) berichtet:

„Ich war sehr überrascht, dass es so gut und einfach funktioniert. Die Anleitung ist gut beschrieben. An den ersten zwei Tagen habe ich die zwei Durchgänge jeweils zehn Minuten durchgeführt. Da aber keine Empfindlichkeiten auftraten, habe ich die Tragedauer in den nächsten drei Tagen auf 15 Minuten erhöht. Damit erzielt man meines Erachtens auch das beste Ergebnis.“

Die Durchgänge führte ich immer hintereinander durch. Meine Zähne sind fast zwei Nuancen heller geworden (von einer A3 auf eine sehr helle A2). Das fiel auch meiner Tochter auf.



Abb. 1: Pola Light Kit mit Pola Day 6%.

Abb. 2: Janette Knop (Zahnarztpraxis Meike Naether/Potsdam) ist zufriedene Anwenderin von Pola Light.

Abb. 3–5: Anwendung des Pola Light Zahnaufhellungssystems. (Abb. 2–5: © Zahnarztpraxis Meike Naether)



ANZEIGE

Stets eine

IDEE

voraus!



ZWP ONLINE

www.zwp-online.info