Neues Eigenfett-Set: Makro-st'rim jetzt für größere Volumina

Das beliebte Lipotransfer-Set st'rim vereinfacht den Einsatz von Eigenfett im Gesicht. Mit dem Komplettset aus Entnahme- und Reinjektionskanülen macht es eine Behandlungsalternative zum dermalen Filler leicht verfügbar. Damit unterstützt es den häufigen Patientenwunsch, kein körperfremdes Material injiziert zu bekommen. Mit dem neuen Makro-st'rim-Set steht jetzt auch ein Set für größere Lipofillings zur Verfügung, wie sie beispielsweise für Korrekturen an der Brust benötigt werden. "Lipo-Kanülen sind kein schlichtes Zubehör. Das sind die entscheidenden Werkzeuge!", begeistert sich Prof. Dr. Ali Mojallal von der Plastischen Chirurgie der Universität Lyon, der an der Entwicklung der neuen Entnahmekanüle beteiligt war. Die Aspirationskanüle "Picking II" vereint schlankes Design mit hoher Effizienz; dank des patentierten Spezialschliffs "Diamond Port" wird ein sehr gleichmäßig strukturiertes Fettgewebe gewonnen.

Passend dazu finden sich drei Reinjektionskanülen im Set, die mit Durchmessern von 1,5–2,7 mm und Längen von 10–15 cm eine mehrschichtige Platzierung des Transplantats im ge-

SEHR GUT

DIOP

SEHR GUT

DIOP



wünschten Zielgebiet erlauben. Der Anwendungsbereich an der Brust geht vom Konturdefekt über die Abdeckung von Transplantaträndern bis hin zu Größenangleichungen bei Asymmetrien. "Heutzutage", und da ist Prof. Mojallal ganz klar in seinem Qualitätsanspruch, "kann ich keine Brustrekonstruktion mehr ohne Lipotransfer machen."

PonsaMed GmbH

Tel.: +49 228 96110445 · info@ponsamed.com

ANZEIGE





Thermostraffung der Unterlider mit Radiofrequenz

Nach Dr. med. Jürgen Reus, Karlsruhe

Minimalinvasiv können die Unterlider gestrafft und gleichzeitig Tränensäcke minimiert werden. Mit dem Radiofreguenz-Chirurgiegerät radioSURG® 2200 der Firma Meyer-Haake GmbH Medical Innovations, Ober-Mörlen, können die Unterlider schonend und ohne Verbrennungen gestrafft werden. Die speziell für diese Anwendung entwickelte Discelektrode wird subziliar von lateral nach medial direkt unter dem Wimpernkranz eingesetzt. Dabei kann an dem RF-Gerät sogar eine Impulsdauer eingestellt werden. Die Elektrode wird im Abstand von 1-2mm aufgesetzt und mit einem Impuls von ca.0,45 Sekunden aktiviert. So werden drei bis vier Reihen unter dem Wimpernkranz gesetzt. Es entsteht ein leichter Schorf, der keinesfalls abgekratzt werden darf und nach einigen Tagen abfällt. Je nach Hauttyp kann es drei bis vier Wochen lang zu einer leichten Rötung der Unterlider kommen, die problemlos mit Make-up abgedeckt werden kann. Natürlich kann das Radiofrequenz-Chirurgiegerät radioSURG® 2200 auch für alle anderen chirurgischen Anwendungen eingesetzt werden. Von der Epilation einzelner Haare bis hin zum großen Facelift oder der Labiareduktion.

Gerade die neue Version des radioSURG® 2200 PT bietet mit den voreingestellten Einstellungen für viele Operationen und dem innovativen Touchscreen tolle Möglichkeiten für die Praxis. Lassen Sie sich bei einem Demotermin in Ihrer Praxis überzeugen.







Eine neue Ära der PDO-Fäden

Beim Fadenlifting werden selbstauflösende Fäden in das erschlaffte Gewebe eingebracht und ermöglichen so einen sofortigen Lifting-Effekt. "Dabei hängt die Haltbarkeit des Ergebnisses neben der Schwere des Ausgangsbefunds und des patientenindividuellen Stoffwechsels immer auch vom gewählten Fadenmaterial und der Anzahl eingebrachter Fäden ab", erklärt Prof. Dr. Dr. Timo Dreiseidler, Facharzt für Plastische und Ästhetische sowie Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Die Firma Croma hat nun mit den Princess® Threads Anchor PLUS innovative PDO-Fäden lanciert, die über zwei aufeinanderfolgende Widerhaken für eine besonders starke Zugkraft und sichere Verankerungsfähigkeit verfügen. In Summe erhöht sich dadurch die Anzahl der Widerhaken bei einem 18 G-Faden mit 100 mm Länge um knapp ein Drittel. Prof. Dr. Dr. Dreiseidler: "Die Princess® Threads Anchor PLUS stellen somit besonders potente Haltefäden dar, die es ermöglichen, jener Patientengruppe, die an der

Grenze zum Lifting steht, mit diesem Verfahren eine weitere Chance zu geben, sich minimalinvasiv behandeln zu lassen."

Die PLUS-Fäden werden wie die gesamte Anchor-Range mit einem speziellen Kaltpressmodellierungsverfahren hergestellt, diese Technik verleiht den Widerhaken zusätzliche Haltekraft.

Croma Deutschland GmbH Tel.: +49 89 54558279 office@cromapharma.de

> "Dank doppelter Widerhaken erzielen neuartige Zugfäden jetzt sogar bei einem ausgeprägteren 'Sagging'-Befund lang anhaltende Straffungsergebnisse."



Alma PrimeX: herausragende Ergebnisse bei Body Contouring & Hautstraffung komplett nicht-invasiv

Modernste Ultraschall- & Radiofrequenz-Technologien

X


Behandlungs-Konzepte für verschiedene Bedürfnisse

X

Außergewöhnliche und langanhaltende Ergebnisse



Vorher

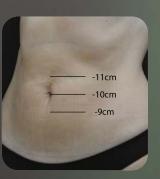

Nach 3 Behandlungen

www.alma-lasers.de/almaprimex marketing@alma-lasers.de



Alma Lasers GmbHNordostpark 100-102
90411 Nürnberg
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0

www.alma-lasers.de

Mit freundl. Genehmigung von Almas klinischer Abteilung