

Marktinformation


JAXEUROPE GMBH

Das erste professionelle „Boil and Bite“ Tray für die Zahnaufhellung

Profi-Bleach-Tray® ist die erste professionelle anatomische Schiene zur Aufnahme von Bleichmitteln zur Zahnaufhellung. Sie wird in wenigen Augenblicken in der Zahnarztpraxis direkt angepasst und gewährleistet somit perfekten Komfort und Sitz wie individuell laborgefertigte Schienen. Durch die perfekte Haftung an den Zähnen erhöht sich die Bleichwirkung des Gels. Produktmerkmale: ergonomische Anpasshilfe, zentrale Öffnung zur Atmungserleichterung, zwei Farben zur Unterscheidung von Ober- und Unterkiefer, kompatibel mit allen Bleaching-Gels.

Die Anwendung ist ganz einfach:

1. Den Halter zum Anpassen in die entsprechenden

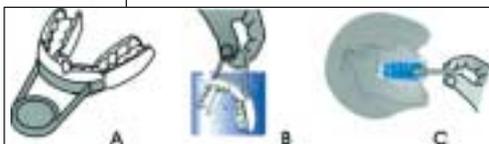

Öffnungen vorne am Profi-Bleach-Tray® einsetzen (Abb. A).

2. Halten Sie die Vorrichtung wie in der Abbildung gezeigt. Tauchen Sie Profi-Bleach-Tray® dann fünf Sekunden lang komplett ins kochende Wasser (Abb. B). Achtung: Die Zeitspanne von fünf Sekunden nicht überschreiten, da Profi-Bleach-Tray® sich sonst übermäßig verformen könnte.

3. Profi-Bleach-Tray® aus dem Wasser nehmen und kräftig schütteln, um die verbliebenen Wassertropfen zu entfernen.

4. Profi-Bleach-Tray® nun sofort in den Mund führen: Die Schiene ist zwar noch warm, verursacht aber keine Verbrühungen (Abb. C). Die Zähne schnell, aber behutsam zusammenbeißen und die Zunge nach vorne gegen die obere Zahnreihe drücken. In dieser Position mehrere Sekunden lang die gesamte enthaltene Luft und das Wasser einsaugen, damit die Schiene besser an den Zähnen haftet. Dabei gleichzeitig Lippen und Wangen kräftig drückend massieren.

5. Profi-Bleach-Tray® nach etwa einer Minute aus dem Mund nehmen und mindestens drei Minuten in dem Behälter mit kaltem Wasser belassen. Danach aus dem Wasser nehmen und den Halter entfernen. Profi-Bleach-Tray® ist nun einsatzbereit. Day white mit ACP ab sofort erhältlich.

JaxEurope GmbH

Tel.: 0 61 28/48 76 75

Fax: 0 61 28/48 76 81

E-Mail: jaxeurope@

www.myjaxdive.com

DISCUS DENTAL EUROPE B. V.

Durchbruch bei der „take home“ Zahnaufhellung

Nite White ACP von der Firma Discus Dental verbindet die patentierte amorphe Kalziumphosphattechnologie (ACP) mit der erprobten Effektivität von Kaliumnitrat, um einen neuen Maßstab des Patientenkomforts zu etablieren.



Nicht nur, dass Nite White ACP die Reduzierung von Sensibilitäten erreicht, seine patentierte Kalziumphosphattechnologie wurde entwickelt, um den chemischen Aufbau des Zahnes zu imitieren. Klinische Tests haben gezeigt, dass Patienten sechs Monate nach der Aufhellung mit Nite White ACP weniger Verfärbungen aufwiesen. Die patentierte amorphe Kalziumphosphattechnologie füllt mikroskopisch kleine Defekte in der Zahnoberfläche, um den gesamten Hochglanz der Zähne zu verbessern ... und das Lächeln Ihrer Patienten.

Discus Dental Europe B.V.

Tel.: 0 72 43/3 24 30

Fax: 0 72 43/32 43 29

E-Mail: deutschland@discusdental.com

www.discusdental.com

SHOFU

HiLite

HiLite ist ein Bleaching-System auf Wasserstoffperoxid-Basis. Das Produkt ist für vitale und devitale Zähne geeignet. Die Aktivierung kann sowohl chemisch als auch mit Licht erfolgen. Es ist ein einfaches Praxisbleachingssystem mit Farbindikator zur Überprüfung der Einwirkzeit. Die Vorteile dieses Zahnaufhellers liegen darin, dass er einfach und Zeit sparend anzuwenden ist. Je nach Indikation kann

das Produkt punktuell oder großflächig auf der Zahnoberfläche oder direkt in der Kavität angewandt werden. HiLite kann außerdem ohne Bleaching-Schiene verwendet werden und es löst keine Sensibilisierungen beim Patienten aus. Das Produkt ist einfach zu handhaben: Nach dem Mischen von Pulver und Flüssigkeit entsteht eine grüne Paste, die direkt auf die zu bleichenden Bereiche aufgetragen wird. Die Aktivierung von HiLite

erfolgt nun automatisch auf chemischem Wege und kann durch eine Polymerisationslampe unterstützt und beschleunigt werden. Die aufgetragene Paste verfärbt sich während des Oxidationsprozesses von grün zu cremefarben/weiß.



SHOFU Dental GmbH

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-64

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de