

**THERMODESINFEKTION** // In einer modernen Zahnarztpraxis ist es besonders wichtig, dem Patienten hohen Komfort zu bieten sowie schnell, effizient und gleichzeitig überaus gründlich zu arbeiten. Aufwendige Prozesse wie z. B. die Aufbereitung von Instrumenten, sind dabei oft ein Stolperstein. Hier sollte alles ganz besonders reibungslos und sicher funktionieren. Im folgenden Beitrag veranschaulicht Dr. Lutz Kienzler seine positiven Erfahrungen mit dem Produktangebot der Fa. MELAG.

## MODERNE TRIFFT BEWÄHRTES

Dr. Lutz Kienzler / Kassel

In unserer Praxis für Zahnheilkunde legen wir großen Wert auf eine moderne und individuelle Behandlung. Unsere Schwerpunkte sind Implantologie, Parodontologie, Endodontie und Prophylaxe sowie die Ästhetische Zahnheilkunde, auf der ein besonderer Fokus liegt. Um den medizinischen Standards zu entsprechen und vor allem, um unseren

Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten, legen wir viel Wert auf die Weiterbildung unseres Teams und die Einhaltung hygienischer Standards im Aufbereitungsraum. Aus diesem Grund haben wir unseren Aufbereitungsprozess um den Thermodesinfektor MELAtherm sowie die Freigabesoftware MELAtrace erweitert.

### Der MELAtherm – Erleichterung der Arbeit

Bisher haben wir unsere Instrumente manuell mithilfe einer Wanne desinfiziert und aufbereitet. Dieser Prozess war nicht nur sehr zeitintensiv, sondern auch fehleranfällig. Unsere neue maschinelle Aufbereitung mithilfe des MELAtherm optimiert den

Abb. 1: Team der Zahnarztpraxis Kienzler in Kassel.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Abb. 2: Der MELAtherm in Aktion. Abb. 3: MELAtace zur Dokumentation.

Aufbereitungsprozess und schützt gleichzeitig mein Team. Bei einer durchschnittlichen Auslastung von 30 bis 40 Patienten am Tag hat der MELAtherm eine sehr praxisfreundliche Waschkammer, um das Gerät in unseren Tagesablauf einzubinden. Unsere zwei speziell ausgebildeten Fachkräfte sind mit der Gesamtleistung des MELAtherm sehr zufrieden. Mein Team betont besonders die kurzen Programmzeiten und die Trocknungsfunktion. Mit dem Umstieg der manuellen zur maschinellen Aufbereitung haben wir auch unsere Dokumentation modernisiert, um diese

sicherer und reproduzierbarer zu gestalten als bisher. Wir verwenden zur Dokumentation die MELAG-Software MELAtace, mit der sich sämtliche Prozessschritte vom Thermodesinfektor bis Sterilisator direkt in einem Aufbereitungsprotokoll festhalten lassen. Die Dateien werden dann direkt auf unserem Praxisserver abgespeichert und sind im Notfall sofort abrufbar. Dadurch eliminieren wir zum einen Fehlerquellen, die beim handschriftlichen Protokollieren entstehen könnten, und sparen zum anderen Zeit. MELAtace vereinfacht, dank einer selbsterklärenden Benutzeroberfläche,

die Dokumentation des Aufbereitungsprozesses enorm.

### MELAtherm und MELAtace – eine gute Kombination

Zusammengefasst kann man sagen, dass sowohl die Entscheidung für den MELAtherm als auch für die Software MELAtace eine rundum gute Entscheidung war. Das Wegfallen von Fehlern und die Zeitersparnis sind eine große Erleichterung für alle – für die Mitarbeiter und damit auch für unsere Patienten. Diese Modernisierungen tragen dazu bei, dass wir unseren Patienten eine optimale individuelle Behandlung bieten können.

Abb. 4: Schnelles Verpacken mit dem MELAstore-System.



Abb. 4

#### DR. LUTZ KIENZLER

Kirchweg 31  
34121 Kassel  
Tel.: 0561 23267  
Fax: 0561 2889540  
praxis@zahnarzt-kienzler.de  
www.zahnarzt-kienzler.de

#### MELAG MEDIZINTECHNIK OHG

Geneststraße 6–10  
10829 Berlin  
Tel.: 030 757911-0  
Fax: 030 757911-99  
info@melag.de  
www.melag.de