

OBERFLÄCHENHYGIENE // Die Wahl des richtigen Desinfektionsmittels für die Geräteoberflächen ist der Schlüssel zur Hygienesicherheit und Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Doch der häufige Einsatz von Reinigungsmitteln mit hohem Alkoholgehalt auf nicht kompatiblen Oberflächen kann diese angreifen und damit die Qualität und Garantie der wertvollen Geräte schädigen. Die neuen, hocheffektiven KaVo Wipes™ Desinfektionstücher hingegen zeichnen sich durch einen niedrigen Alkoholgehalt aus. Sie sind getestet und empfohlen für Geräte von KaVo und anderen führenden Dentalmarken und bieten zuverlässigen Schutz gegen Bakterien, Viren, Pilze, TB und andere Mikroorganismen.

STARK GEGEN KONTAMINATION, SANFT ZU GERÄTEN

Edwin Fieseler / Biberach an der Riß

Bewährte Qualität setzt sich durch – das gilt natürlich auch für den Hygienebereich. Die KaVo Wipes™ erfreuen sich als Oberflächen-Desinfektionstücher in den USA (dort vertrieben als CaviWipes™) bereits seit über zehn Jahren großer Beliebtheit, mit nachgewiesenem Erfolg durch die strengen US-Behörden geprüfter Breitbandwirksamkeit. Seit Mai 2018 sind die neuen KaVo Wipes™ nun auch in Deutschland und Österreich erhältlich und können über den Daltfachhandel bezogen werden.

Schutz vor Kontaminationen

Die KaVo Wipes™ sind zertifiziert durch den VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) für die schnelle Reinigung und Desinfektion von nicht porösen, harten Oberflächen medizinischer Geräte mit Kunststoffen (wie etwa Polycarbonat, Polyvinylchlorid, Polypropylen und Polystyren), Edelstahl, Glas, Plexiglas, nicht porösem Vinyl und Sitzbezügen bzw. Polsterungen sowie lackierten Oberflächen.

Die besonders gute Materialverträglichkeit der KaVo Wipes™ schützt dabei die Qualität der wertvollen Geräte. Zudem sind sie auch für den Einsatz an nicht porösen

Abformmaterialien geeignet. Die neuen Oberflächen-Desinfektionstücher wurden getestet und freigegeben zum Schutz der Garantie und der Funktionsfähigkeit fast aller KaVo-Geräte, darunter KaVo-Instrumente, KaVo-Behandlungseinheiten sowie KaVo-Praxisausstattung und -Röntgengeräten.

Nur drei Minuten Einwirkzeit


Ein weiterer Vorteil: Die KaVo Wipes™ sind sofort gebrauchsfertig, ohne Mischen oder Verdünnen.

Die Einwirkzeit beginnt sofort, und in maximal drei Minuten ist eine klinische Wirksamkeit gegen Bakterien, Viren, Pilze, TB und andere Mikroorganismen erreicht, die in Dentalpraxen auftreten können. Durch diese kurzen Kontaktzeiten sind ebenso schnelle wie sichere Arbeitsabläufe und Patientenwechsel gesichert.

Desinfektionstücher können, wenn sie einen hohen Alkoholanteil besitzen, die Geräteoberflächen schädigen und dazu führen, dass Proteine aushärten und sich auf den Flächen festsetzen. Der niedrige

Alkoholanteil der KaVo Wipes™ hingegen führt zu einer geringeren Verdunstung sowie längeren Kontaktzeiten – und ermöglicht so eine sanfte und gründliche Reinigung, speziell bei Verunreinigungen mit Blut. Zudem sind die Desinfektionstücher aufgrund ihres Alkoholanteils von unter 20 Prozent nicht brennbar und daher sicher zu lagern. Außerdem sind die neuen KaVo Wipes™ frei von Duft- und Farbstoffen, Bleichmitteln, Aldehyden sowie Phenolen – also ganz ohne potenziell krebserregende Inhaltsstoffe.



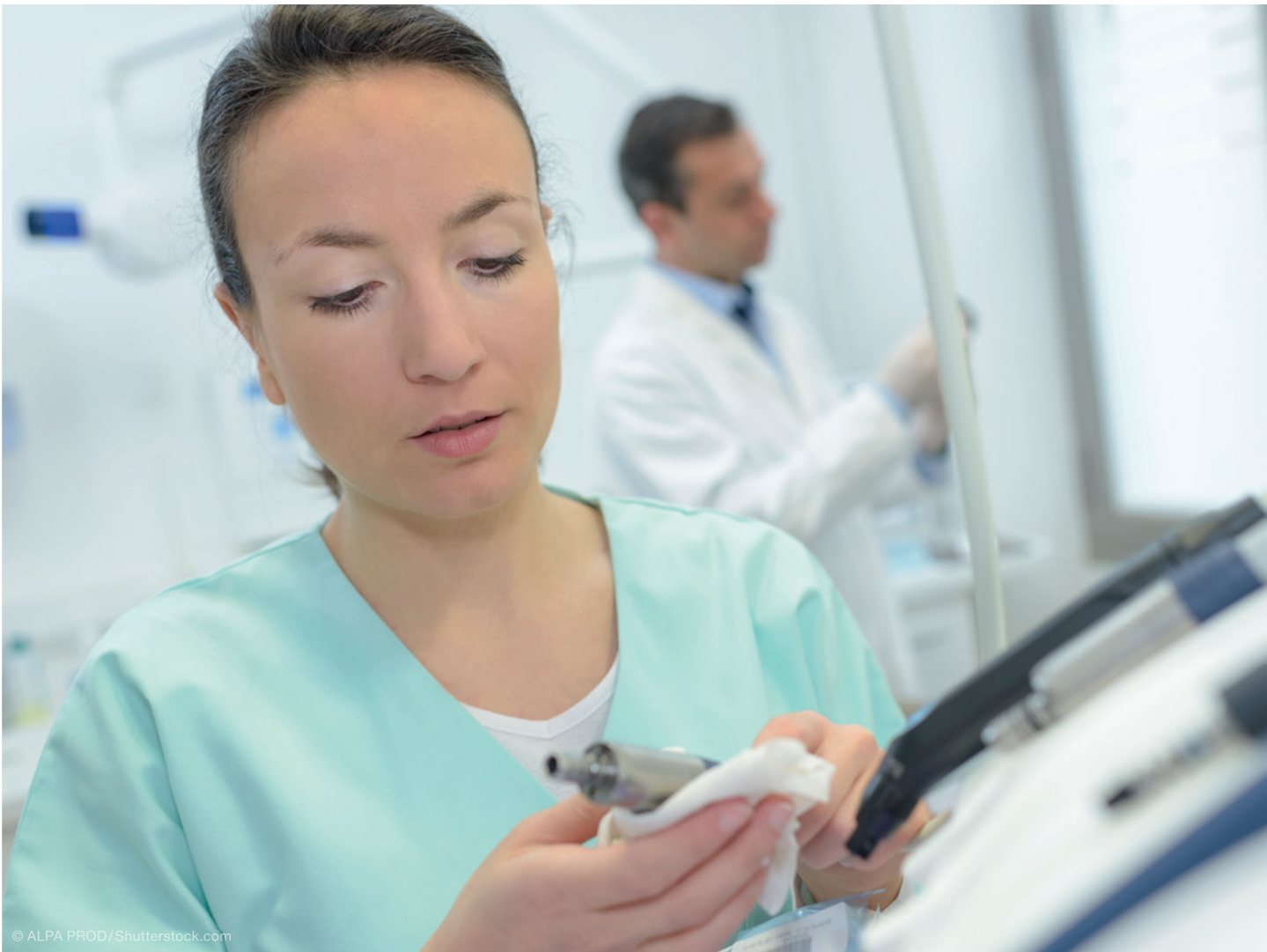

© ALPA PROD/Shutterstock.com

Dafür überzeugen sie umso mehr mit einer problemlosen Anwendung: Die neuen KaVo Wipes™ sind texturierte und besonders haltbare Tücher, die sich beim Wischen nicht zusammenziehen und voll getränkt bleiben. Durch ihre spezielle Materialstruktur aus strapazierfähigem Premium-Vliessubstrat absorbieren sie, ohne zu tropfen, reichlich Desinfektionslösung und trocknen nicht aus – egal, ob man sie als erstes Tuch für die Reinigung der Oberflächen oder als zweites Tuch für die Desinfektion einsetzt.

Kreuzkontaminationen vermeiden

Auf die Frage „Sprühdesinfektion oder Wischdesinfektion?“ gibt es eine klare Antwort: Laut einer RKI-Empfehlung sollte die

Sprühdesinfektion auf solche Bereiche beschränkt werden, die nicht durch eine Wischdesinfektion erreichbar sind. Da bei einer Sprühdesinfektion kleine Tröpfchen in die Luft gebracht werden, die eingeatmet werden oder sich auf der Haut absetzen können, und zudem nur eine unvollständige Benetzung der Flächen wahrscheinlich ist, sind gebrauchsfertige Breitspektrum-Desinfektionstücher wie die neuen KaVo Wipes™ erste Wahl im Praxisalltag.

237,9 Meter Schutz in einem Paket

Die neuen KaVo Wipes™ sind erhältlich in praktischen Paketen mit 12 Dosen. Jede Dose enthält dabei 65 vorgesättigte Tücher von 22,9 x 30,5 cm Größe. „Das be-

deutet: 237,9 Meter fortlaufender Schutz pro Paket, und das für deutlich unter 10 Euro pro Dose“, sagt Luisa Roncoroni, Marketing Manager Infection Prevention bei KaVo Kerr. „Dank ihres hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses lohnen sich die neuen KaVo Wipes™ jeden Tag: Sie wünschen alles weg – nur nicht die unbezahlbare Qualität und Funktionsfähigkeit der Geräte von KaVo oder anderer Dentalmarken in der Praxis.“

KAVO DENTAL GMBH

Bismarckring 39
88400 Biberach an der Riß
Tel.: 07351 56-0
Fax: 07351 56-1488
info@kavokerr.com
www.kavo.de